

DESENGASGADOR MVW

FINALIDADE DE USO

O produto é recomendado para uso em caso de engasgamento (obstrução das vias aéreas) por seres humanos. O desengasgador tem como finalidade expulsar alimentos ou objetos, retornando a passagem de ar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW ON-LINE LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

O desengasgador MVW:

- deve ser usado em casos que o procedimento padrão de desengasgo tenha sido aplicado sem sucesso;
- deve ser usado somente em vítimas de engasgamento por obstrução das vias aéreas;
- é de uso exclusivo para seres humanos;
- não deve ser usado se não houver engasgamento e se a pessoa estiver respirando sozinha.

PRECAUÇÕES

O produto deve ser utilizado:

- apenas em seres humanos;
- conforme instrução de uso.

FABRICADO POR:

Baoding Sanji Medical Instrument
Technology Co., Ltd.

IMPORTADO E

DISTRIBUÍDO POR:

MVW ON-LINE LTDA

CNPJ: 51.616.394/0001-48

Rua Duque de Caxias 600 - Jardim
Eldorado - Pirassununga - SP - Brasil
CEP: 13630-500

SAC: sac@mvw.com.br

Site: www.mvwonline.com.br

Responsável Técnico: Mauro Rodrigo
Vieira

CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82859610001

DESENGASGADOR MVW

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por polietileno de baixa densidade, ABS e PVC.

VALIDADE

05 anos a partir da data de fabricação

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo: uma máscara infantil e uma máscara adulto.

DIMENSÕES

Dispositivo (cm): 18x9,5

Máscara infantil:

- Comprimento (cm): $6,4 \pm 1,5$
- Largura (cm): $8,0 \pm 2$
- Altura (cm): $10,1 \pm 2$

Máscara adulta:

- Comprimento (cm): $7,7 \pm 1,5$
- Largura (cm): $10,2 \pm 2$
- Altura (cm): $13,0 \pm 1,5$

DESENGASGADOR MVW

MODO DE USO

- 1- Acoplar a máscara ideal (infantil ou adulta) ao dispositivo;*
- 2- Colocar a máscara sobre o nariz e boca da vítima. Segure a máscara com a mão para que ela fique bem vedada ao rosto da vítima;*
- 3- Empurre o êmbolo para baixo com a mão, todo ar deve escapar do sistema de válvula unidirecional, evitando que a obstrução seja empurrada ainda mais para dentro da vítima*
- 4- Puxe o êmbolo enquanto segura a máscara no lugar para criar uma sucção. Se a obstrução não sair na primeira puxada, continue a empurrar e puxar o êmbolo sem remover o dispositivo do rosto da vítima.*

1- Colocar a máscara sobre o nariz e a boca e segura para vedar



2- Empurre o êmbolo para baixo para retirar o ar do sistema



3- Puxe o êmbolo enquanto segura a máscara no

