



LIMA ODONTOLÓGICA MANUAL PARA CANAL – AÇO INOXIDÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para cortar, nivelar, limpar e modelar ossos dentários, canais radiculares em tratamentos odontológicos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso profissional
Somente para uso odontológico
Realizar a esterilização do produto antes do uso
O produto deve ser utilizado apenas para o uso pretendido.

PRECAUÇÕES

Para o uso seguro, siga as instruções cuidadosamente
Antes do uso, verificar se foi realizada a esterilização do produto
Verificar se o instrumento está apto para uso, sem deformações e desgastes. Verificar se a superfície de corte está danificanda ou sem corte.
Se o instrumento estiver deformado, a borda da lima estiver cega ou perder sua função normal, não utilizar mais o produto.
Selecione e verifique se o modelo escolhido é o adequado para o procedimento
O produto, ao final da vida útil, deve ser esterelizado antes do descarte
Caso o produto apresente alguma anomalia, suspender o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

FABRICADO POR:

HUI ZHOU VIDEYA TECHNOLOGY CO.,LTD
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176169007

LIMA ODONTOLÓGICA MANUAL PARA CANAL – AÇO INOXIDÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL



MODO DE USO

As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

VALIDADE

05 anos a partir da data de fabricação.

COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável.

CONTEÚDO

O produto pode ser comercializado em embalagens contendo: 3, 5 ou 6 unidades. Quantidades variadas de acordo com o modelo comercial.

LIMITAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO

O usuário do produto deve monitorar as boas condições do material. O produto não deve ser utilizado se apresentar algum defeito, tais como:

- Deformação;
- Fratura;
- Corrosão;
- Lâminas de corte cegas;
- Perda da marcação ou código de cores;
- Fios danificados;
- Falta de marca de tamanho.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

LIMA ODONTOLÓGICA MANUAL PARA CANAL - AÇO INOXIDÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL



MODELOS COMERCIAIS

Videya Manual - SS:

Apresentação: K (K-FILES), R (REAMERS), S (SPREADERS), H (H-FILES), P (PLUGGERS), SUPER-FILES, V, VG, O, T, TC, TS, TD, TM, TB, TA, TR, TH, TO, DT, N, W, WF, D, R, KV, KV2, KV4, KV6, DH, DH2, DH4, DH6, MH, HC, HD, KC, KH, VIDEYA-DZ.

Comprimento: 11mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 25mm, 28mm, 31mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm, 140mm.

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado antes de sua utilização seguindo os parâmetros abaixo:

- Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos;
- ou
- Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos.