



## LIMA ODONTOLÓGICA PARA CANAL – NÍQUEL-TITÂNIO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

### FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para cortar, nivelar, limpar e modelar ossos dentários, canais radiculares em tratamentos odontológicos.

### ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

### ADVERTÊNCIAS

Produto de uso profissional  
Somente para uso odontológico  
Realizar a esterilização do produto antes do uso  
O produto deve ser utilizado apenas para o uso pretendido.

### PRECAUÇÕES

Para o uso seguro, siga as instruções cuidadosamente  
Antes do uso, verificar se foi realizada a esterilização do produto  
Verificar se o instrumento está apto para uso, sem deformações e desgastes. Verificar se a superfície de corte está danificando ou sem corte.  
Se o instrumento estiver deformado, a borda da lima estiver cega ou perder sua função normal, não utilizar mais o produto.  
Selecione e verifique se o modelo escolhido é o adequado para o procedimento  
O produto, ao final da vida útil, deve ser esterilizado antes do descarte  
Caso o produto apresente alguma anomalia, suspender o uso.

### ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

### FABRICADO POR:

HUI ZHOU VIDEYA TECHNOLOGY CO.,LTD  
INDÚSTRIA CHINESA

### IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 11.014.241/0001-06  
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -  
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030  
SAC: sac@wissenconsultoria.com  
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira  
CRQ IV- 04366291

### REGISTRO ANVISA:

82176169006

# LIMA ODONTOLÓGICA PARA CANAL – NÍQUEL-TITÂNIO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL



## MODO DE USO

As limas endodônticas devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

## VALIDADE

05 anos a partir da data de fabricação.

## COMPOSIÇÃO

Níquel-Titânio.

## CONTRAINDICAÇÃO

Não recomendado para pessoas que possuem sensibilidade ao níquel.

## CONTEÚDO

O produto pode ser comercializado em embalagens contendo: 3, 5 ou 6 unidades. Quantidades variadas de acordo com o modelo comercial.

## LIMITAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO

O usuário do produto deve monitorar as boas condições do material. O produto não deve ser utilizado se apresentar algum defeito, tais como:

- Deformação;
- Fratura;
- Corrosão;
- Lâminas de corte cegas;
- Perda da marcação ou código de cores;
- Fios danificados;
- Falta de marca de tamanho.

## TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

# LIMA ODONTOLÓGICA PARA CANAL – NÍQUEL-TITÂNIO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL



## MODELOS COMERCIAIS

### Videya Rotary - NiTi

Apresentação: K (K-FILES), H (H-FILES), V, VG, TC

Comprimento: 16mm, 18mm, 19mm, 21mm, 25mm, 28mm, 31mm

## ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado antes de sua utilização seguindo os parâmetros abaixo:

- Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos;
- ou
- Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos.