



LIMA PARA ODONTOLOGIA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para exploração ou tratamento da superfície dentária, corpo dentário, polpa e tecido circundante.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso profissional
Somente para uso odontológico
Realizar a esterilização do produto antes do uso
O produto deve ser utilizado apenas para o uso pretendido.

PRECAUÇÕES

Para o uso seguro, siga as instruções cuidadosamente
Antes do uso, verificar se foi realizada a esterilização do produto
Verificar se o instrumento está apto para uso, sem deformações e desgastes. Verificar se a superfície de corte está danificando ou sem corte.
Se o instrumento estiver deformado, a borda da lima estiver cega ou perder sua função normal, não utilizar mais o produto.
Selecione e verifique se o modelo escolhido é o adequado para o procedimento
O produto, ao final da vida útil, deve ser esterilizado antes do descarte
Caso o produto apresente alguma anomalia, suspender o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

FABRICADO POR:

HUI ZHOU VIDEYA TECHNOLOGY CO.,LTD
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176169004



LIMA PARA ODONTOLOGIA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

As limas endodônticas manuais devem ser utilizadas somente por profissionais especializados (dentistas), que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

VALIDADE

05 anos a partir da data de fabricação.

COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável.

CONTRAINDICAÇÃO

Não há contraindicação do produto.

CONTEÚDO

O produto pode ser comercializado em embalagens contendo: 10 unidades

LIMITAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO

O usuário do produto deve monitorar as boas condições do material.
O produto não deve ser utilizado se apresentar algum defeito, tais como:

- Deformação;
- Fratura;
- Corrosão;
- Lâminas de corte cegas;
- Perda da marcação ou código de cores;
- Fios danificados;
- Falta de marca de tamanho.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.



LIMA PARA ODONTOLOGIA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Vdeya - L21, Vdeya - L25, Vdeya - L31

Cores: Roxo, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado antes de sua utilização seguindo os parâmetros abaixo:

- Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos;
- ou
- Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos.