



AVENTAIS CIRÚRGICOS ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

Os aventais cirúrgicos atuam como uma barreira física contra fluidos corporais, partículas e microrganismos durante procedimentos cirúrgicos, destinados a proteção dos profissionais bem como a dos pacientes.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso externo
Proibido reprocessar
Descartar os materiais em local apropriado após o uso
Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor, em ambiente livre de umidade, poeira e vapores químicos
A esterilidade do produto só é garantida enquanto a embalagem estiver lacrada
Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada
Não utilizar o produto fora do prazo de validade
Não utilizar o produto para outro fim que não seja para o qual se destina
Abrir a embalagem somente no momento do uso

PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada
Não utilizar o produto fora do prazo de validade
Descartar o produto após o uso em lixo hospitalar

ARMAZENAMENTO

Os produtos devem ser armazenados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade e vapores químicos.

TRANSPORTE

Os produtos devem ser transportados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade, poeira e vapores químicos.

ESTERILIZAÇÃO

O produto estéril por óxido de etileno.

FABRICADO POR:

Xianning Full Guard Medical Products Co. Ltd.
Yongan East Road - Wenquan Economic
Development Zone - Cianning City - Hubei
Province - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Atlas Medical Produtos Hospitalares LTDA
CNPJ: 17.278.910/0001-33
Avenida Amaral Peixoto - 91, salas 804 e 805 -
Centro - Volta Redonda - RJ - CEP: 27253-220
SAC: contato@atlasmedical.com.br
Responsável Técnico: Flavia Ormond Turetta
COREN RJ - 000.326.436

SOB LICENÇA DE:

Wissen Consultoria LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno 864 - Pirassununga - SP

REGISTRO ANVISA:

82176160014



AVENTAIS CIRÚRGICOS ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

- 1- Observar a integridade da embalagem, se está devidamente lacrada e as informações contidas nas mesma.
- 2- Abra a embalagem pelo local indicado e de forma asséptica para evitar contaminação do produto.
- 3- Retire e disponha o produto em local adequado para o uso.
- 4- Realize o procedimento cirúrgico.
- 5- Descarte o produto em local adequado.
- 6- Não reutilizar o produto.

VALIDADE

05 anos.

COMPOSIÇÃO

Os produtos possuem a composição: TNT/SMS/SMMS/SMMMS/SSMMS

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo 1 unidade por embalagem.

MODELOS COMERCIAIS

Avental Cirúrgico Estéril com punho de malha:

Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG

Gramatura: 40g a 70g

Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril com manga e elástico:

Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG

Gramatura: 40g a 70g

Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril com punho de malha e toalha de mão absorvente:

Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG

Gramatura: 40g a 70g

Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco



AVENTAIS CIRÚRGICOS ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Avental Cirúrgico Estéril Laminado com punho de malha:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico estéril laminado com manga e elástico:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril laminado impermeável com punho de malha e toalha de mão absorvente:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril sem manga:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril laminado sem manga:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Camisola para paciente estéril:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco

Avental Cirúrgico Estéril Sem Reforço:
Tamanhos: 110cm a 145cm x 155cm a 185cm / U,P,M,G,GG
Gramatura: 40g a 70g
Cores: Azul claro, Azul marinho, Verde e Branco