

CABO PARA ECG

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FABRICADO POR:

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
#112 QINHUANG WEST STR., E&T
DEVELOPMENT ZONE, QINHUANGDAO,
HEBEI PROVINCE, CHINA
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

MVW ON-LINE LTDA
CNPJ: 51.616.394/0001-48
Rua Duque de Caxias 600 - Jardim
Eldorado - Pirassununga - SP - Brasil
CEP: 13630-500
SAC: sac@mvw.com.br
Site: www.mvwonline.com.br
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo
Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82859619001

FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para uso com aparelho de ECG para o monitoramento de parâmetros do paciente.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW ON-LINE LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Os cabos devem ser colocados de forma correta no paciente para evitar que os fios embarace ou asfixia do paciente

Não utilize fios condutores durante exames de ressonância magnética, pois a corrente induzida pode causar queimaduras

Para reduzir interferências na hora da medição, não colocar os fios próximos a fonte de alimentação do equipamento

Ao conectar os eletrodos no paciente, certifique-se que o conector não entre em contato com outras peças condutoras

ou terra

Certifique-se que os eletrodos foram conectados nos locais corretos no paciente

Não imergir os cabos em líquido

Não utilizar álcool na limpeza do produto

CABO PARA ECG

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado ao abrigo de luz e calor e sem gás corrosivo.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor e sem gás corrosivo.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por plástico TPU.

VALIDADE

02 anos a partir da data de fabricação

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo uma unidade de cabo por embalagem. Cada unidade é composta por 5 cabos.

DIMENSÕES

Comprimento (mm): 650

Largura (mm): 3

Altura (mm): 3

CABO PARA ECG

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

- 1- Antes de utilizar o produto, verifique se o mesmo encontra-se sem danos.
- 2- Verificar se o produto está limpo antes do uso
- 3- Utilizar o produto em temperatura ambiente

LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

Limpeza e desinfecção do produto:

Não mergulhar os cabos em água ou desinfetante;
Não molhar os pinos do conjunto do cabo;
Realizar a desinfecção sempre que necessário.
Não utilizar álcool ou substâncias com álcool para limpeza.

Limpeza: A limpeza deve ser realizada utilizando solução de glutaraldeído 2% e solução de hipoclorito de sódio 10%.

- 1- Limpar a superfície do cabo com um pano limpo embebido nas soluções citadas.
- 2- Passa um pano molhado com água e seque.

Desinfecção:

- 1- Para realizar a desinfecção do produto realizar primeiramente a limpeza com Solução de Glutaraldeído 2% e

Hipoclorito de Sódio 10% seguindo o passo-a-passo do item acima: limpeza

- 2- Utilizar algodão ou um pano limpo e macio em desinfetante, limpar o conjunto de cabos.
- 3- Com um pano macio embebido de água retirar o resíduo de desinfetante
- 4- Deixar o conjunto de cabos secar.