



CUNHA ODONTOLÓGICA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

As cunhas odontológicas são utilizadas na área interdental e cervical dos dentes durante procedimentos intraorais. É usada para separar ligeiramente os dentes durante os procedimentos. É usada para estabilizar as bandas de matriz no processo de restauração dentária.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou molhada;

O fabricante recomenda uso único;

Seguir as legislações locais para descarte do produto;

Para uso profissional;

Não utilizar o produto se apresentar danos e/ou rebarbas

PRECAUÇÕES

Utilizar o produto somente para o uso pretendido.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

Transportar o produto ao abrigo de luz e calor.

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado pelo método da autoclave:

Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos ou

Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos

FABRICADO POR:

Tangshan Zhengtong Exhibition Co., LTD
Nº 24. Chaoyang Road, Lubei District, Tangshan
City - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176169011



CUNHA ODONTOLÓGICA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

1. Selecione a cunha odontológica apropriada para o procedimento;
2. Colocar a cunha no espaço inter proximal
3. Efetuar a restauração utilizando o sistema de matriz desejado;
4. Após a conclusão do procedimento, retirar a cunha odontológica e descartá-la.

VALIDADE

05 anos.

COMPOSIÇÃO

As cunhas odontológicas são compostas por polipropileno.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

O produto pode ser comercializado em embalagens contendo: 80 ou 100 unidades.

MODELOS COMERCIAIS

W1 1.0

Embalagem contendo: 200 unidades

Tamanhos: Extra pequeno (PP), Pequeno (P), Médio (M), Grande (G)

Cor: Azul

W2 1.0

Embalagem contendo: 100 unidades

Tamanhos: Extra pequeno (PP), pequeno (P), médio (M), grande (G)

Cor: Azul

W3 1.0

Embalagem contendo: 40 unidades

Tamanhos: Médio (M)

Cor: Verde



CUNHA ODONTOLÓGICA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

W3 2.0

Embalagem contendo: 40 unidades

Tamanhos: Médio (M)

Cor: Verde

W4 2.0

Embalagem contendo: 80 unidades

Tamanhos: Extra pequeno (PP), pequeno (P), Médio (M), grande (G) e extra grande (GG)

Cores: amarelo, azul, rosa, laranja, verde.

W4 3.0

Embalagem contendo: 80 unidades

Tamanhos: Extra Pequeno (PP), Pequeno (P), Médio (M), Grande (G), Extra Grande (GG)

Cor: amarelo, azul, laranja, verde, roxo

W5 1.0

Embalagem contendo: 36 unidades

Tamanhos: Pequeno (P), Médio (M), Grande (G)

Cor: Branco, azul

W5 2.0

Embalagem contendo: 36 unidades

Tamanhos: Pequeno (P), Médio (M), Grande (G)

Cor: Branco

W6 1.0

Embalagem contendo: 36 unidades

Tamanhos: Extra Pequeno (PP), Pequeno (P), Médio (M), Grande (G)

Cor: verde, azul, laranja, amarelo

W7 1.0 Embalagem contendo: 50 unidades

Tamanhos: Médio (M)

Cor: verde, azul, amarelo, rosa, laranja