



GRAMPOS ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

Os grampos odontológicos são dispositivos que visam isolar o dente do restante da boca, para proceder nas situações em que é necessário isolamento e, desse modo, facilitar a realização de algumas intervenções.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso profissional

Verificar se o produto foi esterilizado antes do uso

Tentativas de alongamento, dobramento ou de qualquer tipo de modificação podem causar a ruptura.

É recomendado que o grampo seja amarrado com um fio dental cuja extremidade livre permaneça fora da boca

Não utilizar se o produto apresentar defeitos, rachaduras ou distorção

PRECAUÇÕES

Utilizar o produto apenas para o uso pretendido

Antes do uso, a área de tratamento deve ser coberta com um lençol de borracha para garantir utilização segura

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

Transportar ao abrigo de luz e calor e afastado de substâncias corrosivas.

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado pelo método da autoclave:

Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos ou

Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos

FABRICADO POR:

Tangshan Zhengtong Exhibition Co., LTD
Nº 24. Chaoyang Road, Lubei District, Tangshan
City - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176160015



GRAMPOS ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

1. Escolher o modelo de grampo ideal para o procedimento;
2. Perfurar o lençol de borracha de acordo com a posição do dente e do tamanho;
3. Encaixar o furo do lençol de borracha ao redor do dente que será tratado;
4. Encaixar o grampo com o uso do alicate (porta-grampo), no dente a ser tratado;
5. Verificar se o grampo ficou devidamente encaixado e na posição correta para o procedimento;
6. Fazer uso do fio dental entre o dente e a estrutura do grampo para melhor condição de isolamento;
7. Após realizar o procedimento, retirar o fio dental e o grampo com auxílio do alicate porta-grampo.

VALIDADE

05 anos.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por: PEEK

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em caixas, contendo: 1, 2 ou 4 unidades por caixa.

MODELOS COMERCIAIS

R1 2.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R2 3.0

Tamanhos: P, M

Quantidade por embalagem: 1 unidades por caixa

Composição: PEEK



GRAMPOS ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

R3 1.0

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 2 unidades por caixa

Composição: PEEK

R3 2.0

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 2 unidade por caixa

Composição: PEEK

R4 1.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R4 2.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R5 1.0

Tamanhos: P, M, G

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R6 1.0

Tamanhos: P, M

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R7 1.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R8 1.0A

Tamanhos: Infantil

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK



GRAMPOS ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

R8 1.0B

Tamanhos: Infantil

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R9 1.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

R10 1.0

Tamanhos: Padrão

Quantidade por embalagem: 1 unidade por caixa

Composição: PEEK

Z1

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 2 unidades por caixa

Composição: PEEK

Z2

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 2 unidades por caixa

Composição: PEEK

Z4

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 2 unidades por caixa

Composição: PEEK

Z21

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 4 unidades por caixa

Composição: PEEK

Z22

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 4 unidades por caixa

Composição: PEEK



GRAMPOS ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Cotton Roll Holder

Tamanhos: PP, P, M, G

Quantidade por embalagem: 4 unidades por caixa

Composição: PEEK