

IMOBILIZADOR ORTOPÉDICO PARA COTOVELO

FABRICADO POR:

Xiamen Twe Orthopedics Co., LTD
5th Floor, Building 4, N° 29 Xinle Road,
Haicang District, XiaMen City - Fujian -
China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

MVW ON-LINE LTDA
CNPJ: 51.616.394/0001-48
Rua Duque de Caxias 600 - Jardim
Eldorado - Pirassununga - SP - Brasil
CEP: 13630-500
SAC: sac@mvw.com.br
Site: www.mvwonline.com.br
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo
Vieira
CREA SP - 260435864-6

REGISTRO ANVISA:

82859610003

FINALIDADE DE USO

O produto possui como finalidade estabilizar segmentos ósseos em ampla gama de indicação, sendo elas: fraturas, luxações, pós-operatórios, entre outros.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW ON-LINE LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lavar em água fria, ciclo suave e sabão suave.
Não lavar a seco ou secar na máquina.
Não usar alvejante. Secar em corrente de ar e não expor o produto a nenhuma fonte de calor.
Não utiliza o produto se tiver reação alérgica ao material.
Consulte seu médico.

PRECAUÇÕES

Utilizar o produto de acordo com as indicações de uso deste manual.

IMOBILIZADOR ORTOPÉDICO PARA COTOVELO

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por plástico, alumínio e tecido.

VALIDADE

Indeterminada.

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo uma unidade por embalagem.


MODELO COMERCIAL

Tenwells (TE-003)

Produto disponível para o lado esquerdo e lado direito.


IMOBILIZADOR ORTOPÉDICO PARA COTOVELO

MODO DE USO

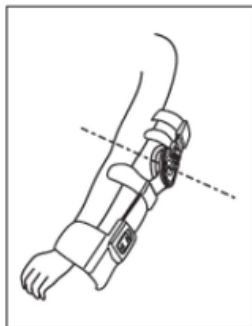


1. Localize o centro do pivô da dobradiça sobre o epicôndilo ulnar lateral (cotovelo externo) para avaliar o comprimento.

2. Para ajustar o comprimento, empurre o interruptor de alternância na vertical e puxe o manguito para longe da dobradiça do cotovelo até o comprimento desejado.

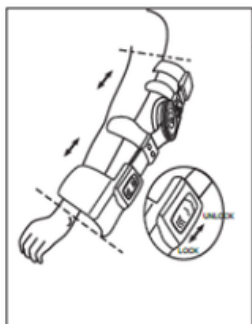


3. A extensão inferior (parte do braço anterior) deve se estender até o processo estiloide (pulso). A extensão superior (parte superior do braço) deve se estender até a posição mais confortável na axila.

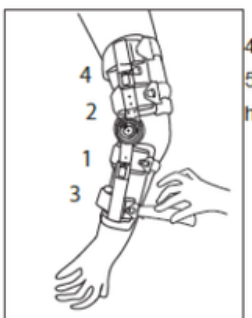

4. Empurre o interruptor para trás para travá-lo.


5. Prenda as tiras, começando com as duas tiras mais próximas do cotovelo.

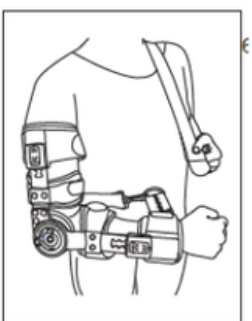


6. Enrole a tira da axila para trás e puxe para cima para a frente, ultrapassando o trapézio do lado oposto. Você pode precisar de ajuda de outras pessoas nesta etapa.




IMOBILIZADOR ORTOPÉDICO PARA COTOVELO

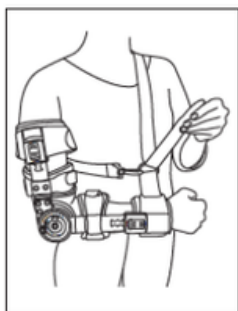

6. Enrole a tira da axila para trás e puxe para cima para a frente, ultrapassando o trapézio do lado oposto. Você pode precisar de ajuda de outras pessoas nesta etapa.

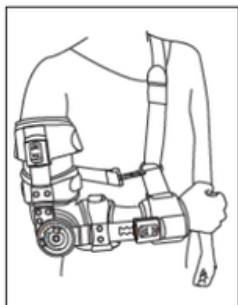

7. Passe a tira pelo anel D.

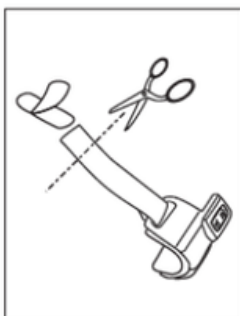


9. Se necessário, você deve aparar a alça para um ajuste seguro. Remova a peça do gancho, apare a alça e reaplique a peça do gancho.


10. As barras laterais podem ser dobradas para se ajustarem ao contorno anatômico individual. As barras laterais devem ser dobradas até que o ajuste final do comprimento seja concluído.

IMOBILIZADOR ORTOPÉDICO PARA COTOVELO

Modo de Uso Dobradiça

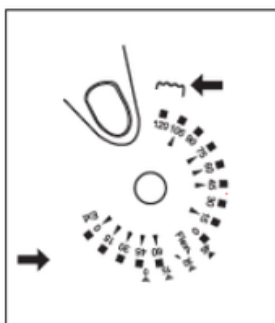

1. Empurre o botão de flexão ou extensão para dentro e mude para as configurações de ângulo desejadas.

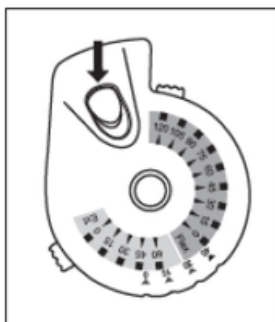

2. Se for necessário um ângulo fixo, alinhe a dobradiça no ângulo apropriado e deslize o botão de trava de queda para fixar o ângulo.