



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

As Limas Para Odontologia são utilizados por dentistas para explorar, modelar, limpar e preencher o canal radicular. São comumente empregados no tratamento de doenças endodônticas e doenças periapicais.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

O produto deve ser utilizado apenas por profissionais especializados.
]O produto deve ser limpo, desinfetado/esterilizado antes do uso.
O produto está limitado a fins de tratamento odontológico.
Produto é de uso único.

PRECAUÇÕES

Para o uso seguro, siga as instruções cuidadosamente
Antes do uso, verificar se foi realizada a esterilização do produto
Verificar se o instrumento está apto para uso, sem deformações e desgastes.
Verificar se a superfície de corte está danificada ou sem corte.
Se o instrumento estiver deformado, a borda da lima estiver cega ou perder sua função normal, não utilizar mais o produto.
Selecione e verifique se o modelo escolhido é o adequado para o procedimento
O produto, ao final da vida útil, deve ser esterilizado antes do descarte
Caso o produto apresente alguma anomalia, suspender o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

FABRICADO POR:

SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO. LTD.
ROOM 1206 N. 4 BUILDING, CHONGWEN
GARDEN, TAOYUAN, NANSHAN, SHENZHEN,
CHINA
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176169009



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

As limas endodônticas devem ser utilizadas em temperatura ambiente e somente por profissionais especializados, que possuem a técnica e treinamento para sua utilização.

VALIDADE

05 anos a partir da data de fabricação.

COMPOSIÇÃO

As limas possuem a lâmina feita de NiTi, o cabo é feito de cobre, o encaixe é feito de borracha de silicone.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto contém Níquel e Cromo e não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade alérgica a estes metais.

CONTEÚDO

O produto pode ser comercializado em embalagens contendo: 03, 06 ou 10 unidades. Dependendo do modelo comercial do produto.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado antes de sua utilização seguindo os parâmetros abaixo:

- Temperatura = 134°C, Tempo: 18 minutos;



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Engine Condenser

Comprimento: 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Vermelho, Azul, Verde, Preto.

KV2

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

KV4

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

KV6

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

DH2

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

DH4

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

DH6

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

W Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,21mm; 0,25mm; 0,40mm.

Cores: Amarelo, Vermelho, Preto.

W+ Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,20mm; 0,25mm; 0,35mm; 0,45mm;

Cores: Amarelo, Vermelho, Verde, Branco.

KC Files

Comprimento: 21mm, 25mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,23mm.

Cor: Vermelho.

V Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm; 0,40mm; 0,50mm.

Cores: Amarelo, Vermelho, Preto.

A Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cor: Vermelho.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

CF Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,40mm.

Cores: Amarelo, Vermelho, Preto, Azul.

HF Files

Comprimento: 19mm, 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,40mm.

Cores: Amarelo, Vermelho, Preto, Azul.

PTF Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,40mm.

Cores: Amarelo, Roxo, Branco.

PRG Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,16mm.

Cor: Branco.

V Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm; 0,40mm; 0,50mm.

Cores: Amarelo, Vermelho, Preto.

T Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,17mm.

Cor: Amarelo.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

W+Tunnel

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm.

Cor: Branco.

E Files

Comprimento: 22mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cores: -.

XP-3D-F Files

Comprimento: 25mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cor: Vermelho.

XP-3D-S Files

Comprimento: 25mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,30mm.

Cor: Azul.

Sun Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15mm; 0,20mm; 0,25mm;
0,30mm; 0,35mm; 0,40mm; 0,45mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

KM Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,10mm; 0,20mm; 0,25mm;
0,30mm; 0,35mm; 0,40mm; 0,45mm;

Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

EZ-ONE

Comprimento: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,17mm; 0,19mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,35mm; 0,45mm;

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Verde.

EZ-PASS

Comprimento: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,15; 0,20mm; 0,25mm.

Cores: Branco, Amarelo, Vermelho.

EZ-CAN

Comprimento: 17mm, 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,13mm; 0,15mm; 0,19; 0,20mm.

Cores: Branco, Amarelo, Roxo.

EZ-LARGE

Comprimento: 21mm, 25mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,30mm; 0,35mm; 0,40mm; 0,45mm; 0,50mm;

Cores: Azul, Verde, Amarelo, Preto.

U Files

Comprimento: 19mm, 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,17mm; 0,19mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,40mm; 0,50mm.

Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Preto.

X Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,17mm; 0,25mm; 0,30mm; 0,40mm; 0,50mm.

Cores: Roxo, Azul, Amarelo, Vermelho, Preto.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

O Files

Comprimento: 16mm, 18mm, 22mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm.

Cores: Roxo, Azul, Amarelo, Vermelho, Preto.

MC1 Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cor: Branco.

MU Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cor: Vermelho.

MS30 Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,30mm.

Cor: Azul.

MS35 Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,35mm.

Cor: Verde.

MS40 Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,40mm.

Cor: Preto.

MC2 Files

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.

Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.

Cor: Amarelo.



LIMA ODONTOLÓGICA NITI SUPERLINE

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Barbed Broaches

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Square Broach

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Smooth Broach

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Gates Drill

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Rotary K File

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Rotary H File

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.

Rotary Reamer

Comprimento: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm.
Diâmetro da projeção da peça de trabalho: 0,25mm.
Cores: Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Preto.