



POLIDORES ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

O polidor é uma peça rotativa projetada para ser fixada em uma peça de mão (contra ângulo) para produzir uma rotação abrasiva utilizada para polir, alisar e dar acabamento em procedimentos odontológicos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso único

Não utilize ferramentas de polimentos que estiverem defeituosas, danificadas, deformadas.

Utilizar os EPIs adequados para manusear o produto.

Produto de uso profissional

Utilizar o produto apenas para o uso pretendido

Não molhe e desinfete o produto utilizando álcool ou enzimas para evitar deterioração.

PRECAUÇÕES

Utilizar os EPIs adequados para manusear o produto.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

Transportar o produto ao abrigo de luz e calor.

ESTERILIZAÇÃO

O produto deve ser esterilizado pelo método da autoclave:

Temperatura = 121°C, Pressão = 0,1MPa, Tempo: 20 minutos ou

Temperatura = 134°C, Pressão = 0,2MPa, Tempo: 05 minutos

FABRICADO POR:

Tangshan Zhengtong Exhibition Co., LTD
Nº 24. Chaoyang Road, Lubei District, Tangshan
City - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

82176160016



POLIDORES ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

1. Encaixar o disco de polimento no mandril
2. Encaixar o mandril no contra-ângulo
3. Verificar se o conjunto está pronto para operação, ou seja, acionar o dispositivo verificar se a rotação está suave, sem saltos
4. Aplicar o produto em baixa rotação, exercendo pouca pressão, em movimentos circulares e toque intermitentes

VALIDADE

05 anos.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por um mandril de aço inoxidável e ponta de carboneto de silício.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em caixas cartonadas contendo unidades variadas de produto, conforme indicado em cada modelo comercial

MODELOS COMERCIAIS

P1 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 10 unidades / caixa

Cores: Verde e Branco

P2 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 6 unidades / caixa



POLIDORES ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

P2 2.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 8 unidades / caixa

P2 3.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 6 unidades / caixa

P3 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 6 unidades / caixa

P3 2.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 8 unidades / caixa

P3 3.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 6 unidades / caixa

P4 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 8 unidades / caixa

P5 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 8 unidades / caixa

P6 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 25 unidades / caixa



POLIDORES ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

P7 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 10 unidades / caixa

P8 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 25 unidades / caixa

P9 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 10 unidades / caixa

P10 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 50 unidades da ponta + 1 mandril/ caixa

P12 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 40 unidades da ponta + 2 mandril/ caixa 100 unidades da ponta + 4 mandril / caixa

P12 2.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 100 unidades da ponta + 1 mandril/ caixa

P20 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 100 unidades / caixa

P21 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 100 unidades / caixa



POLIDORES ODONTOLÓGICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

P23 1.0

Composição mandril: Aço Inoxidável

Composição ponta: Carboneto de Silício

Quantidade por embalagem: 8 unidades / caixa