

Meia de Compressão-Vital Medical

Produto:

A Meia 3/4 Média Compressão Vital Medical é projetada para oferecer conforto e suporte para as pernas. O produto apresenta compressão moderada (média compressão), ideal para cuidados preventivos, além de ser fácil de vestir pois possui zíper.

Composição:

O material do produto é composto por: Poliamida e elastano.

Indicações de uso:

Meia 3/4 Média Compressão Vital Medical é projetada para oferecer conforto e suporte para as pernas. O produto apresenta compressão moderada (média compressão), ideal para cuidados preventivos, além de ser fácil de vestir pois possui zíper. É recomendável que as meias de compressão sejam usadas durante o dia e retiradas à noite antes de dormir. O produto é indicado para: Inchaço; Dores; Cansaço; Varizes nas pernas; utilizar durante e após a gestação; Uso de pílulas anticoncepcionais; Longos períodos em pé ou sentada; Propensão hereditária, antes e após cirurgias.

Apresentação:

produto é comercializado em embalagem primária de papelão contendo 1 unidade por embalagem. O produto possui como embalagem secundária plástico transparente (polipropileno). 1 par de meia por embalagem.

Disponível nos tamanhos:

-P/M: Tornozelo(16-23cm); Panturrilha(25-36cm); comprimento(34cm).

-G/GG: Tornozelo(18-25cm); Panturrilha(30-41cm); Comprimento(37cm).

-XG: Tornozelo(20-28cm); Panturrilha(36-46cm); Comprimento(43cm).

Condições de Armazenamento:

Em embalagem íntegra: Guarde em um lugar fresco e seco, longe da luz direta do sol.

Depois de aberto: Armazene em um local arejado, em gavetas ou caixas organizadoras.

Instrução de Uso:

- 1-Antes de vestir as meias, certifique-se de que suas pernas estejam secas e limpas.
- 2-Ao colocar, inicie pela ponta do pé: dobre a meia ao contrário até o calcanhar.
- 3- Posicione-a no pé e puxe suavemente para cima, desenrolando à medida que avança. É importante evitar torções ou dobras.
- 4-Durante o dia, use as meias, principalmente em situações em que você fica muito tempo em pé ou sentado.
- 5-Ao final do dia ou ao descansar, retire-as com cuidado, tomando cuidado para não as danificar. Lavagem à máquina.

Advertências e Precauções:

- Consulte um médico antes de usar, especialmente se tiver condições de saúde.
- Não use em caso de infecções, trombose não tratada ou problemas circulatórios graves sem orientação.
- Remova as meias se sentir dor ou formigamento.
- Escolha o tamanho certo para evitar desconforto ou falta de eficácia.
- Siga as orientações sobre duração e frequência do uso.
- Verifique regularmente a pele para irritações ou inchaço.
- Mantenha as meias limpas e siga as instruções de lavagem.
- Comece com períodos curtos e aumente gradualmente.
- O produto pode ser lavado em máquina de lavar.

Contra Indicação:

Não utilizar o produto quando houver Problemas de insuficiência arterial, presença de gangrena, infecções na pele, dermatites úmidas, enxertos de pele em processo de cicatrização e úlceras varicosas abertas.

Nº Registro Anvisa: 82176160017

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291.

Fabricado por:

WISSEN CONSULTORIA LTDA CNPJ: 51.616.394/0001-48

RUA PEREIRA BUENO, n.º 864 – CENTRO PIRASSUNUNGA/SP 13.630-030

Tel: (19) 3561-2405

SAC: sac@mvw.com.br

<https://mvwonline.com.br/>