

VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PROTECH MEDICAL

Para uso profissional

FABRICANTE:

Protech Leaded Eyewear, Inc DBA Protech Medical

7960 Central Industrial Drive, Suite 125,
West Palm Beach – Florida – USA
INDÚSTRIA ESTADUNIDENSE

IMPORTADO E

DISTRIBUÍDO POR:

IMVW LTDA

CNPJ: 46.041.696/0001-03

Av. Antonio Joaquim Mendes 1726 -
Jardim Carlos Gomes

Pirassununga - SP - Brasil

CEP: 13633-037

Fale Conosco: sac@mvwtrading.com.br

Responsável Técnico: Mauro Rodrigo
Vieira

CRQ - 04366291 - SP

REGISTRO ANVISA:

82696710001

FINALIDADE DE USO

Os protetores Radiológicos são usados para a proteção do paciente e dos operadores quando em contato com os aparelhos de Raios-X.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar os protetores quando não seja necessário;
Ao terminar o procedimento guardar o avental pendurado em suporte apropriado;
Tomar cuidado para que o produto não sofra quedas;
Não utilizar solventes orgânicos para limpeza;
Manter distante de fontes de calor;
Nunca dobrar o avental;
Não use solventes de limpeza à base de petróleo. Não lave ou seque na máquina. Não use água quente ou morna. Não passe a ferro nem autoclave.

PRECAUÇÕES

Não utilizar os protetores quando não seja necessário;
Ao terminar o procedimento guardar o avental pendurado em suporte apropriado;
Tomar cuidado para que o produto não sofra quedas;
Não utilizar solventes orgânicos para limpeza;
Manter distante de fontes de calor;
Nunca dobrar o avental

ESTERILIZAÇÃO

Produto não estéril.

VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PROTECH MEDICAL

Para uso profissional

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto ao abrigo de luz, calor e umidade.

TRANSPORTE

Transportar o produto ao abrigo de luz, calor e umidade.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por: nylon, poliéster com proteção de cério, antimônio e Plastificante ASTM. Todos os modelos comerciais apresentados não possui chumbo em sua composição.

VALIDADE

Indeterminado.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagens contendo uma unidade do produto.

MODELO COMERCIAL

AVENTAL PROLITE

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PROTECH MEDICAL

Para uso profissional

MODELO COMERCIAL

AVENTAL PREMIER

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

AVENTAL NANO

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

CAPOTE PROLITE

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

CAPOTE PREMIER

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

CAPOTE NANO

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

CONJUNTO SAIOTE COLETE PROLITE

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

CONJUNTO SAIOTE COLETE PREMIER

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PROTECH MEDICAL

Para uso profissional

MODELO COMERCIAL

CONJUNTO SAIOTE COLETE NANO

Apresentação: PP, P, M, G, GG

Cores: preto, azul, cinza, vinho e lilás

MODO DE USO

1. Ao usar o protetor radiográfico, certifique-se que o mesmo se ajusta ao corpo;
2. Utilize o modelo de protetor radiográfico de acordo com a área a ser examinada;
3. Para maior durabilidade do produto, é orientado deixar pendurado após o uso.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.