



CURATIVO FILME TRANSPARENTE REFORÇADO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Adesivo sensível a pressão, filme de PU, papel suporte, papel de liberação, fita adesiva e não tecido.

FINALIDADE DE USO

O curativo de filme transparente reforçado é usado para fixar a área perfurada pelas agulhas de injeção e fornecer proteção.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

ZD:

RT0001 - 7,0 x 8,5cm

RT0002 - 8,5 x 10,5cm

RT0003 - 5,0 x 5,7cm

RT0004 - 10,0 x 15,5cm

RT0005 - 8,5 x 11,5cm

RT0006 - 9,0 x 10,5cm



RT0007 - 6,0 x 7,0cm

RT0008 - 10,0 x 12,0cm

RT0009 - 11,0 x 15,0cm

RT0010 - 6,5 x 7,0cm

RT0011 - 8,5 x 11,5cm

RT0012 - 10,0 x 15,0cm

RT0013 - 8,5 x 11,5cm

RT0014 - 10,0 x 12,0cm

RT0015 - 7,0 x 9,0cm

RT0016 - 6,5 x 7,0cm

RT0017 - 7,0 x 8,5cm

BGEcare:

RT0001 - 7,0 x 8,5cm

RT0002 - 8,5 x 10,5cm

RT0003 - 5,0 x 5,7cm

RT0004 - 10,0 x 15,5cm

RT0005 - 8,5 x 11,5cm

RT0006 - 9,0 x 10,5cm

RT0007 - 6,0 x 7,0cm

RT0008 - 10,0 x 12,0cm

RT0009 - 11,0 x 15,0cm

RT0010 - 6,5 x 7,0cm

RT0011 - 8,5 x 11,5cm

RT0012 - 10,0 x 15,0cm

RT0013 - 8,5 x 11,5cm

RT0014 - 10,0 x 12,0cm

RT0015 - 7,0 x 9,0cm

RT0016 - 6,5 x 7,0cm

RT0017 - 7,0 x 8,5cm



GBTEX:

GBRT0001 - 7,0 x 8,5cm

GBRT0002 - 8,5 x 10,5cm

GBRT0003 - 5,0 x 5,7cm

GBRT0004 - 10,0 x 15,5cm

GBRT0005 - 8,5 x 11,5cm

GBRT0006 - 9,0 x 10,5cm

GBRT0007 - 6,0 x 7,0cm

GBRT0008 - 10,0 x 12,0cm

GBRT0009 - 11,0 x 15,0cm

GBRT0010 - 6,5 x 7,0cm

GBRT0011 - 8,5 x 11,5cm

GBRT0012 - 10,0 x 15,0cm

GBRT0013 - 8,5 x 11,5cm

GBRT0014 - 10,0 x 12,0cm

GBRT0015 - 7,0 x 9,0cm

GBRT0016 - 6,5 x 7,0cm

GBRT0017 - 7,0 x 8,5cm

MODO DE USO

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**
- 2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.**
- 3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.**
- 4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.**



5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportado em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilização por Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Se houver infecção na área de aplicação, remova o curativo e procure cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem irritações como eritema ou coceira, remova o curativo e busque orientação médica.

Substitua o curativo se houver grande quantidade de exsudato.

A reutilização pode causar contaminação cruzada.



Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº: 82696710019