



CURATIVO FILME TRANSPARENTE STANDARD (A, B, C, D)

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Adesivo sensível a pressão, filme de PU, papel suporte, papel de descolamento, fita, não tecido e filme suporte.

FINALIDADE DE USO

O curativo de filme transparente Standard é usado para fixar a área perfurada pelas agulhas de injeção e fornecer proteção.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

ZD:

Standard (A)

TD0020 - 4 x 5cm

TD0021 - 6 x 7cm

TD0022 - 6 x 9cm



TD0023 - 6 x 10cm

TD0024 - 10 x 12cm

TD0025 - 10 x 14cm

TD0026 - 10 x 20cm

TD0027 - 15 x 20cm

TD0028 - 10 x 25cm

TD0029 - 6 x 7cm

TD0030 - 10 x 12cm

TD0031 - 12 x 12cm

TD0032 - 15 x 20cm

TD0033 - 20 x 20cm

TD0034 - 20 x 30cm

TD0042 - 15 x 20 cm

TD0035 - 9 x 10cm

TD0036 - 9 x 15cm

TD0037 - 9 x 20cm

TD0038 - 9 x 30cm

TD0039 - 9 x 35cm

Standard (B)

TD0002 - 6 x 7cm

TD0003 - 6 x 9cm

TD0004 - 6 x 10cm

TD0005 - 10 x 12cm

TD0006 - 10 x 14cm

TD0007 - 10 x 20cm

TD0008 - 15 x 20cm

TD0009 - 10 x 25cm

TD0010 - 6 x 7cm

TD0011 - 10 x 12cm



TD0012 - 12 x 12cm

TD0013 - 15 x 20cm

TD0014 - 10 x 11,5cm

TD0015 - 4 x 5cm

TD0016 - 6 x 7cm

TD0017 - 7 x 9cm

TD0018 - 6 x 7cm

TD0019 - 6 x 7cm

PD0001 - 7,2 x 5cm

PD0002 - 6 x 7cm

PD0003 - 10 x 6cm

PD0004 - 9 x 6cm

PD0005 - 8 x 12cm

PD0006 - 10 x 12cm

PD0007 - 10 x 15cm

PD0008 - 9,5 x 8,5cm

PD0009 - 15,5 x 8,5cm

PD0010 - 10 x 20cm

PD0011 - 10 x 25cm

PD0012 - 10 x 30cm

PD0013 - 10 x 35cm

PD0014 - 12 x 8,25cm

PD0015 - 18 x 8,25cm

PD0016 - 25 x 8,25cm

PD0017 - 20 x 30cm

PD0018 - 6 x 8cm

PD0019 - 5,3 x 7cm

PD0020 - 5,3 x 8cm

PD0021 - 7,3 x 8cm

PD0022 - 10 x 7cm



PD0023 - 10 x 9cm

PD0024 - 10 x 12cm

PD0025 - 12 x 9cm

PD0026 - 15 x 9cm

PD0027 - 20 x 9cm

PD0028 - 25 x 9cm

PD0029 - 30 x 9cm

TD0043 - 6 x 7cm

TD0045 - 10 x 12cm

Standard (C)

TD0040 - 6 x 7cm

TD0041 - 10 x 12cm

Standard (D)

TD0044 - 7 x 9cm

TD0046 - 9 x 12cm

BGEcare:

Standard (A)

TD0020 - 4 x 5cm

TD0021 - 6 x 7cm

TD0022 - 6 x 9cm

TD0023 - 6 x 10cm

TD0024 - 10 x 12cm

TD0025 - 10 x 14cm

TD0026 - 10 x 20cm

TD0027 - 15 x 20cm

TD0028 - 10 x 25cm

TD0029 - 6 x 7cm



TD0030 - 10 x 12cm

TD0031 - 12 x 12cm

TD0032 - 15 x 20cm

TD0033 - 20 x 20cm

TD0034 - 20 x 30cm

TD0042 - 15 x 20 cm

TD0035 - 9 x 10cm

TD0036 - 9 x 15cm

TD0037 - 9 x 20cm

TD0038 - 9 x 30cm

TD0039 - 9 x 35cm

Standard (B)

TD0002 - 6 x 7cm

TD0003 - 6 x 9cm

TD0004 - 6 x 10cm

TD0005 - 10 x 12cm

TD0006 - 10 x 14cm

TD0007 - 10 x 20cm

TD0008 - 15 x 20cm

TD0009 - 10 x 25cm

TD0010 - 6 x 7cm

TD0011 - 10 x 12cm

TD0012 - 12 x 12cm

TD0013 - 15 x 20cm

TD0014 - 10 x 11,5cm

TD0015 - 4 x 5cm

TD0016 - 6 x 7cm

TD0017 - 7 x 9cm

TD0018 - 6 x 7cm



TD0019 - 6 x 7cm

PD0001 - 7,2 x 5cm

PD0002 - 6 x 7cm

PD0003 - 10 x 6cm

PD0004 - 9 x 6cm

PD0005 - 8 x 12cm

PD0006 - 10 x 12cm

PD0007 - 10 x 15cm

PD0008 - 9,5 x 8,5cm

PD0009 - 15,5 x 8,5cm

PD0010 - 10 x 20cm

PD0011 - 10 x 25cm

PD0012 - 10 x 30cm

PD0013 - 10 x 35cm

PD0014 - 12 x 8,25cm

PD0015 - 18 x 8,25cm

PD0016 - 25 x 8,25cm

PD0017 - 20 x 30cm

PD0018 - 6 x 8cm

PD0019 - 5,3 x 7cm

PD0020 - 5,3 x 8cm

PD0021 - 7,3 x 8cm

PD0022 - 10 x 7cm

PD0023 - 10 x 9cm

PD0024 - 10 x 12cm

PD0025 - 12 x 9cm

PD0026 - 15 x 9cm

PD0027 - 20 x 9cm

PD0028 - 25 x 9cm

PD0029 - 30 x 9cm



TD0043 - 6 x 7cm

TD0045 - 10 x 12cm

Standard (C)

TD0040 - 6 x 7cm

TD0041 - 10 x 12cm

Standard (D)

TD0044 - 7 x 9cm

TD0046 - 9 x 12cm

GBTEX:

Standard (A)

GBTD0020 4 x 5cm

GBTD0021 6 x 7cm

GBTD0022 6 x 9cm

GBTD0023 6 x 10cm

GBTD0024 10 x 12cm

GBTD0025 10 x 14cm

GBTD0026 10 x 20cm

GBTD0027 15 x 20cm

GBTD0028 10 x 25cm

GBTD0029 6 x 7cm

GBTD0030 10 x 12cm

GBTD0031 12 x 12cm

GBTD0032 15 x 20cm

GBTD0033 20 x 20cm

GBTD0034 20 x 30cm

GBTD0042 15 x 20 cm

GBTD0035 9 x 10cm



GBTD0036 9 x 15cm

GBTD0037 9 x 20cm

GBTD0038 9 x 30cm

GBTD0039 9 x 35cm

Standard (B)

GBTD0002 6 x 7cm

GBTD0003 6 x 9cm

GBTD0004 6 x 10cm

GBTD0005 10 x 12cm

GBTD0006 10 x 14cm

GBTD0007 10 x 20cm

GBTD0008 15 x 20cm

GBTD0009 10 x 25cm

GBTD0010 6 x 7cm

GBTD0011 10 x 12cm

GBTD0012 12 x 12cm

GBTD0013 15 x 20cm

GBTD0014 10 x 11,5cm

GBTD0015 4 x 5cm

GBTD0016 6 x 7cm

GBTD0017 7 x 9cm

GBTD0018 6 x 7cm

GBTD0019 6 x 7cm

GBPD0001 7,2 x 5cm

GBPD0002 6 x 7cm

GBPD0003 10 x 6cm

GBPD0004 9 x 6cm

GBPD0005 8 x 12cm

GBPD0006 10 x 12cm



GBPD0007 10 x 15cm
GBPD0008 9.5 x 8.5cm
GBPD0009 15,5 x 8,5cm
GBPD0010 10 x 20cm
GBPD0011 10 x 25cm
GBPD0012 10 x 30cm
GBPD0013 10 x 35cm
GBPD0014 12 x 8,25cm
GBPD0015 18 x 8,25cm
GBPD0016 25 x 8,25cm
GBPD0017 20 x 30cm
GBPD0018 6 x 8cm
GBPD0019 5,3 x 7cm
GBPD0020 5,3 x 8cm
GBPD0021 7,3 x 8cm
GBPD0022 10 x 7cm
GBPD0023 10 x 9cm
GBPD0024 10 x 12cm
GBPD0025 12 x 9cm
GBPD0026 15 x 9cm
GBPD0027 20 x 9cm
GBPD0028 25 x 9cm
GBPD0029 30 x 9cm
GBTD0043 6 x 7cm
GBTD0045 10 x 12cm

Standard (C)

GBTD0040 6 x 7cm
GBTD0041 10 x 12cm



Standard (D)

GBTD0044 7 x 9cm

GBTD0046 9 x 12cm

MODO DE USO

1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.
2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.
3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.
4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.
5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilização por Óxido de Etileno.



VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº 82696710014