



CURATIVO FILME TRANSPARENTE TIPO II

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Papel CCK, adesivo, filme de PU, almofada absorvente, filme – PET, fita de escrita (com cola) e papel de liberação.

FINALIDADE DE USO

Curativos de filme transparente são utilizados para aplicar sobre a pele em incisões cirúrgicas e cateteres arteriovenosos permanentes.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

ZD:

TDIV0709 - 7 x 9cm

TDIV0557 - 5 x 5,7cm

TDIV0607 - 6 x 7cm

TDIV1012 - 10 x 12cm

TDIV10155 - 10 x 15,5cm



TDIV4444 - 4,4 x 4,4cm

TDF1012 - 10 x 12cm

TDF1520 - 15 x 20cm

TDF0607 - 6 x 7cm

TDF0910 - 9 x 10cm

TDF1015 - 10 x 15cm

TDF0810 - 8 x 10cm

TDF0920 - 9 x 20cm

TDF0930 - 9 x 30cm

TDF1020 - 10 x 20cm

TDF1025 - 10 x 25cm

BGEcare:

TDIV0709 - 7 x 9cm

TDIV0557 - 5 x 5,7cm

TDIV0607 - 6 x 7cm

TDIV1012 - 10 x 12cm

TDIV10155 - 10 x 15,5cm

TDIV4444 - 4,4 x 4,4cm

TDF1012 - 10 x 12cm

TDF1520 - 15 x 20cm

TDF0607 - 6 x 7cm

TDF0910 - 9 x 10cm

TDF1015 - 10 x 15cm

TDF0810 - 8 x 10cm

TDF0920 - 9 x 20cm

TDF0930 - 9 x 30cm

TDF1020 - 10 x 20cm

TDF1025 - 10 x 25cm



GBTEX:

GBTDIV0709 - 7 x 9cm

GBTDIV0557 - 5 x 5,7cm

GBTDIV0607 - 6 x 7cm

GBTDIV1012 - 10 x 12cm

GBTDIV10155 - 10 x 15,5cm

GBTDIV4444 - 4,4 x 4,4cm

GBTDF1012 - 10 x 12cm

GBTDF1520 - 15 x 20cm

GBTDF0607 - 6 x 7cm

GBTDF0910 - 9 x 10cm

GBTDF1015 - 10 x 15cm

GBTDF0810 - 8 x 10cm

GBTDF0920 - 9 x 20cm

GBTDF0930 - 9 x 30cm

GBTDF1020 - 10 x 20cm

GBTDF1025 - 10 x 25cm

MODO DE USO

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**
 - 2. Retirar o papel da embalagem e retirar o produto.**
 - 3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.**
 - 4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.**
 - 5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°**
-



ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilização por Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.



Fabricante: Zhende Medical Co.,LTD. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº 82696710016