



APARELHOS ORTOPÉDICOS

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Espuma de PU (Poliuretano), Plástico e Nylon.

FINALIDADE DE USO

O produto é destinado à imobilização, estabilização, suporte ou compressão de segmentos do corpo humano, como coluna, ombro, braço, punho, mão, dedos, quadril, joelho, tornozelo e pé. É indicado para a prevenção, tratamento ou reabilitação de lesões musculoesqueléticas, fraturas, entorses, luxações, lesões ligamentares, pós-operatório, artroses e outras doenças ortopédicas e/ou neurológicas, promovendo a limitação controlada de movimento de acordo com a prescrição médica e auxiliando no processo de recuperação. A utilização ocorre de forma localizada, de acordo com o modelo e região a ser tratada, como cervical, lombar, ombro, joelho, tornozelo, entre outros. O tempo de permanência do produto no corpo humano é temporário, limitado à necessidade clínica e sempre conforme orientação profissional, podendo ser utilizado durante o dia e/ou à noite, conforme indicação específica do tratamento. Os produtos são compostos por materiais como espuma, velcro, tecido sintético, nylon, plástico, alumínio, poliéster, polietileno e PVC, entre outros, dependendo do modelo, e incluem componentes como fechos ajustáveis, suportes rígidos ou semi-rígidos, tiras de fixação e barras



metálicas, conforme a função da órtese. Trata-se de produto não invasivo, de uso externo, que não penetra no corpo humano nem interfere em estruturas anatômicas internas.

MODELOS COMERCIAIS

ÓRTESE PARA CLAVÍCULA:

CB001, CB002, CB003

Tamanho: S/M, L/XL

Quantidade: 1 unidade por embalagem.

TIPOIA PARA OMBRO E BRAÇO:

SL001, SL002, SL003, SL004, SL005, SL006, SL007, SL008, SL009, SL010, SL011, SL012, SL013, SL014, KB005

Tamanho: XS, S, M, L, XL, pediátrico

Quantidade: 1 unidade por embalagem

ÓRTESE LOMBOSSACRA:

BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS010, BS011, BS012, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019, BS020, BS021, BS022, BS023, BS024, BS025, BS026, BS027, BS028, BS029, BS030

Tamanho: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Quantidade: 1 unidade por embalagem

COLAR CERVICAL:

CS001, CS002, CS003, CS004, CS005, CS006, KB006

Tamanho: S, M, L

Quantidade: 1 unidade por embalagem



TALA PARA MÃO:

FS001, FS002, FS003, FS004, FS005, FS006, FS007, FS008, FS009, FS010

Tamanho: S, M, L, 1# a 8#

Quantidade: 1 unidade por embalagem

ÓRTESE EXTERNA PARA TORNOZELO:

AS001, AS002, AS003, AS004, AS005, AS006, AS007, AS008, AS009, AS010, AS011, AS012, AS013, AS015, AS016, AS017, AS018, AS019, AS020

Tamanho: S, M, L, XL, 2XL, Universal

Quantidade: 1 unidade por embalagem

CINTA ABDOMINAL:

BS013, BS014

Tamanho: S, M, L, XL, 2XL

Quantidade: 1 unidade por embalagem

ÓRTESE PARA MEMBRO:

ES001, ES002, ES003, ES004, ES005, ES006, ES007, ES008, ES009, ES010, ES011, ES012, HA001, HA002, HA003, HA004, KN001, KN002, KN003, KN004, KN005, KN006, KN007, KN008, KN009, KN010, KN011, KN012, KN013, KN014, KN015, KN016, KN017, KN018, KN019, KN020, KN021, KN022, KN023, KN024, KN025, KN026, KN027, KN028, KN029, KN030, KN031, KN032, KN033, KB007, NS001, NS002, NS003, NS004, NS005, NS006, NS007, NS008, NS009, NS010, NS011, NS012, NS013, NS014, NS015, NS016, NS017, SH001, SH002, SH003, SH004, SH005, TS001, WK001, WK002, WK003, WK004, WK005, WK006, WK007, WK008, WK009, WK010, WK011, WK012, WK013, WK014, WK015, WK016, WK017, WK018, WK019, WK020, WK021, WK022, WK023, WK024, WK025, WK026, WK027, WK028, KB001, KB002, KB003

Tamanho: diversos

Quantidade: 1 unidade por embalagem



ANDADOR FIXO:

WK001, WK001-B, WK001-C, WK002, WK002-B, WK002-C, WK003, WK004, WK005, WK006, WK007, WK008, WK008-B, WK009, WK009-B, WK009-C, WK010, WK010-B, WK010-C, WK011, WK012, WK013, WK014, WK015, WK016, WK017, WK018, WK019, WK020, WK021, WK022, WK023, WK024, WK025, WK026, KB001, KB008, KB009

Tamanho: S, M, L, XL, S/M, L/XL, Pediátrico

Quantidade: 1 unidade por embalagem

MODO DE USO

Utilizar o produto conforme a orientação de um profissional de saúde habilitado. Para a aplicação, o segmento corporal afetado deve estar limpo e seco. Ajustar a órtese de modo que proporcione suporte ou imobilização adequada, sem causar desconforto excessivo ou prejudicar a circulação sanguínea. Os fechos, tiras ou sistemas de ajuste fixar firmemente, garantindo a estabilidade do dispositivo, mas permitindo fácil remoção quando necessário. A periodicidade de uso, assim como o tempo de permanência, deve seguir a prescrição médica de acordo com a necessidade clínica de cada paciente. Caso o produto permita, pode ser compatível com outros dispositivos médicos, como talas, imobilizadores ou calçados ortopédicos, desde que recomendado pelo profissional responsável. É importante seguir as orientações de higiene, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante. Em caso de desconforto, irritação cutânea, dor ou quaisquer efeitos adversos, o uso deve ser interrompido e o profissional de saúde consultado.

ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco, bem ventilado, limpo e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

TRANSPORTE



Evitar umidade, choques mecânicos e exposição prolongada ao calor durante o transporte.

MECANISMO DE AÇÃO

O princípio de funcionamento das órteses ortopédicas baseia-se na aplicação de suporte externo, compressão e/ou restrição de movimento nas regiões anatômicas onde são utilizadas. Por meio de estruturas rígidas, semi-rígidas ou flexíveis, associadas a sistemas de ajuste como velcro, cintas ou fechos, os dispositivos promovem a estabilização, alinhamento e imobilização parcial ou total da área afetada, reduzindo o estresse sobre articulações, ossos, músculos e ligamentos. Esses mecanismos auxiliam na diminuição da dor, prevenção de movimentos indesejados, proteção contra novas lesões e favorecem a adequada recuperação funcional do segmento acometido, sem interferir diretamente nas estruturas internas do corpo.

ESTERILIZAÇÃO

Não aplicável.

VALIDADE

3 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar somente sob orientação de um profissional de saúde habilitado.

Não utilizar o produto em caso de sinais de danos, rasgos ou desgaste excessivo.

Não utilizar fora do prazo de validade.

Utilizar o produto apenas para as finalidades indicadas na instrução de uso.

O uso incorreto pode comprometer a eficácia terapêutica e a segurança do paciente.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

Verificar se o produto está em condições adequadas antes de cada uso.



**Ajustar corretamente para evitar desconforto ou restrição da circulação sanguínea.
Em caso de irritação cutânea, dor ou desconforto, descontinuar o uso e consultar
um profissional de saúde.**

Manter fora do alcance de crianças quando não estiver em uso.

Fabricante: Xiamen Huakang Orthpedic Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: 2F, Building #13, No. 2881 Dongfu Avenue, Haicang District, Xiamen City,
361027 – China.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº 82696710015