



ROLLATOR

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Alumínio

FINALIDADE DE USO

O Rollator é destinado para pessoas que apresentam fraqueza generalizada, dificuldade de equilíbrio, lesão nos membros inferiores ou passaram por cirurgia e precisam de suporte adicional para manter o equilíbrio e a estabilidade ao caminhar ao ar livre, ou para uso em reabilitação.

MODELOS COMERCIAIS

AL-4600E:

- Dimensões: 680x460x530 mm
- Cor: Preto
- Peso: 10 kg
- Freios: Manual
- Composição do material: Alumínio

AL-4600F:

- Dimensões: 680x460x530 mm



- Cor: Dourado
- Peso: 10 kg
- Freios: Manual
- Composição do material: Alumínio

MECANISMO DE AÇÃO

O Rollator é um dispositivo de auxílio à mobilidade projetado para proporcionar suporte e estabilidade a indivíduos com dificuldades de equilíbrio ou locomoção. Seu funcionamento baseia-se em um sistema de estrutura com rodas, freios e ajustes ergonômicos que permitem ao usuário deslocar-se de forma segura e confortável.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local limpo, ventilado e seco.

TRANSPORTE

Proteja contra chuva e umidade, e manuseie com cuidado durante o transporte.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Não aplicável.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Use um pano macio e seco para limpar o rollator.

Mantenha o Rollator sempre limpo e em bom estado.



CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Instalação da Manopla:

- Antes de usar o rollator, desparafuse o botão de fixação da manopla, insira a manopla no tubo interno do suporte (lado esquerdo e direito) e ajuste à altura apropriada para o usuário. Em seguida, use o botão de ajuste para travá-lo. O quadro deve estar completamente aberto até que todas as rodas estejam estáveis e prontas para uso.

Frenagem Temporária:

- Levante a alavanca do freio com força para ativá-lo. Estacionamento Prolongado: Segure a alavanca do freio com a mão e pressione-a firmemente para baixo. Quando ouvir um "clique", o freio de estacionamento estará ativado.

Dobrar o Dispositivo:

- Levante o assento, retire a cesta de compras e levante a barra de aço redonda sob a cesta para dobrar o rollator.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique se a instalação da manopla está frouxa ou se há rebarbas que possam comprometer a segurança do uso.

Verifique se as rodas estão apoiadas corretamente no solo e se os acessórios estão estáveis.

O rollator é um auxiliar para caminhada; não deve ser utilizado como suporte para cargas acima do permitido.

O peso do usuário não deve exceder 136 kg.

O rollator não é adequado para montanhismo.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO



VALIDADE

5 ANOS.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 680

Largura (mm): 460

Altura (mm): 530

Fabricante: Jiangsu Assure Medical Equipment Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: No.799, Chuqiao Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- N° 82696710017