

Instrução de Uso – Cadeira de exame

Este documento apresenta as instruções de uso para os seguintes equipamentos clínicos e hospitalares: cadeiras de exame, macas hidráulicas, macas de massagem e carro de transferência. Todos os modelos listados são destinados ao uso profissional em ambientes de saúde. Recomenda-se que a instalação e operação dos equipamentos sejam realizadas por profissionais treinados. Leia atentamente este documento antes de utilizar os equipamentos.

Modelos Contemplados

DP-8243

Capacidade de carga: 200 kg (encosto: 30 kg / assento: 200 kg / perna: 20 kg / extremidade das pernas: 5 kg)

Altura ajustável: 61 a 79 cm via pedal hidráulico

Funções principais:

- - Encosto ajustável (0°-76°)
- - Seção das pernas ajustável (0°-90°)
- - Inclinação do assento (0°-15°)
- - Extensão das pernas (0 a 12 cm)

Diferencial: Projetada para tratamentos de fisioterapia com três seções ajustáveis e apoio de braços PU

DP-8322

Capacidade de carga: 150 kg (encosto: 30 kg / assento: 150 kg / pernas: 30 kg)

Altura ajustável: 61 a 79 cm via pedal

Funções principais:

- - Encosto ajustável (0°-76°)
- - Seção das pernas ajustável (0°-80°)

Diferencial: Design de três seções para procedimentos estéticos e fisioterápicos

DP-8330

Capacidade de carga: 150 kg (encosto: 40 kg / assento: 150 kg)

Altura ajustável: 48 a 85 cm via pedal hidráulico

Funções principais:

- - Encosto ajustável (0°-70°)
- - Sistema de rodízios com trava
- - Pé nivelador

Diferencial: Estrutura compacta com duas seções, ideal para massoterapia

DP-8222

Capacidade de carga: 200 kg (encosto: 30 kg / assento: 200 kg / pernas: 30 kg)

Altura ajustável: 61 a 79 cm

Funções principais:

- - Encosto ajustável (0°-78°)
- - Seção das pernas ajustável (0°-80°)

Diferencial: Inclusão de apoio de cabeça e maior capacidade de peso

DP-ZY102

Capacidade de carga: 150 kg (encosto: 40 kg / assento: 150 kg)

Altura ajustável: Ajustável via bomba hidráulica

Funções principais:

- - Encosto ajustável (0°-60°)
- - Rodízios com trava e pedal
- - Guarda-corpo retrátil
- - Suporte para soro e cilindro de oxigênio

Diferencial: Destinada à transferência intra-hospitalar de pacientes

DP-YF010

Capacidade de carga: 150 kg (encosto: 40 kg / assento: 150 kg)

Altura ajustável: 58 a 91 cm

Funções principais:

- - Encosto, assento e pernas ajustáveis
- - Bandeja de inox retrátil (0-7 cm)
- - Apoios de perna com trilho em aço inox

Diferencial: Projetada para exames ginecológicos com ajustes ergonômicos e acessórios clínicos

Instalação e Montagem

- Retire o equipamento da embalagem com auxílio de duas pessoas, segurando pelas extremidades.
- Remova todos os materiais de proteção e verifique a integridade do produto.
- Posicione o equipamento em local plano, seco, bem ventilado e longe de fontes de calor ou umidade.
- Conecte à fonte de energia compatível, quando aplicável.
- Fixe acessórios como apoios de braços ou pernas conforme descritos no manual específico do modelo.

Modo de Uso

- Ajuste a altura por meio do pedal hidráulico (ou controle manual, conforme o modelo).

- Regule o encosto e a seção das pernas com alavancas ou manípulos.
- Certifique-se de que os travamentos estejam firmes antes de posicionar o paciente.
- Para modelos de transporte (ZY102), acione os freios antes de realizar movimentações com o paciente.
- Em modelos com controle de inclinação, ajuste a posição do paciente conforme a necessidade do exame ou procedimento.

Cuidados e Limpeza

- Sempre desligue o equipamento antes da limpeza.
- Utilize pano macio e detergente neutro para superfícies plásticas e metálicas.
- Para superfícies em inox, use produtos específicos, evitando soluções cloradas.
- Não utilize jatos de água, produtos abrasivos ou corrosivos.
- Realize desinfecção periódica conforme protocolo da instituição de saúde.

Manutenção Preventiva

- Verifique semanalmente os sistemas de ajuste e fiação elétrica (se houver).
- Faça inspeções semestrais dos pontos de articulação, travas, rodízios e conexões.
- Substitua peças danificadas somente com componentes originais.
- Registre todas as manutenções realizadas e contate o suporte técnico autorizado em caso de anormalidades.

Advertências Gerais

- Não exceder os limites de carga especificados.
- Não permitir o uso por crianças ou pessoas não autorizadas.
- Não modificar a estrutura do equipamento.
- Sempre mantenha o equipamento travado quando não estiver em uso.
- Validade do produto indeterminada.
- Em caso de ruídos ou mau funcionamento, interrompa o uso imediatamente.

Armazenamento e transporte

- Transportar e armazenar o produto ao abrigo de luz, calor e umidade.

Conteúdo

- O produto é comercializado em embalagens contendo uma unidade do produto.

Fabricante: Dongpin Beaty & Medical Co.,LTD

Endereço: Workshop B on 6F & Workshop A on 7F, No.103, Kangtai South Road,
Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guandong Province, China.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av. Antônio Joaquim Mendes 1726 -Jardim Carlos Gomes Pirassununga - SP –
Brasil, CEP: 13633-037
- Fale Conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira, CRQ - 04366291 – SP

Registro ANVISA:

Processo Nº 25351.056438/2025-50; **Registro Nº** 82696710002