



ANDADOR

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Produto composto por uma liga metálica.

FINALIDADE DE USO

É usado para auxílio na caminhada ou na permanência em pé e para reabilitação de pacientes com distúrbios de mobilidade.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: DY04893L

Comprimento (cm): 54.5

Largura (cm): 61.5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L-2.5

Comprimento (cm): 54,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04912L-4

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(4)-3

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 49

Altura (cm): 86-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(S)-5

Comprimento (cm): 45

Largura (cm): 50

Altura (cm): 63-76

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04912LB-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(3)-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(8)-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(5)

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(6)-5



Comprimento (cm): 53,5

Largura (cm): 59,5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(7)-5

Comprimento (cm): 53,5

Largura (cm): 59,5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04912L(9)-5

Comprimento (cm): 53,5

Largura (cm): 59,5

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04913L

Comprimento (cm): 49

Largura (cm): 57

Altura (cm): 76-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04913L(S)

Comprimento (cm): 44



Largura (cm): 50

Altura (cm): 63-75,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04913L(5)

Comprimento (cm): 53,5

Largura (cm): 59,5

Altura (cm): 74-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04914

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 62,5

Altura (cm): 83,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04914LB

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 62,5

Altura (cm): 83,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04914L

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 62,5



Altura (cm): 83,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY049142

Comprimento (cm): 62

Largura (cm): 62,5

Altura (cm): 80-93

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049143

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 62,5

Altura (cm): 84-100

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144L

Comprimento (cm): 62

Largura (cm): 61

Altura (cm): 80-93

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144L(2)

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 61

Altura (cm): 80-93



Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144L(4)

Comprimento (cm): 66,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 82-92

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144L(5)

Comprimento (cm): 62

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 84,5-94,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144L(6)

Comprimento (cm): 62,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 84-95

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049144(4)

Comprimento (cm): 66,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 82-92

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY049145L

Comprimento (cm): 62,5

Largura (cm): 60,5

Altura (cm): 84-95

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L

Comprimento (cm): 60,5

Largura (cm): 61,5

Altura (cm): 84-95

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L(2)

Comprimento (cm): 63,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 79-87

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L(3)

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 61,5

Altura (cm): 80-88

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY049146L(4)

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-88

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L(7)

Comprimento (cm): 64,5

Largura (cm): 65

Altura (cm): 96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L(8)

Comprimento (cm): 64,5

Largura (cm): 65

Altura (cm): 80-93

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146L(9)

Comprimento (cm): 62

Largura (cm): 65

Altura (cm): 94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146(4)



Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-88

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146(5)

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 81-88

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049146(6)

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 56

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049147L

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049148

Comprimento (cm): 80



Largura (cm):

Altura (cm): 96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049148L

Comprimento (cm): 81

Largura (cm):

Altura (cm): 96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049149L

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 64

Altura (cm): 96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04915L

Comprimento (cm): 49,5

Largura (cm): 54,5

Altura (cm): 85-94

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04915L-5

Comprimento (cm): 49,5

Largura (cm): 54,5



Altura (cm): 85-94

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY049150L

Comprimento (cm): 81

Largura (cm):

Altura (cm): 84,5-96,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049156

Comprimento (cm): 91

Largura (cm):

Altura (cm): 84,5-106

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049155

Comprimento (cm): 85

Largura (cm):

Altura (cm): 80-96

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049151L

Comprimento (cm): 90

Largura (cm): 61

Altura (cm): 90,5-102,5



Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049152L

Comprimento (cm): 61

Largura (cm): 55-65

Altura (cm): 52-62

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049157L

Comprimento (cm): 65

Largura (cm): 65

Altura (cm): 52-62

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04202L

Comprimento (cm): 66

Largura (cm): 65

Altura (cm): 81-88

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04203L

Comprimento (cm): 65,5

Largura (cm): 63

Altura (cm): 81-91

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04204L

Comprimento (cm): 65,5

Largura (cm): 65

Altura (cm): 81-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04104L

Comprimento (cm): 90

Largura (cm): 61

Altura (cm): 90,5-102,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04916L

Comprimento (cm): 50

Largura (cm): 58

Altura (cm): 76

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04917L

Comprimento (cm): 50

Largura (cm): 58

Altura (cm): 76-86

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04918L

Comprimento (cm): 50

Largura (cm): 58

Altura (cm): 76-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04919L

Comprimento (cm): 49,5

Largura (cm): 55

Altura (cm): 74-92

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04920L-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 62

Altura (cm): 74-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04961L

Comprimento (cm): 49

Largura (cm): 54

Altura (cm): 75-93,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04961L(2)



Comprimento (cm): 48

Largura (cm): 55

Altura (cm): 75-93,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04962L

Comprimento (cm): 48

Largura (cm): 61

Altura (cm): 81-99

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04962L(2)

Comprimento (cm): 48

Largura (cm): 61

Altura (cm): 81-99

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049621L

Comprimento (cm): 48

Largura (cm): 61

Altura (cm): 81-99

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04963L

Comprimento (cm): 57-71



Largura (cm): 56

Altura (cm): 46-62

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04963L(M)

Comprimento (cm): 61-81

Largura (cm): 56

Altura (cm): 46-62

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04964L

Comprimento (cm): 50

Largura (cm): 61,5

Altura (cm): 63-75,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04965L

Comprimento (cm): 49

Largura (cm): 60

Altura (cm): 76-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04965L-5

Comprimento (cm): 49

Largura (cm): 60



Altura (cm): 76-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04966L(S)

Comprimento (cm): 42

Largura (cm): 54

Altura (cm): 52-62

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04966L(S)-2.5

Comprimento (cm): 42

Largura (cm): 54

Altura (cm): 52-62

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04967

Comprimento (cm): 63

Largura (cm): 57,5

Altura (cm): 55-78,8

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04967(2)

Comprimento (cm): 63

Largura (cm): 57,5

Altura (cm): 55-78,8



Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04968L

Comprimento (cm): 48

Largura (cm): 54

Altura (cm): 52-62

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04969L-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04970L-5

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY049702

Comprimento (cm): 56

Largura (cm): 50,7-57,7

Altura (cm): 117,5-143,5

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04971LB

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04973

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04971(2)

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 64

Altura (cm): 80-90

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04972

Comprimento (cm): 63

Largura (cm): 56

Altura (cm): 107-132

Carga máx. (kg): 100



Modelo: DY04974

Comprimento (cm): 99

Largura (cm): 74

Altura (cm): 112-141

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04975L

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 58

Altura (cm): 110-125

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04975L-5

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 58

Altura (cm): 110-125

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04976

Comprimento (cm): 88,5

Largura (cm): 75,5

Altura (cm): 122-144,5

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04977L



Comprimento (cm): 80

Largura (cm): 69

Altura (cm): 100-140

Carga máx. (kg): 30-35

Modelo: DY04978L

Comprimento (cm): 52,5

Largura (cm): 55-65

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04203L (2)

Comprimento (cm): 60,5

Largura (cm): 55-65

Altura (cm): 79-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04979L

Comprimento (cm): 67-75

Largura (cm): 57,5

Altura (cm): 51,5-60,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY04980L

Comprimento (cm): 60,5



Largura (cm): 55-65

Altura (cm): 85-94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY04981L

Comprimento (cm): 62

Largura (cm): 60

Altura (cm): 84

Carga máx. (kg): 80

MECANISMO DE AÇÃO

O princípio de funcionamento da bengala consiste em atuar como um ponto de apoio adicional durante a marcha, proporcionando maior estabilidade, equilíbrio e alívio de carga nos membros inferiores, auxiliando pessoas com dificuldades de locomoção a se movimentarem com mais segurança e autonomia.

ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado em ambiente seco e ventilado.

TRANSPORTE

O transporte deve ser realizado com proteção contra chuva e umidade, e o manuseio deve ser feito com cuidado, evitando impactos e quedas.

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo 1 unidade do produto por embalagem.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO



Abra o andador e ajuste sua altura de acordo com a estatura do usuário. Para ajustar, pressione a esfera de ajuste localizada na perna do andador, segure a base com uma das mãos e puxe para baixo até ouvir o som de “clique”, mantendo a esfera pressionada.

Durante o uso, o andador pode ser empurrado diretamente para frente ou movimentado alternadamente pelos lados, formando o movimento em "N".

Para dobrar o andador quando não estiver em uso, pressione o botão da luva central e dobre-o para dentro.

Para fixação, insira o pino na estrutura maior e na parte em formato de "I" para travar. No modo articulado, insira a trava apenas na parte em "I", ativando o modo articulado.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Limpeza e Desinfecção do Andador:

A limpeza do andador deve ser feita com um pano macio e seco.

Desinfecção de Auxiliares de Marcha:

Ao utilizar desinfetantes, dilua-os conforme a concentração especificada abaixo:

Desinfetante de cloreto de amônio: 0,05% a 0,2%

Desinfetante fenólico clorado: 0,05% a 0,2%

Solução de diclobenzoguanidina etano: 0,05%

Alguns desinfetantes podem causar corrosão nas partes metálicas ou provocar descoloração, deterioração ou rachaduras nas partes plásticas. Portanto, utilize somente os desinfetantes recomendados acima.

Verifique a composição do desinfetante antes de utilizá-lo.



Após a desinfecção, remova completamente o desinfetante com um pano limpo e seco.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilize o andador para subir ou descer degraus ou escadas.

Não aplique pressão com ambas as mãos ou com apenas uma mão em um único lado do andador, pois isso pode causar tombamento.

Antes de usar o andador, verifique se os dispositivos de travamento e ajuste estão devidamente fixados.

O peso do usuário não deve exceder 100 kg.

O andador não é adequado para uso em terrenos irregulares ou superfícies que não sejam firmes.

Durante o uso, recomenda-se limpeza de rotina diária. Em casos de doenças infectocontagiosas, o equipamento deve ser higienizado de forma completa antes de novo uso.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

3 ANOS

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 420 mm a 990 mm

Largura (mm): 490 mm a 755 mm

Altura (mm): 460 mm a 1445 mm



Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, CHINA.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- N° 82696710036