



ANDADOR

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Alumínio.

FINALIDADE DE USO

O andador é um auxílio para locomoção destinado a pacientes com deficiência nos membros inferiores. Sua principal função é ajudar na recuperação de pacientes com fraturas nos membros inferiores.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: YM-C18

dimensão: 40.6x29x75-92cm

peso: 1,69 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C24

dimensão: 52x42x82.5-100cm

peso: 3,12 kg



carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C28

dimensão: 51x43x74.9-92.5cm

peso: 2,85 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C26

dimensão: 52.1x36.8x82.5-100cm

peso: 2,95 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C03

dimensão: L52.5xW45.5xH71-89cm

peso: 3,57 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C02

dimensão: 55.2x50.5x81.5-99.5cm

peso: 365 kg



carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C33

dimensão: L50xW55xH80-94cm

peso: 2,52 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C06

dimensão: 53.3x43.1x83.5-101cm

peso: 3,15 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C30

dimensão: 51.5x42x71.1-81.3cm

peso: 2,32 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C25

dimensão: L50.8xW39.4xH64.8-82.5cm

peso: 2,86 kg



carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C23

dimensão: 54.6x41.9x78.7-96.5cm

peso: 2,77 kg

carga máxima suportada: 114 kg

Modelo: YM-C01

dimensão: 61x52x82.5-100cm

peso: 3,1 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C04

dimensão: 58.5x44x108.5-125.8cm

peso: 4,08 kg

carga máxima suportada: 227 kg

Modelo: YM-C09

dimensão: 62.7x39.8x83.5-110.9cm

peso: 3,86 kg



carga máxima suportada: 227 kg

Modelo: YM-C08

dimensão: 50.8x39.4x64.8-82.5cm

peso: 3,15 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C05

dimensão: 49.5x37x62.2-72.4cm

peso: 1,5 kg

carga máxima suportada: 94 kg

Modelo: YM-C12

dimensão: 59.7x42.4x81.9-99.7cm

peso: 2,81 kg

carga máxima suportada: 159 kg

Modelo: YM-C27

dimensão: 50.8x36.8x64.8-82.5cm

peso: 2,75 kg



carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C29

dimensão: 52.3x43.4x80.8-98.5cm

peso: 2,43 kg

carga máxima suportada: 136 kg

Modelo: YM-C21

dimensão: 59.7x38.1x81.3-99.1cm

peso: 2,69 kg

carga máxima suportada: 182 kg

MECANISMO DE AÇÃO

O andador proporciona suporte mecânico e estabilidade postural ao transferir parte do peso corporal do usuário, por meio dos membros superiores, para o solo, aumentando assim a base de apoio e reduzindo a carga sobre os membros inferiores. As empunhaduras bilaterais oferecem um feedback proprioceptivo adicional, facilitando um ciclo de marcha controlado e simétrico.

ARMAZENAMENTO

Transportar em temperatura entre 10°C~40°C, umidade relativa ≤80% e armazenar em local limpo e bem ventilado.



TRANSPORTE

Transportar na posição horizontal ou vertical.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem primária de polietileno contendo 1 unidade do produto.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Ambiente doméstico:

O tratamento antiderrapante e a manutenção de superfícies planas no piso podem reduzir o risco de escorregões. A largura de passagens, como o hall de entrada e os corredores, deve ser suficiente para a circulação.

Instituições de saúde:

O ambiente deve ser limpo e organizado, com temperatura e umidade adequadas, e piso seco que facilite a locomoção dos pacientes.

Ambiente de espaços públicos:

O local deve ser espaçoso e bem iluminado, com piso plano e seco, sem obstáculos à frente.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

1. Limpe a estrutura/apoio de mãos com sabão neutro, detergente ou limpador doméstico suave. Não utilize solventes orgânicos (como acetona, MEK, thinner, fluido de isqueiro, fluido de lavagem a seco,



gasolina ou terebintina), pois podem dissolver o plástico e danificar o produto. Seque completamente o produto imediatamente com uma toalha.

2. Verifique os parafusos e conexões antes de cada uso para garantir que todos os componentes estejam devidamente apertados e/ou fixados.

3. Mensalmente, ou conforme necessário, verifique as condições da estrutura e certifique-se de que não há defeitos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. O andador está ajustado na altura correta.

2. Os mecanismos de travamento e botões de mola estão totalmente engatados.

3. As ponteiros estão em boas condições. Substitua imediatamente se estiverem desgastadas ou ausentes.

4. O andador está nivelado e todas as pernas estão ajustadas na mesma altura.

5. O produto deve ser utilizado somente conforme orientação do seu profissional de saúde.

6. Acione o travamento e pratique curvar-se, alcançar objetos e fazer transferências para dentro e fora do andador.

7. NUNCA tente manobras que não tenham sido previamente praticadas.

8. Fique atento ao ambiente ao operar o andador. Observe possíveis perigos e evite-os.

9. NÃO ultrapasse a capacidade máxima de peso indicada no dispositivo e no manual de montagem, pois isso pode causar lesões graves.



8. **NÃO** realize ajustes enquanto estiver utilizando o andador.
9. **NÃO** utilize em cascalho solto ou superfícies irregulares.
10. **NÃO** passe por cima de rachaduras ou fissuras grandes.
11. Pare e avance lentamente ao encontrar rachaduras ou desníveis na superfície da calçada.
12. **NÃO** coloque mais de 1,36 kg (3 libras) na bolsa ou cesto.
13. Use rodas apenas nas pernas dianteiras. Rodas podem ser utilizadas nas quatro pernas desde que os freios traseiros apropriados estejam instalados.
14. **NÃO** use em escadas ou escadas rolantes.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica

VALIDADE

INDETERMINADO

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 406 mm a 627 mm

Largura (mm): 290 mm a 550 mm

Altura (mm): 622 mm a 1258 mm

Fabricante: Com-BridgeInternational Co., Ltd CHINESA

**Endereço: No.5 Futian Sixth Road, GangkouTown, ZhongshanCity, Guangdong
CN**



Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710022**