



BENGALA

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Produto composto por liga metálica.

FINALIDADE DE USO

O produto é indicado para auxílio na estabilidade e equilíbrio ao caminhar sobre diferentes superfícies internas e externas, podendo também ser usado para reduzir o impacto na perna oposta. Ele oferece suporte e promove a mobilidade durante a caminhada para pessoas com mobilidade reduzida.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: DY05951L

Altura (cm): 89

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05910L

Altura (cm): 89

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05910LB

Altura (cm): 89

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05910L(2)

Altura (cm): 89

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05911

Comprimento (cm): 45,5

Largura (cm): 30

Altura (cm): 70,5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05911L

Comprimento (cm): 45,5

Largura (cm): 30

Altura (cm): 70,5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05911LB



Comprimento (cm): 65

Largura (cm): 30,5

Altura (cm): 83

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05911L(3)

Comprimento (cm): 45,5

Largura (cm): 30

Altura (cm): 70,5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05911L(4)

Comprimento (cm): 55

Largura (cm): 30

Altura (cm): 80,5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:1

Modelo: DY05911L(5)

Comprimento (cm): 5

Largura (cm): 28,5

Altura (cm): 71

Carga máx. (kg): 80



Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05911L(6)

Comprimento (cm): 45

Largura (cm): 28,5

Altura (cm): 71

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:6

Modelo: DY05911L(7)

Comprimento (cm): 45

Largura (cm): 28,5

Altura (cm): 71

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05920L

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05920LB

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05920LH

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201LB

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201LH

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-BK

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY059201L(3)

Altura (cm): 80.5-103.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L(3)B

Altura (cm): 80.5-103.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05920L(3)

Altura (cm): 80.5-103.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M1

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M2

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY059201L-M3

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M4

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M5

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M6

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M7

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY059201L-M10

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059201L-M11

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05920L(4)

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059203LB

Altura (cm): 70.5-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05920L(9)

Altura (cm): 76-98CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05921

Altura (cm): 65-88CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05922

Altura (cm): 75-98CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05924

Altura (cm): 66-89CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05926

Altura (cm): 74-90CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05927L-M2

Altura (cm): 71-94CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05927L-M1

Altura (cm): 74-90CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L-M3

Altura (cm): 75-95CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L-M5

Altura (cm): 71-94CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L-M6

Altura (cm): 71-94CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L-M7

Altura (cm): 75-98CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05927L-M8

Altura (cm): 75-95CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem: 20

Modelo: DY05927L-M10

Altura (cm): 75-89CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L(6)H

Altura (cm): 72-94CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L-M9

Altura (cm): 72-88CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927LB

Altura (cm): 80-90CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05927L(5)B

Altura (cm): 84.5-94.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY5927LB-2

Altura (cm): 80-90.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY5927LB-1

Altura (cm): 85-93.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05927L(5)H

Altura (cm): 84.5-94.5CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05928L

Altura (cm): 79-102CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20



Modelo: DY05929L

Altura (cm): 72-94CM

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05930L

Altura (cm): 77-100

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05930LB

Altura (cm): 77-100

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY059282L

Altura (cm): 71-93.5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:20

Modelo: DY05931

Altura (cm): 74-97

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10



Modelo: DY05932

Altura (cm): 73.5-96.5

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

Modelo: DY05934

Altura (cm): 73.5-97

Carga máx. (kg): 80

Quantidade por embalagem:10

MECANISMO DE AÇÃO

A bengala funciona como um terceiro ponto de apoio além dos pés do usuário, ampliando a base de sustentação e proporcionando maior equilíbrio e estabilidade durante a marcha ou quando a pessoa está em pé. Seu uso permite redistribuir parte da carga corporal, reduzindo o esforço e o impacto sobre o membro inferior contralateral, geralmente aquele afetado por dor, fraqueza ou lesão. Dessa forma, auxilia na mobilidade, melhora a segurança ao caminhar em diferentes superfícies e contribui para a prevenção de quedas, promovendo maior autonomia ao usuário com limitações físicas.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em ambiente seco e ventilado.

TRANSPORTE



Deve-se evitar pressão excessiva, luz solar direta, chuva ou neve durante transporte.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem primária de papel cartão e saco plástico contendo 1 unidade do produto.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Antes de Usar

1. Verifique a altura da bengala: Ajuste a altura da bengala de forma que o cabo fique na altura do punho quando o braço estiver relaxado ao lado do corpo. O cotovelo deve formar um ângulo de aproximadamente 15° a 20° ao segurar a bengala.
2. Cheque a ponteira de borracha: Certifique-se de que a ponteira (base da bengala) está em boas condições, sem rachaduras ou desgaste excessivo. Isso evita escorregões.
3. Verifique a firmeza das partes móveis: Em bengalas dobráveis ou ajustáveis, confira se todas as partes estão bem encaixadas e travadas.

Modo de uso:

1. Segure a bengala com a mão oposta ao lado mais fraco do corpo (exemplo: se a perna direita está com problema, use a bengala com a mão esquerda).
2. Mova a bengala e a perna enfraquecida ao mesmo tempo para frente.
3. Em seguida, dê o passo com a perna mais forte.
4. Mantenha o corpo ereto e olhe para frente, não para baixo.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO



Limpe com um detergente neutro e passe um pano macio e limpo pelo menos uma vez por mês.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não se aplica.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

3 ANOS

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 50 mm a 650 mm

Largura (mm): 285 mm a 370 mm

Altura (mm): 340 mm a 1560 mm

Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br



- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710032**