



CADEIRA PARA BANHO

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Alumínio + plástico,

FINALIDADE DE USO

O banco de banho é utilizado para auxiliar o paciente no banho e ajudar na recuperação de pacientes com fratura nos membros inferiores.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: YM-F02-1

Dimensões (C x l x A): 400 x 350 x (370-540) mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F08-1

Dimensões (C x l x A): 375 x 380 x (673-851)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F01

Dimensões (C x l x A): 315x315x(876-1333)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F02



Dimensões (C x l x A): 430x380x(370-520)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F03

Dimensões (C x l x A): 410x380x(391-467)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F04

Dimensões (C x l x A): 430x420x(360-505)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F05

Dimensões (C x l x A): 430x380x(650-800)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F06

Dimensões (C x l x A): 430x420x(737-864)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F07

Dimensões (C x l x A): 430x420mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F09

Dimensões (C x l x A): 380x380x(770-857)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F10

Dimensões (C x l x A): 420x340x(730-743)mm

Carga max.: 159KG



Modelo: YM-F11

Dimensões (C x l x A): 485x419x(734-836)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F15

Dimensões (C x l x A): 395x380x(680-830)mm

Carga max.: 113KG

Modelo: YM-F47

Dimensões (C x l x A): 940x400x(840-940)mm

Carga max.: 141KG

Modelo: YM-F17

Dimensões (C x l x A): 690x485x(745-846)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F18

Dimensões (C x l x A): 710x450x(805-905)mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-F19

Dimensões (C x l x A): 680x400x(780-870)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F20

Dimensões (C x l x A): 690x395x(760-860)mm

Carga max.: 136KG



Modelo: YM-F21

Dimensões (C x l x A): 690x395x(780-880)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F22

Dimensões (C x l x A): 305x305x(406-559)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM- F23

Dimensões (C x l x A): 415x425x(775-900)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F88

Dimensões (C x l x A): 510x540x(770-890)mm

Carga max.: 100kg

Modelo: YM-F29

Dimensões (C x l x A): 550x455x(725-852)mm

Carga max.: 159kg

Modelo: YM-F50

Dimensões (C x l x A): 490x410x440mm

Carga max.: 136kg.

Modelo: YM-F40

Dimensões (C x l x A): 490x490x(815-915)mm

Carga max.: 136kg



Modelo: YM-F41

Dimensões (C x l x A): 480x480mm

Carga max.: 136kg

Modelo: YM-F45

Dimensões (C x l x A): 585x652x(1190-1350)mm

Carga max.: 170kg

Modelo: YM-F49

Dimensões (C x l x A): 370x370x(395-522)mm

Carga max.: 136kg

Modelo: YM-F48

Dimensões (C x l x A): 915x480x826mm

Carga max.: 136kg

MECANISMO DE AÇÃO

A cadeira de banho funciona como um apoio estável e seguro que permite ao usuário sentar-se durante o banho, prevenindo quedas e facilitando a higienização de pessoas com mobilidade reduzida.

ARMAZENAMENTO

- **Ambiente seco:** Armazene o banco em local seco para evitar corrosão das partes metálicas e deterioração das partes emborrachadas.



Temperatura ambiente: Mantenha em temperatura entre 5°C e 40°C, evitando exposição a extremos de calor ou frio.

Evitar umidade e luz solar direta: A umidade pode danificar componentes e causar mofo, enquanto a luz solar pode degradar plásticos e borrachas.

Superfície plana e limpa: Apoie o banco sobre uma superfície estável, plana e limpa para evitar empenamentos ou danos aos pés de borracha.

Protegido contra poeira: Se possível, armazene em uma embalagem ou capa protetora.

TRANSPORTE

- **Desmontado:** Para facilitar o manuseio e reduzir o risco de danos, transporte o banco desmontado e acondicionado em sua embalagem original ou apropriada.
- **Proteção contra impactos:** Use materiais como papelão, plástico bolha ou espuma para proteger o banco durante o transporte.
- **Evitar empilhamento excessivo:** Se for empilhar com outros itens, não exceda o peso suportado pelas partes do banco.
- **Manuseio cuidadoso:** Evite quedas ou impactos bruscos que possam danificar os tubos de alumínio, botões de pressão ou pés de borracha.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.
Cada unidade é composta por encosto, assento para banho e apoio de braço.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Montagem:

1. Montagem da estrutura principal do assento

1.1 Coloque o banco de assento virado para baixo sobre uma superfície plana elevada para revelar os furos e reentrâncias pré-perfurados destinados à instalação da estrutura principal do assento.



1.2 Localize a reentrância com a letra "A" impressa na parte inferior do banco. Insira a estrutura principal nº 2 na reentrância pré-formada nº 2.

1.3 Localize a reentrância com a letra "B" impressa na parte inferior do banco. Insira a estrutura principal nº 1 na reentrância pré-formada nº 1 e fixe as duas extremidades com os parafusos manuais, apertando com as mãos.

1.4 Fixe a seção central transversal utilizando uma arruela curva e um parafuso manual.

2. Fixar as extensões de alumínio das pernas à estrutura principal

2.1 Pressione os botões de pressão na estrutura principal e insira as pernas de extensão de alumínio no tubo da estrutura principal até que fiquem presas na altura desejada. Repita com as três pernas restantes. Certifique-se de que todas as quatro pernas estejam ajustadas à mesma altura e de que os botões de pressão estejam totalmente salientes antes de usar.

3. Instalação e montagem do encosto

3.1 Segure um dos tubos da estrutura de alumínio do encosto com os botões de pressão voltados para cima. Deslize o tubo no suporte transversal até que os botões de latão saiam pelos orifícios do suporte e travem no lugar. A estrutura de alumínio do encosto possui dois ajustes de altura. Repita o processo com o segundo tubo da estrutura do encosto. Vire o banco para a posição normal (com o assento para cima).

3.2 Com o banco na posição normal, monte o encosto na estrutura de alumínio.

3.3 Segure o encosto pela alça e encaixe-o nas reentrâncias pré-formadas localizadas na parte de trás do encosto, alinhando os furos para parafusos com os furos pré-perfurados da estrutura de alumínio do encosto. Fixe com os parafusos manuais. Após inserir todos os quatro parafusos, aperte para garantir a segurança.

4. Montagem dos apoios de braço

4.1 Insira cada apoio de braço acolchoado em cada lado do assento. Certifique-se de que a barra curva se estenda para fora do assento. Os botões de pressão devem travar firmemente no lugar.

5. Ajuste da altura do banco



5.1 Ao ficar de pé em frente ao banco montado, como se fosse sentar, a parte de trás dos joelhos do usuário deve tocar a parte frontal do assento. Isso garantirá que os pés fiquem firmes no chão quando estiver sentado corretamente. Ajuste as extensões das pernas conforme necessário.

5.2 Certifique-se de que as quatro pontas de borracha estejam apoiadas uniformemente no chão.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

- Método de limpeza: use um pano úmido para limpar.
- Inspecione periodicamente o banco de banho para verificar danos ou componentes soltos.
- Certifique-se de que todos os botões de pressão estejam salientes nas extensões das pernas.
- Verifique se os pés de borracha nas extensões das pernas estão rasgados ou desgastados. Se algum desses condições existirem ou se estiverem ausentes, substitua-os imediatamente.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Não coloque o banco de banho em superfícies irregulares.
 2. Não exceda a capacidade máxima de peso do usuário de 136 kg (300 lbs).
 3. Não fique em pé sobre o banco de banho.
 4. Não utilize o banco de banho para qualquer outra finalidade além daquela a que ele se destina.
 5. **PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**
-



CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

INDETERMINADO

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 300 mm a 940 mm

Largura (mm): 305 mm a 652 mm

Altura (mm): 365 mm a 1350 mm

Fabricante: Com-Bridge International Co., LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

**Endereço: N°5, FUTIAN SIXTH ROAD GANGKOU TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG CN – GUANGDONG - ZHONGSHAN/CHINA, REPÚBLICA POPULAR**

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710023**