



## **CADEIRA DE RODAS PARA TRANSFÊRENCIA**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

Produto composto por ferro A3.

---

### **FINALIDADE DE USO**

Este produto é utilizado para a transferência e movimentação de pacientes em instituições médicas; para a transferência ou para auxiliar na micção e evacuação de pessoas com deficiência ou com lesões nas pernas que apresentem dificuldade de locomoção; bem como para idosos e pessoas debilitadas.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

**Modelo: DH077600**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 71**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 79-96**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600G**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 71**

**Largura (cm): 59**



**Altura (cm): 93-110**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600-46**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 71**  
**Largura (cm): 59**  
**Altura (cm): 79-99**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600-51**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 71**  
**Largura (cm): 63,5**  
**Altura (cm): 79-99**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(2)**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 71**  
**Largura (cm): 59**  
**Altura (cm): 79-96**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(3)**  
**Cor: Branco**



**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 79-96**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(4)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(5)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(5)G**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 93-110**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**



**Modelo: DH077600(6)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):71**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 79-96**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(7)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(8)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(9)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**



**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(10)G**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 93-110**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(11)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(12)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):77**

**Largura (cm):59**

**Altura (cm): 81**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(13)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):70**

**Largura (cm):59**



**Altura (cm): 79-96**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(14)**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 70**  
**Largura (cm): 59**  
**Altura (cm): 92-108**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(15)**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 91**  
**Largura (cm): 59**  
**Altura (cm): 82-99**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(16)**  
**Cor: Branco**  
**Comprimento (cm): 91**  
**Largura (cm): 59**  
**Altura (cm): 82-99**  
**Carga máx. (kg): 100**  
**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(17)**  
**Cor: Cor natural**



**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(18)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 87,5-114,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(19)-51**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 63**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(20)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 81-98**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**



**Modelo: DH077600(21)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm):**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 88-105**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(22)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 88-105**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(23)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 76,5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 92,5-108,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(24)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 71**

**Largura (cm): 58**

**Altura (cm): 92-108**





**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(25)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 87,5-114,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(26)**

**Cor: Cinza**

**Comprimento (cm): 76,5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 100-116**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(27)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 87,5-114,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(28)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**



**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 87,5-114,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH077600(29)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 76,5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 100-116**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(2)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 91-117**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(3)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(3) G**



**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 99-125**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(4)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(6)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 87-113**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(6) G**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 99-125**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**



**Modelo: DH01118(9)**

**Cor: Cor natural**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(9) G**

**Cor: Cor natural**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 99-125**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(12)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(16)**

**Cor: Cor natural**

**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**



**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

**Modelo: DH01118(17)**

**Cor: Branco**

**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 93-119**

**Carga máx. (kg): 100**

**Embalagem: Papel cartão**

---

## **MECANISMO DE AÇÃO**

A cadeira de transferência funciona por meio de uma estrutura com assento ajustável em altura, regulado por bomba hidráulica acionada por pedal, permitindo o alinhamento com leitos, cadeiras de rodas ou vasos sanitários. Possui rodas com freios individuais e cintos de segurança que garantem a estabilidade do usuário durante o uso. Seu mecanismo de mobilidade controlada possibilita o deslocamento suave em superfícies planas, evitando riscos de queda ou tombamento. Dessa forma, o equipamento auxilia na transferência, movimentação e realização de necessidades fisiológicas de pacientes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, promovendo segurança, praticidade e ergonomia tanto para o usuário quanto para o cuidador.

---

## **ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser colocado em local seco e ventilado, não devendo ser exposto a ambientes com alta temperatura e variações rápidas de temperatura; o produto deve ser mantido isolado de substâncias quimicamente corrosivas, como ácidos e álcalis.

---

## **TRANSPORTE**

O produto deve ser manuseado com cuidado durante o transporte e não deve ser jogado, rolado ou submetido a pressão excessiva.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado contendo 1 unidade do produto por embalagem.

---

## **CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO**

- Peça ao usuário para sentar-se ereto e o operador deve posicionar a cadeira de transferência, ajustando a altura da estrutura do assento de modo que esta fique ligeiramente acima do plano do assento.
- Após abrir os dois lados da estrutura do assento, mova a cadeira de transferência para a frente do usuário. Ajuste a posição da cadeira de forma que o centro de gravidade do corpo do usuário esteja no centro da estrutura do assento. Ajuste novamente a altura da estrutura de modo que a parte inferior toque levemente a superfície do assento.
- Trave o freio das rodas dianteiras de 5 polegadas, levante os pés do usuário e coloque-os nos pedais de apoio.
- Peça ao usuário que incline levemente o corpo para a esquerda e para a direita, enquanto o operador gira a estrutura do assento correspondente, de modo que o usuário se acomode sucessivamente nos lados esquerdo e direito da cadeira de transferência.
- Quando o usuário estiver completamente sentado na estrutura do assento, as laterais da estrutura devem ser totalmente fechadas, o fecho de segurança é automaticamente travado e o operador deve prender o cinto de segurança.
- O usuário ajusta sua postura para uma posição confortável e apoia naturalmente as mãos nos apoios de braço.
- O operador deve verificar a distância entre a parte inferior da estrutura do assento da cadeira e o assento de origem, elevar a estrutura de 2 a 3 centímetros, liberar o

freio das rodas dianteiras de 5 polegadas e mover lentamente a cadeira de transferência para longe do assento.

- O operador deve segurar a extremidade frontal da alça e empurrar a cadeira de transferência até a beira da cama.
- Verifique a altura da estrutura do assento da cadeira na beira da cama para garantir que a superfície inferior da estrutura esteja ligeiramente acima da superfície da cama (caso seja necessário ajustar a altura, as rodas dianteiras de 5 polegadas devem estar travadas antes da operação).
- O operador deve empurrar a cadeira de transferência completamente até a posição desejada na cama, travar o freio das rodas dianteiras de 5 polegadas e ajustar novamente a altura da estrutura do assento para que a parte inferior toque levemente a superfície da cama.
- Abra o cinto de segurança e o fecho de segurança atrás do encosto, abra lentamente os lados esquerdo e direito da estrutura do assento e permita que o usuário se sente na cama com os quadris.
- O operador deve destravar as rodas dianteiras de 5 polegadas, retirar os pés do usuário dos pedais de apoio e afastar a cadeira de transferência da cama.

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Não é necessária.

---

## **REQUISITOS DE MANUTENÇÃO**

- Não arranhe nem desgaste a superfície do produto com objetos duros, a fim de evitar danos ao material;
- Para a limpeza e manutenção diária, utilize um detergente sintético neutro, limpe com um pano úmido e, em seguida, seque com um pano seco;
- Evite o contato com ácidos ou álcalis fortes para prevenir corrosão;



- Verifique regularmente a existência de porcas ou parafusos soltos, peças danificadas ou quebradas, substituindo-as quando necessário.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Ajuste à altura adequada antes do uso e certifique-se de que os painéis do assento em ambos os lados permaneçam na mesma altura.
- Ao entrar ou sair da cadeira de transferência, não fique em pé sobre a estrutura da cadeira, caso contrário, ela poderá tombar facilmente.
- Ao utilizar a cadeira de transferência, certifique-se de que o fecho de segurança e o cinto estejam travados.
- Ao entrar ou sair da cadeira de transferência, o usuário deve garantir que as rodas estejam travadas.
- Quando o usuário estiver sentado na cadeira de transferência e quiser pegar objetos fora dela (como à frente, aos lados ou atrás), deve ter cuidado para não inclinar excessivamente o corpo, a fim de evitar a perda de equilíbrio e o risco de tombamento da cadeira.
- Não se incline abaixo dos joelhos para pegar objetos no chão.
- Ao ajustar a altura do assento, as rodas dianteiras devem estar travadas; o operador controla a altura acionando a bomba hidráulica com o pé.
- Nunca utilize a inércia para tentar subir escadas com a cadeira de transferência, pois isso pode causar acidentes ou danos. Ao subir ou descer escadas, o operador não deve mover o usuário junto com a cadeira, sob risco de colocar em perigo a segurança do mesmo.
- A cadeira de transferência é adequada apenas para deslocamento em terreno plano. Tenha cuidado para evitar buracos e obstáculos que possam causar risco de tombamento.
- Quando a inclinação for superior a 5 graus, o operador deve virar a cadeira de transferência de costas e descer a rampa em marcha à ré, verificando





cuidadosamente. Se a cadeira descer a rampa de frente, o usuário poderá cair para frente e sofrer uma queda.

- Ao parar em uma rampa (desde que a inclinação seja inferior a 10 graus), todas as quatro rodas devem estar travadas.
- Os freios das quatro rodas da cadeira de transferência servem apenas para estacionar. Eles não são dispositivos de frenagem em movimento e não devem ser usados para reduzir a velocidade ou frear durante o deslocamento.
- Quando o operador utilizar o pedal da bomba, deve controlá-lo apenas com os pés.
- Atenção: o operador não deve pisar no pedal no ar, para evitar danos ao corpo da bomba e riscos à segurança pessoal.

#### **PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

---

#### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não se aplica.

---

#### **VALIDADE**

**INDETERMINADO**

---

#### **DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO**

Comprimento (mm): 700 mm a 910 mm

Largura (mm): 550 mm a 635 mm

Altura (mm): 790 mm a 1250 mm

---

**Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA**

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, CHINA.

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03



- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- **Nº 82696710035**