



## **CADEIRA HIGIÊNICA**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

O produto é comercializado em embalagem de papel cartão contendo 1 unidade do produto.

---

### **FINALIDADE DE USO**

A cadeira higiênica é destinada a pessoas com deficiência, pacientes enfermos, gestantes, idosos e pessoas debilitadas com dificuldades de mobilidade.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

**Modelo: DY02688L**

**Comprimento (cm): 83**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 42.5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02695**

**Comprimento (cm): 95**

**Largura (cm): 60**



**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 50**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02695-51**

**Comprimento (cm): 95**

**Largura (cm): 60**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 58.5**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02695C-51**

**Comprimento (cm): 88**

**Largura (cm): 72**

**Altura (cm): 89**

**Largura assento (cm): 58,5**

**Profundidade do assento (cm): 43,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02821L**

**Comprimento (cm): 77**

**Largura (cm): 63**

**Altura (cm): 97**

**Largura assento (cm): 51**

**Profundidade do assento (cm): 44**



**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02691**

**Comprimento (cm): 91,5**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 45**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02691(2)**

**Comprimento (cm): 91,5**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 45**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02692E**

**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02692**



**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02692 (2)**

**Comprimento (cm): 90**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02692 (4)**

**Comprimento (cm): 91,4**

**Largura (cm): 59**

**Altura (cm): 89,5**

**Largura assento (cm): 49**

**Profundidade do assento (cm): 43,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02692 (5)**

**Comprimento (cm): 90,5**

**Largura (cm): 59,5**

**Altura (cm): 89,5**



**Largura assento (cm): 51**

**Profundidade do assento (cm): 43,3**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02696(5)**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02696**

**Comprimento (cm): 55**

**Largura (cm): 44**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 42**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02696(2)**

**Comprimento (cm): 55**

**Largura (cm): 44**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02696L(2)**

**Comprimento (cm): 53**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77,5-87,5**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02696(5)E**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 40**

**Profundidade do assento (cm): 42**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02697**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02697(2)**

**Comprimento (cm): 55,5**



**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02698**

**Comprimento (cm): 85**

**Largura (cm): 70**

**Altura (cm): 89**

**Largura assento (cm): 55**

**Profundidade do assento (cm): 43,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02699L**

**Comprimento (cm): 49**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 93,5**

**Largura assento (cm): 43,5**

**Profundidade do assento (cm): 42,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02800**

**Comprimento (cm): 49**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 56,5-66,5**

**Largura assento (cm): 36**



**Profundidade do assento (cm): 47**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02800(2)**

**Comprimento (cm): 50,5**

**Largura (cm): 56,5**

**Altura (cm): 70-75**

**Largura assento (cm): 49**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02804**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 68,5**

**Altura (cm): 97**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02805**

**Comprimento (cm): 51**

**Largura (cm): 69**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**





**Modelo: DY02810**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 60-71**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02810 (2)**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 60-71**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02811**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 60-71**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02815**

**Comprimento (cm): 48**

**Largura (cm): 54**



**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 43,5**

**Profundidade do assento (cm): 43,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02816L**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02817**

**Comprimento (cm): 62**

**Largura (cm): 58**

**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 45**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02817U**

**Comprimento (cm): 62**

**Largura (cm): 58**

**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 43**



**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02817U(2)**

**Comprimento (cm): 62**

**Largura (cm): 58**

**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02817U(2)V**

**Comprimento (cm): 62**

**Largura (cm): 58**

**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02818L**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02819**



**Comprimento (cm): 84**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02819L**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02820L**

**Comprimento (cm): 86**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 42,5**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02823 (2)**

**Comprimento (cm): 72**

**Largura (cm): 44**

**Altura (cm): 90**



**Largura assento (cm): 40**

**Profundidade do assento (cm): 42**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02824**

**Comprimento (cm): 88**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 96**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02830**

**Comprimento (cm): 52,5**

**Largura (cm): 74,3**

**Altura (cm): 78,5-85,5**

**Largura assento (cm): 61,5**

**Profundidade do assento (cm): 47**

**Carga máx. (kg): 225**

**Modelo: DY02830 (2)**

**Comprimento (cm): 52,5**

**Largura (cm): 74,3**

**Altura (cm): 92-97**

**Largura assento (cm): 61,5**

**Profundidade do assento (cm): 47**

**Carga máx. (kg): 225**

**Modelo: DY02890**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 36**

**Altura (cm): 87**

**Largura assento (cm): 36**

**Profundidade do assento (cm): 41**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02890(2)**

**Comprimento (cm): 51**

**Largura (cm): 36**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 38**

**Profundidade do assento (cm): 42**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02893**

**Comprimento (cm): 54,5**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 85**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02893L**

**Comprimento (cm): 53,5**



**Largura (cm): 53,5**

**Altura (cm): 83,5**

**Largura assento (cm): 43,5**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894**

**Comprimento (cm): 54**

**Largura (cm): 52,5**

**Altura (cm): 76,5-86,5**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894(2)**

**Comprimento (cm): 53**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 78-88**

**Largura assento (cm): 42,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894(5)**

**Comprimento (cm): 54**

**Largura (cm): 52,5**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 42,5**



**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894L**

**Comprimento (cm): 54,5**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 77**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894L(2)**

**Comprimento (cm): 56**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02894E(5)**

**Comprimento (cm): 58**

**Largura (cm): 53,5**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**





**Modelo: DY02895L**

**Comprimento (cm): 56**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 77-87**

**Largura assento (cm): 44**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02895L**

**Comprimento (cm): 58**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 77,5-87,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02896(2)**

**Comprimento (cm): 52**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77,5-87,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02896(2)F**

**Comprimento (cm): 52**

**Largura (cm): 52**



**Altura (cm): 87,5-97,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02896(4)F**

**Comprimento (cm): 52**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77,5-87,5**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02897L**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 48**

**Altura (cm): 45**

**Largura assento (cm): 38,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02897**

**Comprimento (cm): 45**

**Largura (cm): 44**

**Altura (cm): 44**

**Largura assento (cm): 38,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**



**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02897(3)V**

**Comprimento (cm): 41**

**Largura (cm): 39**

**Altura (cm): 39**

**Largura assento (cm): 39**

**Profundidade do assento (cm): 41**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02897(2)**

**Comprimento (cm): 42**

**Largura (cm): 42**

**Altura (cm): 42**

**Largura assento (cm): 38,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02898**

**Comprimento (cm): 41**

**Largura (cm): 39**

**Altura (cm): 39**

**Largura assento (cm): 39**

**Profundidade do assento (cm): 41**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02899**



**Comprimento (cm): 52.5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 80**

**Largura assento (cm): 45,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02899(2)**

**Comprimento (cm): 52,5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 80**

**Largura assento (cm): 45,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02899(3)**

**Comprimento (cm): 58**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 80**

**Largura assento (cm): 45**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02899U**

**Comprimento (cm): 62**

**Largura (cm): 57**

**Altura (cm): 81**



**Largura assento (cm): 47**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02899L**

**Comprimento (cm): 52,5**

**Largura (cm): 55**

**Altura (cm): 80**

**Largura assento (cm): 45,5**

**Profundidade do assento (cm): 40**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02880**

**Comprimento (cm): 55,5**

**Largura (cm): 52**

**Altura (cm): 77**

**Largura assento (cm): 43**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02604LJ**

**Comprimento (cm): 95**

**Largura (cm): 60**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 50**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**



**Modelo: DY026992L**

**Comprimento (cm): 95**

**Largura (cm): 60**

**Altura (cm): 90**

**Largura assento (cm): 58,5**

**Profundidade do assento (cm): 44**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02693**

**Comprimento (cm): 91,5**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 91**

**Largura assento (cm): 42**

**Profundidade do assento (cm): 45**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY02682S**

**Comprimento (cm): 95**

**Largura (cm): 62,5**

**Altura (cm): 88,5**

**Largura assento (cm): 44,5**

**Profundidade do assento (cm): 43**

**Carga máx. (kg): 100**

**Modelo: DY074006**

**Comprimento (cm): 44**



**Largura (cm): 43**

**Altura (cm): 18,5**

**Largura assento (cm): /**

**Profundidade do assento (cm): /**

**Carga máx. (kg): 80**

**Modelo: DY074007**

**Comprimento (cm): 44**

**Largura (cm): 43**

**Altura (cm): 18,5**

**Largura assento (cm): /**

**Profundidade do assento (cm): /**

**Carga máx. (kg):20**

---

## **MECANISMO DE AÇÃO**

A cadeira higiênica funciona como um assento sanitário portátil, permitindo que pessoas com mobilidade reduzida realizem suas necessidades fisiológicas com segurança e conforto, por meio de uma estrutura estável com abertura no assento e recipiente coletor removível.

---

## **ARMAZENAMENTO**

Os produtos embalados devem ser armazenados em ambiente com temperatura não superior a -0 °C ~ 40 °C, umidade relativa do ar não superior a 80%, isento de gases corrosivos, bem ventilado e limpo. Durante o transporte, deve-se evitar exposição à umidade, à luz e a fontes de calor.

---

## **TRANSPORTE**



A cadeira higiênica deve ser transportada desmontada ou dobrada, protegida contra impactos, umidade, calor, poeira e agentes químicos, devidamente fixada para evitar tombamentos ou danos durante o trajeto.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem primária de papel cartão e saco plástico contendo 1 unidade do produto.

---

## **CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO**

- **Uso dos apoios de braço retráteis:** Levante os apoios de braço em ambos os lados do tubo do encosto, de modo que o pino do apoio de braço se encaixe na estrutura principal, fixando-o. Para recolher os apoios de braço, puxe o pino para trás e abaixe o apoio de braço.
  - **Uso da placa do assento:** A parte central da placa em formato de “U” pode ser removida ou instalada conforme a necessidade do usuário.
  - **Uso do balde sanitário:** Antes do uso, insira o balde pela parte traseira da cadeira higiênica, posicionando-o sob a placa do assento. As laterais do balde devem se encaixar sob a placa. Para removê-lo, puxe o balde para fora.
  - **Uso do freio:** Para acionar o freio, pressione levemente o interruptor de travamento com o pé. Para destravar, pressione novamente o ponto de liberação no mecanismo.
  - **Uso do pedal:** Antes que o usuário se sente na cadeira higiênica, levante os pedais. Após o usuário estar sentado, abaixe os pedais e posicione os pés sobre eles.
- 

## **ESTERILIZAÇÃO**

Não é necessária.

---

## **REQUISITOS DE MANUTENÇÃO**

Para utilizar a cadeira higiênica com segurança, é necessário realizar inspeções regulares. Recomenda-se uma inspeção completa a cada





seis meses para garantir que as conexões não estejam frouxas e que o funcionamento esteja normal.

As articulações das partes móveis da cadeira devem receber, durante as inspeções de rotina, uma quantidade adequada de óleo lubrificante. Em caso de desgaste acentuado, a peça deve ser substituída imediatamente para garantir a segurança.

Evite impactos na cadeira higiênica e riscos em sua superfície causados por objetos cortantes.

Evite que a estrutura da cadeira e o encosto absorvam umidade, o que pode provocar ferrugem, ruídos anormais e proliferação de bactérias.

Caso haja contato com água, seque imediatamente.

Quando a cadeira higiênica atingir o fim de sua vida útil, suas partes metálicas podem ser recicladas.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Não permanecer em pé sobre os pedais ao sair da cadeira, pois isso pode causar tombamento para frente.

Deve ser usado em um piso que não seja irregular.

**PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

---

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Não se aplica.

---

## **VALIDADE**

**3 ANOS**

---

## **DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO**

Comprimento (mm): 410 mm a 915 mm

Largura (mm): 360 mm a 743 mm



**Altura (mm): 185 mm a 975 mm**

---

**Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA**

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- N° 82696710031