



CADEIRA HIGIÊNICA

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Polipropileno

FINALIDADE DE USO

As cadeiras de higienização são indicadas para auxiliar em procedimentos de higienização de pessoas em ambiente hospitalar, clínica ou doméstico.

MODELOS COMERCIAIS

AL-B200

Peso máximo: 100kg

Dimensões gerais (Comprimento x largura x altura) mm: 490 x 400 x 500

Dimensões dobradas (Comprimento x largura x altura) mm: 490 x 400 x 350

Largura do assento (cm): 49

Profundidade do assento (cm): 29

Estabilidade estática: >10°

Material principal: Polipropileno

AL-B200B



Peso máximo: 100kg

Dimensões gerais (Comprimento x largura x altura) mm: 490 x 400 x 850

Dimensões dobradas (Comprimento x largura x altura) mm: 490 x 400 x 680

Largura do assento (cm): 49

Profundidade do assento (cm): 29

Estabilidade estática: >10°

Material principal: Polipropileno

AL-B300

Peso máximo: 120kg

Dimensões gerais (Comprimento x largura x altura) mm: 1020 x 515 x 1010

Dimensões dobradas (Comprimento x largura x altura) mm: 690 x 515 x 620

Largura do assento (cm): 46

Profundidade do assento (cm): 40

Estabilidade estática: >10°

Material principal: Polipropileno

AL-B300B

Peso máximo: 120kg

Dimensões gerais (Comprimento x largura x altura) mm: 880 x 490 x 960

Dimensões dobradas (Comprimento x largura x altura) mm: 600 x 490 x 595

Largura do assento (cm): 46

Profundidade do assento (cm): 40

Estabilidade estática: >10°

Material principal: Polipropileno

MECANISMO DE AÇÃO

As cadeiras higiênicas proporcionam independência, segurança e conforto para pessoas que possuem mobilidade reduzida, possuem perda de equilíbrio ou que



precisam de apoio para permanecer na posição ereta durante o processo de higienização.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local limpo, seco, longe de fontes de calor e gases corrosivos.

TRANSPORTE

Transportar o produto ao abrigo de luz e calor.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

O produto deve ser higienizado com um pano macio e seco.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Ao receber o produto, verificar as condições de embalagem do mesmo.

Não exceder o peso recomendado para o produto. Utilizar o produto para o uso pretendido.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Ajuste a cadeira de higiene para altura adequada do usuário.

Antes de utilizar o produto, certifique que a mola de ajuste de altura está travada.

Não ultrapassar o peso indicado para o produto.

Verifique se o produto está limpo e apto para utilizar.



Não utilize o produto se estiver quebrado.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

VALIDADE

5 ANOS.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 880

Largura (mm): 490

Altura (mm): 960

Fabricante: Jiangsu Assure Medical Equipment Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: No.799, Chuqiao Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710012**