



CADEIRA HIGIÊNICA

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Aço

FINALIDADE DE USO

A cadeira higiênica é utilizada para auxiliar pacientes que não conseguem agachar para a evacuação, tendo como principal função apoiar a recuperação de pacientes com fraturas nos membros inferiores.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: YM-G03

Dimensões (C x L): 520 X 457 mm

Altura: 610 – 762 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G07

Dimensões (C x L): 673 X 470 mm

Altura: 680 – 781 mm

Carga max.: 273KG

Modelo: YM-G21

Dimensões (C x L): 510 X 580 mm



Altura: 650 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G04

Dimensões (C x L): 520 X 457 mm

Altura: 610 – 762 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G05

Dimensões (C x L): 525 X 495 mm

Altura: 620 – 770 mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-G08

Dimensões (C x L): 670 X 495 mm

Altura: 780 mm

Carga max.: 295KG

Modelo: YM-G09

Dimensões (C x L): 585 X 415 mm

Altura: 584 – 737 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G10

Dimensões (C x L): 589 X 411 mm

Altura: 594 – 744 mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-G11

Dimensões (C x L): 615 X 460 mm



Altura: 597 – 749 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G13

Dimensões (C x L): 425 X 410 mm

Altura: 630 – 785 mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-G14

Dimensões (C x L): 495 X 485 mm

Altura: 625 – 730 mm

Carga max.: 114KG

Modelo: YM-G15

Dimensões (C x L): 510 X 470 mm

Altura: 600 – 7650 mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-G16

Dimensões (C x L): 490 X 520 mm

Altura: 967 mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-G18

Dimensões (C x L): 635 X 615 mm

Altura: 780 – 905 mm

Carga max.: 227KG

Modelo: YM-G19

Dimensões (C x L): 685 X 485 mm



Altura: 670 – 775 mm

Carga max.: 295KG

Modelo: YM-G12

Dimensões (C x L): 430x490 mm

Altura: 680-808 mm

Carga max.: 159 KG

Modelo: YM-G17

Dimensões (C x L): 648x615 mm

Altura: 672-851 mm

Carga max.: 295KG

MECANISMO DE AÇÃO

Seu mecanismo de ação baseia-se em uma estrutura estável e elevada, com assento contendo abertura central e um balde coletor removível posicionado abaixo, permitindo a evacuação sem necessidade de deslocamento até o banheiro. Braços de apoio, ponteiros antiderrapantes ou rodas com freios proporcionam estabilidade, enquanto os materiais resistentes à umidade permitem seu uso em ambientes como banheiros ou áreas de banho.

ARMAZENAMENTO

A cadeira sanitária deve ser armazenada em local seco, limpo, arejado e protegido da luz solar direta, a fim de evitar corrosão em partes metálicas, degradação de plásticos e proliferação de mofo ou bactérias. É importante mantê-la sobre uma superfície plana e estável, sem empilhar objetos sobre ela, e sempre higienizada antes de ser guardada. A temperatura ideal de armazenamento está entre 5°C e 40°C, evitando extremos de calor ou frio que possam afetar os materiais.



TRANSPORTE

Para o transporte, a cadeira sanitária deve estar limpa, seca e, se possível, parcialmente desmontada ou dobrada, facilitando o manuseio e evitando danos. As partes sensíveis, como ponteiras, apoios de braço e rodas, devem ser protegidas com plástico bolha, espuma ou manta. Durante o trajeto, a cadeira deve estar bem fixada para evitar tombamentos ou impactos. Evite exposição à umidade, chuva ou produtos químicos, que podem comprometer a durabilidade e a segurança do equipamento.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

O produto é composto por cadeira higiênica, assento sanitário elevado, barras de apoio para vaso sanitário, entre outros.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

1. AJUSTE DA ALTURA

1.1 Pressione o botão de trava localizado na perna e mova-a para cima ou para baixo até a altura desejada.

1.2 Certifique-se de que o botão esteja totalmente encaixado e que a perna esteja firme.

1.3 Repita os passos 1 e 2 nas outras três pernas.

1.4 Verifique se a cadeira está nivelada e todas as pernas estão na mesma altura.

2. INSTRUÇÕES DE USO

Utilize apenas conforme orientação do seu profissional de saúde.

3. SENTAR-SE E LEVANTAR-SE

3.1 Aproxime-se da cadeira higiênica de costas até sentir a parte de trás dos joelhos tocá-la.



3.2 Estenda os braços para trás e segure firmemente nos apoios de braço.

3.3 Abaixe-se lentamente dobrando os cotovelos e, se possível, os quadris e joelhos.

3.4 Para levantar-se, repita os passos de forma inversa. Apoie-se confortavelmente nos apoios de braço e certifique-se de estar equilibrado antes de soltá-los.

4. USO SOBRE O VASO SANITÁRIO

4.1 Levante o assento da cadeira e remova o balde coletor.

4.2 Substitua-o pelo protetor contra respingos (splash guard).

4.3 Levante a tampa do vaso sanitário, posicione a cadeira sobre ele com o protetor encaixado na bacia, e abaixe o assento.

4.4 Verifique se a cadeira está nivelada e estável antes de se sentar.

5. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO VASO SANITÁRIO

5.1 Levante o assento e a tampa do vaso sanitário.

5.2 Gire o botão de ajuste do assento elevado no sentido anti-horário até que a presilha esteja recuada o suficiente para não interferir na borda interna do vaso.

5.3 Posicione o assento elevado sobre a borda do vaso, encaixando as abas traseiras sob a borda. O botão de ajuste deve ficar na parte frontal do vaso.

5.4 Centralize o assento na borda e empurre a parte traseira o máximo possível.

5.5 Gire o botão no sentido horário para apertar até sentir resistência e, em seguida, mais 1/8 de volta para firmar.

6. USO DO ASSENTO ELEVADO

6.1 Aproxime-se com cuidado até sentir a parte de trás dos joelhos tocando o assento.

6.2 Alcance os dois apoios de braço para guiar seu posicionamento.

6.3 Abaixe-se lentamente, dobrando os cotovelos e joelhos.

6.4 Use os apoios de braço para auxiliar.

6.5 Levante-se lentamente do assento.



6.6 Certifique-se de estar equilibrado antes de soltar os apoios.

7. REMOÇÃO DO ASSENTO ELEVADO

7.1 Gire o botão de ajuste no sentido anti-horário até que o assento esteja solto.

7.2 Levante a parte frontal do assento até que o suporte de fixação se libere da borda do vaso.

7.3 Para remover totalmente, puxe o assento em sua direção em um ângulo.

8. MONTAGEM DAS BARRAS DE APOIO SANITÁRIAS

8.1 Remova o assento/tampa atual do vaso sanitário.

8.2 Coloque o suporte das barras de apoio entre o vaso e o conjunto de assento/tampa, com a parte arredondada voltada para trás.

8.3 Recoloque o assento/tampa e reinsira os parafusos de fixação, apertando bem as porcas.

8.4 Insira as hastes laterais no suporte, pressionando o botão de trava e deslizando até a posição desejada.

8.5 Ajuste os pés das hastes laterais até a altura adequada, garantindo que estejam firmes e nivelados.

8.6 Verifique se todos os parafusos estão bem apertados e se os botões de trava estão totalmente encaixados antes do uso.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

- **Inspecione periodicamente a cadeira higiênica para verificar danos ou componentes soltos.**



- Verifique as ponteiros de borracha das pernas quanto a rasgos, desgaste ou ausência. Substitua-as imediatamente se qualquer uma dessas condições for identificada.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. A tampa do vaso sanitário deve estar abaixada antes do uso. O não cumprimento pode causar danos ao equipamento e possíveis lesões ao usuário.
2. Inspeção todas as peças quanto a danos no transporte. Em caso de avaria, não utilize o produto. Entre em contato com o fornecedor ou transportadora para orientações.
3. Certifique-se de que os botões de travamento estejam totalmente encaixados nos respectivos furos de ajuste em cada perna. Isso garante que as extensões das pernas estejam firmemente fixadas e que o ajuste de altura esteja nivelado.
4. Mantenha todos os parafusos, porcas e/ou conexões sempre bem apertados.
5. Verifique se as ponteiros de borracha das pernas estão rasgadas, gastas ou ausentes. Substitua imediatamente caso identifique qualquer um desses problemas.
6. Todas as quatro pernas com ponteiros de borracha devem estar em contato com o chão o tempo todo.
7. Usuários com limitações físicas devem ser supervisionados ou assistidos ao utilizar a cadeira higiênica.
8. Não ultrapasse a capacidade máxima de peso, pois isso pode causar lesões graves. Capacidade máxima: 650 lbs (295 kg)
9. **PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.



VALIDADE

INDETERMINADO

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 425 mm a 685 mm

Largura (mm): 410 mm a 615 mm

Altura (mm): 584 mm a 967 mm

Fabricante: Com-Bridge International Co., LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: N°5, FUTIAN SIXTH ROAD GANGKOU TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG CN – GUANGDONG - ZHONGSHAN/CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710029**