



## **CADEIRA PARA BANHO**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

O equipamento é composto por uma liga de alumínio.

---

### **FINALIDADE DE USO**

Cadeiras de banho são utilizadas para auxiliar no banho para pessoas com deficiência, pacientes e idosos ou enfermos que têm dificuldade de locomoção.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

**Modelo: DY03780L, DY03780L-001**

**Comprimento (cm):32**

**Largura (cm):32**

**Altura (cm):44-54**

**Carga máx(kg):80**

**Modelo: DY03781L, DY03781L-001**

**Comprimento (cm):41**

**Largura (cm):55,5**

**Altura (cm):57,5-67,5**

**Carga máx (kg):80**

**Modelo: DY03782L, DY03782L-001**

**Comprimento (cm): 47**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 71,5-81,5**



**Carga máx(kg):80**

**Modelo: DY03782L(2), DY03782L(2)-001**

**Comprimento (cm): 46**

**Largura (cm): 55,5**

**Altura (cm): 78-88**

**Carga máx(kg): 80**

**Modelo: DY03782LU**

**Comprimento (cm): 47**

**Largura (cm): 53**

**Altura (cm): 71,5-81,5**

**Carga máx(kg): 80**

**Modelo: DY03782L(3)**

**Comprimento (cm): 50**

**Largura (cm): 55,5**

**Altura (cm): 75-90**

**Carga máx(kg): 80**

**Modelo: DY03783L, DY03783L-001**

**Comprimento (cm): 55**

**Largura (cm): 58,5**

**Altura (cm): 80,5-88,5**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03784L**

**Comprimento (cm): 45**

**Largura (cm): 49,5**

**Altura (cm): 75,5-85,5**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03785L**

**Comprimento (cm): 40**

**Largura (cm): 50**



**Altura (cm): 70-80**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03790, DY03790-001**

**Comprimento (cm): 49**  
**Largura (cm): 49**  
**Altura (cm): 51**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03790L**

**Comprimento (cm): 49**  
**Largura (cm): 49**  
**Altura (cm): 51**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03793S**

**Comprimento (cm): 72**  
**Largura (cm): 72**  
**Altura (cm): 50**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03793(2)S**

**Comprimento (cm): 90**  
**Largura (cm): 72**  
**Altura (cm): 50**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03794L, DY03794L-001**

**Comprimento (cm): 74**  
**Largura (cm): 23**  
**Altura (cm):**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03795L, DY03795L-001**

**Comprimento (cm): 41**



**Largura (cm): 49**  
**Altura (cm): 38,5**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03796L, DY03796L-001**  
**Comprimento (cm): 41**  
**Largura (cm): 49**  
**Altura (cm): 38,5-54**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03796LQ**  
**Comprimento (cm): 45**  
**Largura (cm): 51**  
**Altura (cm): 38,5-54**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03797L, DY03797L-001**  
**Comprimento (cm): 41**  
**Largura (cm): 51**  
**Altura (cm): 42-54**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03797L(2)**  
**Comprimento (cm): 41**  
**Largura (cm): 51**  
**Altura (cm): 42-58**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03798L, DY03798L -001**  
**Comprimento (cm): 51**  
**Largura (cm): 56,5**  
**Altura (cm): 73-88**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03798LQ**



**Comprimento (cm): 56,5**

**Largura (cm): 51**

**Altura (cm): 73-88**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03798L(2)**

**Comprimento (cm): 56,5**

**Largura (cm): 51**

**Altura (cm): 73-88**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03798L(3)**

**Comprimento (cm): 51**

**Largura (cm): 56,5**

**Altura (cm): 73-88**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03798L(4)**

**Comprimento (cm): 51**

**Largura (cm): 56,5**

**Altura (cm): 76-88**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03799LQ**

**Comprimento (cm): 80,5**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 78,5-88,5**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03799L, DY03799L-001**

**Comprimento (cm): 80,5**

**Largura (cm): 54**

**Altura (cm): 78,5-88,5**

**Carga máx (kg): 80**



**Modelo: DY03799L(2)**  
**Comprimento (cm): 85,5**  
**Largura (cm): 54**  
**Altura (cm): 78,5-88,5**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03791**  
**Comprimento (cm): 41**  
**Largura (cm): 49**  
**Altura (cm): 38,5-54**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03772L**  
**Comprimento (cm): 41**  
**Largura (cm): 51**  
**Altura (cm): 42-58**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03784LQ**  
**Comprimento (cm): 51**  
**Largura (cm): 56,5**  
**Altura (cm): 80,5-88,5**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY076010**  
**Comprimento (cm): 55**  
**Largura (cm): 58**  
**Altura (cm): 57,5-67,5**  
**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03788L**  
**Comprimento (cm): 42,5**  
**Largura (cm): 49,5**  
**Altura (cm): 45-55**  
**Carga máx (kg): 80**



**Modelo: DY037981L**

**Comprimento (cm): 45**

**Largura (cm): 55,5**

**Altura (cm): 57,5-67,5**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY037920L**

**Comprimento (cm): 32**

**Largura (cm): 38**

**Altura (cm): 44-45**

**Carga máx (kg): 80**

**Modelo: DY03786L**

**Comprimento (cm): 51**

**Largura (cm): 56**

**Altura (cm): 45-55**

**Carga máx (kg): 80**

---

## **MECANISMO DE AÇÃO**

A cadeira de banho funciona como um dispositivo de apoio que proporciona segurança, estabilidade e conforto durante o banho de pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, pacientes ou pessoas com deficiência. Seu mecanismo de ação é passivo, oferecendo uma estrutura resistente à água, com assento perfurado para drenagem.

---

## **ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local seco e ventilado. Evite colocá-lo em ambientes com alta temperatura ou variações bruscas de temperatura. O produto deve ser mantido isolado de substâncias quimicamente corrosivas, como ácidos e bases.

---



## **TRANSPORTE**

A cadeira de banho deve ser transportada em embalagem adequada, protegida contra impactos, umidade e sujeira.

Recomenda-se que seja levada desmontada ou com partes recolhidas, sempre fixada no veículo para evitar danos. Não deve ser empilhada com objetos pesados nem exposta a calor excessivo, luz solar direta ou produtos químicos.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem de caixa de papelão.

---

## **CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO**

Antes de usar, ajuste a cadeira de banho para uma altura adequada e certifique-se de que as quatro pernas estejam firmemente apoiadas no chão;

Verifique se o encosto e os apoios de braço estão firmemente instalados e se não há qualquer oscilação durante o uso.

Por favor, sente-se no centro da cadeira de banho durante a utilização;

Ajuste a altura da cadeira de banho de acordo com a altura do usuário. Ao ajustar, pressione a esfera de ajuste localizada na perna da cadeira e regule para a altura desejada. Quando ouvir um "clique", a esfera terá se encaixado;

No caso do modelo com freio: para acionar o freio, pressione levemente o botão do freio para baixo; para destravar, pressione levemente a fenda da articulação.

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Não é necessária.

---

## **REQUISITOS DE MANUTENÇÃO**

Para uma limpeza completa e inspeção adequada após a higienização, abra a cadeira de banho antes de iniciar a limpeza.





Durante a limpeza, utilize um pano embebido em detergente neutro diluído, torça-o e passe sobre a superfície. Em seguida, use um pano embebido em água limpa, torça-o e remova os resíduos de detergente. Por fim, seque com um pano seco.

Não utilize produtos voláteis na limpeza, como solventes, agentes voláteis, gasolina, entre outros, pois podem causar descoloração ou deterioração do material.

---

#### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Não lavar com um jato de água pressurizada.

**PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

---

#### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não se aplica.

---

#### **VALIDADE**

**3 ANOS**

---

#### **DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO**

Comprimento (mm): 320 mm a 900 mm

Largura (mm): 320 mm a 720 mm

Altura (mm): 385 mm a 900 mm

---

**Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA**

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.



**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- **Nº 82696710030**