



CURATIVO ADESIVO NÃO TECIDO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Adesivo sensível à pressão, almofada absorvente, não tecido e papel de liberação.

FINALIDADE DE USO

O Curativo adesivo não tecido é composto por adesivo, tecido não tecido, almofada absorvente e papel de liberação.

O produto protege feridas e incisões cirúrgicas ao aderir à pele com uma camada de adesivo médico, enquanto um absorvente central cobre o local da lesão para absorver exsudatos. A estrutura em não tecido permite troca gasosa (alta permeabilidade ao vapor de água), ajudando na cicatrização, e o curativo é esterilizado com óxido de etileno para garantir segurança microbiológica.

MODELOS COMERCIAIS

ZD/BGEcare:

NI0001 - 5x5cm

NI0002 - 7,2x5cm

NI0003 - 8,3x6cm

NI0008 - 10x12cm

NI0014 - 15x15cm

NI0015 - 18,75x15cm

NI0016 - 12x8,25cm

NI0017 - 18x8,25cm

NI0018 - 25x8,25cm

NI0020 - 6x9cm

NI0021 - 6x7cm

NI0022 - 6x15cm

NI0023 - 9x15cm

NI0025 - 20x8cm

NI0027 - 17,8x15cm

NI0028 - 15x20cm

NI0029 - 6x4,8cm

NI0030 - 7,3x5,7cm

NI0031 - 9,5x6,5cm

GBTEX:



GBNI0001 - 5x5cm

GBNI0002 - 7,2x5cm

GBNI0003 - 8,3x6cm

GBNI0008 - 10x12cm

GBNI0014 - 15x15cm

GBNI0015 - 18,75x15cm

GBNI0016 - 12x8,25cm

GBNI0017 - 18x8,25cm

GBNI0018 - 25x8,25cm

GBNI0020 - 6x9cm

GBNI0021 - 6x7cm

GBNI0022 - 6x15cm

GBNI0023 - 9x15cm

GBNI0025 - 20x8cm

GBNI0027 - 17,8x15cm

GBNI0028 - 15x20cm

GBNI0029 - 6x4,8cm

GBNI0030 - 7,3x5,7cm

GBNI0031 - 9,5x6,5cm

MODO DE USO

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**



2. Retirar o papel da embalagem e retirar o produto.
3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.
4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.
5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco, bem ventilado, limpo e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

TRANSPORTE

Evitar umidade, choques mecânicos e exposição prolongada ao calor durante o transporte.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado por Óxido de Etileno.



VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA



- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710009**