



## **CURATIVO FILME TRANSPARENTE HIGH MVTR (A, B, C)**

### **PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

Adesivo sensível a pressão, filme de PU, papel suporte, papel de descolamento, fita (opcional).

---

### **FINALIDADE DE USO**

O curativo de filme transparente High MVTR é usado para fixar a área perfurada pelas agulhas de injeção e fornecer proteção.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

ZD/BGEcare:

High MVTR (A)

HM0024 - 4 x 5cm

HM0025 - 6 x 7cm

HM0026 - 6 x 9cm

HM0027 - 6 x 10cm

HM0028 - 10 x 12cm



**HM0029 - 10 x 14cm**

**HM0030 - 10 x 20cm**

**HM0031 - 15 x 20cm**

**HM0032 - 10 x 25cm**

**HM0033 - 6 x 7cm**

**HM0034 - 10 x 12cm**

**HM0035 - 12 x 12cm**

**HM0036 - 15 x 20cm**

**HM0102 - 15 x 20cm**

**HM0037 - 20 x 20cm**

**HM0038 - 20 x 30cm**

**HM0039 - 9 x 10cm**

**HM0040 - 9 x 15cm**

**HM0041 - 9 x 20cm**

**HM0042 - 9 x 30cm**

**HM0043 - 9 x 35cm**

**High MVTR (B)**

**HM0006 - 6 x 7cm**

**HM0007 - 6 x 9cm**

**HM0008 - 6 x 10cm**

**HM0009 - 10 x 12cm**

**HM0010 - 10 x 14cm**

**HM0011 - 10 x 20cm**

**HM0012 - 15 x 20cm**

**HM0013 - 10 x 25cm**

**HM0014 - 6 x 7cm**

**HM0015 - 10 x 12cm**

**HM0016 - 12 x 12cm**

**HM0017 - 15 x 20cm**



**HM0018 - 10 x 11,5cm**

**HM0019 - 4 x 5cm**

**HM0020 - 6 x 7cm**

**HM0021 - 7 x 9cm**

**HM0022 - 6 x 7cm**

**HM0023 - 6 x 7cm**

**HM0044 - 7,2 x 5cm**

**HM0045 - 6 x 7cm**

**HM0046 - 10 x 6cm**

**HM0047 - 9 x 6cm**

**HM0048 - 8 x 12cm**

**HM0049 - 10 x 12cm**

**HM0050 - 10 x 15cm**

**HM0051 - 9,5 x 8,5cm**

**HM0052 - 15,5 x 8,5cm**

**HM0053 - 10 x 20cm**

**HM0054 - 10 x 54cm**

**HM0055 - 10 x 30cm**

**HM0056 - 10 x 35cm**

**HM0057 - 12 x 8,25cm**

**HM0058 - 18 x 8,25cm**

**HM0059 - 25 x 8,25cm**

**HM0060 - 20 x 30cm**

**HM0061 - 6 x 8cm**

**HM0062 - 5,3 x 7cm**

**HM0063 - 5,3 x 8cm**

**HM0064 - 7,3 x 8cm**

**HM0065 - 10 x 7cm**

**HM0066 - 10 x 9cm**

**HM0067 - 10 x 12cm**



**HM0068 - 12 x 9cm**

**HM0069 - 15 x 9cm**

**HM0070 - 20 x 9cm**

**HM0071 - 25 x 9cm**

**HM0072 - 30 x 9cm**

**High MVTR (C)**

**HM0099 - 5 x 4cm**

**HM0001 - 6 x 7cm**

**HM0003 - 10 x 12cm**

**GBTEX:**

**High MVTR(A)**

**GBHM0024 – 4 x 5cm**

**GBHM0025 – 6 x 7cm**

**GBHM0026 – 6 x 9cm**

**GBHM0027 – 6 x 10cm**

**GBHM0028 – 10 x 12cm**

**GBHM0029 – 10 x 14cm**

**GBHM0030 – 10 x 20cm**

**GBHM0031 – 15 x 20cm**

**GBHM0032 – 10 x 25cm**

**GBHM0033 – 6 x 7cm**

**GBHM0034 – 10 x 12cm**

**GBHM0035 – 12 x 12cm**

**GBHM0036 – 15 x 20cm**

**GBHM0102 – 15 x 20cm**

**GBHM0037 – 20 x 20cm**

**GBHM0038 – 20 x 30cm**

**GBHM0039 – 9 x 10cm**

**GBHM0040 – 9 x 15cm**



**GBHM0041 – 9 x 20cm**

**GBHM0042 – 9 x 30cm**

**GBHM0043 – 9 x 35cm**

**High MVTR (B)**

**GBHM0006 – 6 x 7cm**

**GBHM0007 – 6 x 9cm**

**GBHM0008 – 6 x 10cm**

**GBHM0009 – 10 x 12cm**

**GBHM0010 – 10 x 14cm**

**GBHM0011 – 10 x 20cm**

**GBHM0012 – 15 x 20cm**

**GBHM0013 – 10 x 25cm**

**GBHM0014 – 6 x 7cm**

**GBHM0015 – 10 x 12cm**

**GBHM0016 – 12 x 12cm**

**GBHM0017 – 15 x 20cm**

**GBHM0018 – 10 x 11,5cm**

**GBHM0019 – 4 x 5cm**

**GBHM0020 – 6 x 7cm**

**GBHM0021 – 7 x 9cm**

**GBHM0022 – 6 x 7cm**

**GBHM0023 – 6 x 7cm**

**GBHM0044 – 7,2 x 5cm**

**GBHM0045 – 6 x 7cm**

**GBHM0046 – 10 x 6cm**

**GBHM0047 – 9 x 6cm**

**GBHM0048 – 8 x 12cm**

**GBHM0049 – 10 x 12cm**

**GBHM0050 – 10 x 15cm**



**GBHM0051 – 9,5 x 8,5cm**

**GBHM0052 – 15,5 x 8,5cm**

**GBHM0053 – 10 x 20cm**

**GBHM0054 – 10 x 54cm**

**GBHM0055 – 10 x 30cm**

**GBHM0056 – 10 x 35cm**

**GBHM0057 – 12 x 8,25cm**

**GBHM0058 – 18 x 8,25cm**

**GBHM0059 – 25 x 8,25cm**

**GBHM0060 – 20 x 30cm**

**GBHM0061 – 6 x 8cm**

**GBHM0062 – 5,3 x 7cm**

**GBHM0063 – 5,3 x 8cm**

**GBHM0064 – 7,3 x 8cm**

**GBHM0065 – 10 x 7cm**

**GBHM0066 – 10 x 9cm**

**GBHM0067 – 10 x 12cm**

**GBHM0068 – 12 x 9cm**

**GBHM0069 – 15 x 9cm**

**GBHM0070 – 20 x 9cm**

**GBHM0071- 25 x 9cm**

**GBHM0072 – 30 x 9cm**

**High MVTR (C)**

**GBHM0099 – 5 x 4cm**

**GBHM0001 – 6 x 7cm**

**GBHM0003 – 10 x 12cm**

---

**MODO DE USO**



1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.
2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.
3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.
4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.
5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

---

## **ARMAZENAMENTO**

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

---

## **TRANSPORTE**

Transportado em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Esterilização por Óxido de Etileno.

---

## **VALIDADE**

5 anos.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Verifique a embalagem antes do uso.



**Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.**

**Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.**

**Se ocorrerem irritações como eritema ou coceira, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.**

**Substitua o curativo se houver grande quantidade de exsudato.**

**A reutilização pode causar contaminação cruzada.**

**Não reutilizar nem reesterilizar.**

**PRODUTO DESCARTÁVEL**

**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**REPROCESSAMENTO PROIBIDO**

**Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.**

---

**Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. INDÚSTRIA CHINESA**

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- Nº 82696710020