



# **CURATIVO FILME TRANSPARENTE HIGH MVTR REFORÇADO (A, B)**

## **PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

## **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

## **COMPOSIÇÃO**

Adesivo sensível a pressão, filme de PU, filme suporte, papel de descolamento, fita e não tecido.

---

## **FINALIDADE DE USO**

O curativo de filme transparente High MVTR Reforçado é usado para fixar a área perfurada pelas agulhas de injeção e fornecer proteção.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

---

## **MODELOS COMERCIAIS**

**ZD**

**High MVTR Reforçado (A)**

**HM0100 - 5 x 6cm**

**HM0002 - 7 x 9cm**



**HM010 - 11 x 14cm**

**HM0004 - 9 x 12cm**

**High MVTR Reforçado (B)**

**HR0001 - 7 x 8,5cm**

**HR0002 - 8,5 x 10,5cm**

**HR0003 - 5 x 5,7cm**

**HR0004 - 10 x 15,5cm**

**HR0005 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0006 - 9 x 10,5cm**

**HR0007 - 6 x 7cm**

**HR0008 - 10 x 12cm**

**HR0009 - 11 x 15cm**

**HR0010 - 6,5 x 7cm**

**HR0011 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0012 - 10 x 15cm**

**HR0013 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0014 - 10 x 12cm**

**HR0015 - 7 x 9cm**

**HR0016 - 6,5 x 7cm**

**HR0017 - 7 x 8,5cm**

**BGEcare**

**High MVTR Reforçado (A)**

**HM0100 - 5 x 6cm**

**HM0002 - 7 x 9cm**

**HM010 - 11 x 14cm**

**HM0004 - 9 x 12cm**

**High MVTR Reforçado (B)**



**HR0001 - 7 x 8,5cm**

**HR0002 - 8,5 x 10,5cm**

**HR0003 - 5 x 5,7cm**

**HR0004 - 10 x 15,5cm**

**HR0005 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0006 - 9 x 10,5cm**

**HR0007 - 6 x 7cm**

**HR0008 - 10 x 12cm**

**HR0009 - 11 x 15cm**

**HR0010 - 6,5 x 7cm**

**HR0011 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0012 - 10 x 15cm**

**HR0013 - 8,5 x 11,5cm**

**HR0014 - 10 x 12cm**

**HR0015 - 7 x 9cm**

**HR0016 - 6,5 x 7cm**

**HR0017 - 7 x 8,5cm**

## **GBTEX**

### **High MVTR Reforçado (A)**

**GBHM0100 – 5 x 6cm**

**GBHM0002 – 7 x 9cm**

**GBHM0101 – 11 x 14cm**

**GBHM0004 – 9 x 12cm**

### **High MVTR Reforçado (B)**

**GBHR0001 – 7 x 8,5cm**

**GBHR0002 - 8,5 x 10,5cm**

**GBHR0003 – 5 x 5,7cm**



**GBHR0004 – 10 x 15,5cm**

**GBHR0005 – 8,5 x 11,5cm**

**GBHR0006 – 9 x 10,5cm**

**GBHR0007 – 6 x 7cm**

**GBHR0008 – 10 x 12cm**

**GBHR0009 – 11 x 12cm**

**GBHR0010 – 6,5 x 7cm**

**GBHR0011 – 8,5 x 11,5cm**

**GBHR0012 – 10 x 15cm**

**GBHR0013 – 8,5 x 11,5cm**

**GBHR0014 – 10 x 12cm**

**GBHR0015 – 7 x 9cm**

**GBHR0016 – 6,5 x 7cm**

**GBHR0017 – 7 x 8,5cm**

---

## **MODO DE USO**

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**
- 2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.**
- 3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.**
- 4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.**
- 5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°**

---

## **ARMAZENAMENTO**

**Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.**



---

## **TRANSPORTE**

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Esterilização por Óxido de Etileno.

---

## **VALIDADE**

5 anos.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema ou coceira, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Não reutilizar nem reesterilizar.

**PRODUTO DESCARTÁVEL**

**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**REPROCESSAMENTO PROIBIDO**

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

---

**Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. INDUSTRIA CHINESA**



Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- Nº 82696710018