



CURATIVO FILME TRANSPARENTE ISLAND A

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Adesivo, filme PU, papel antiaderente, almofada e fita.

FINALIDADE DE USO

O Curativo Island A é destinado à absorção de exsudatos de feridas, proteção da ferida e fixação de agulhas clínicas e cateteres.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

Marca ZD/BGEcare:

PI0001 – 7,2 x 5cm

PI0002 – 6 x 7cm

PI0003 – 10 x 6cm

PI0004 – 9 x 6cm

PI0005 – 10 x 12cm



PI0006 – 10 x 15cm

PI0007 – 9,5 x 8,5cm

PI0008 – 15,5 x 8,5cm

PI0009 – 10 x 20cm

PI0010 – 10 x 25cm

PI0011 – 10 x 30cm

PI0012 – 10 x 35cm

PI0013 – 12 x 8,25cm

PI0014 – 18 x 8,25cm

PI0015 – 25 x 8,25cm

PI0016 – 5,3 x 7cm

PI0017 – 5,3 x 8cm

PI0018 – 7,3 x 8cm

PI0019 – 10 x 7cm

PI0020 – 10 x 9cm

PI0021 – 10 x 12cm

PI0022 – 12 x 9cm

PI0023 – 15 x 9cm

PI0024 – 20 x 9cm

PI0025 – 25 x 9cm

PI0026 – 30 x 9cm

GBTEX:

GBPI0001 – 7,2 x 5cm

GBPI0002 – 6 x 7cm

GBPI0003 – 10 x 6cm

GBPI0004 – 9 x 6cm

GBPI0005 – 10 x 12cm

GBPI0006 – 10 x 15cm



GBPI0007 – 9,5 x 8,5cm

GBPI0008 – 15,5 x 8,5cm

GBPI0009 – 10 x 20cm

GBPI0010 – 10 x 25cm

GBPI0011 – 10 x 30cm

GBPI0012 – 10 x 35cm

GBPI0013 – 12 x 8,25cm

GBPI0014 – 18 x 8,25cm

GBPI0015 – 25 x 8,25cm

GBPI0016 – 5,3 x 7cm

GBPI0017 – 5,3 x 8cm

GBPI0018 – 7,3 x 8cm

GBPI0019 – 10 x 7cm

GBPI0020 – 10 x 9cm

GBPI0021 – 10 x 12cm

GBPI0022 – 12 x 9cm

GBPI0023 – 15 x 9cm

GBPI0024 – 20 x 9cm

GBPI0025 – 25 x 9cm

GBPI0026 – 30 x 9cm

MODO DE USO

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**
- 2. Retirar o papel da embalagem e retirar o produto.**
- 3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.**
- 4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.**



5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado com Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.



PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. INDUSTRIA CHINESA

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- N°