



CURATIVO FILME TRANSPARENTE ISLAND B

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Adesivo, filme PU, papel antiaderente, almofada e fita.

FINALIDADE DE USO

O Curativo Island B é destinado à absorção de exsudatos de feridas, proteção da ferida e fixação de agulhas clínicas e cateteres.

Funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

Marca ZD/BGEcare:

TI0001 – 4 x 5cm

TI0002 – 6 x 7cm

TI0003 – 6 x 9cm

TI0004 – 6 x 10cm

TI0005 – 10 x 12cm

TI0006 – 15 x 20cm

TI0007 – 10 x 25cm

TI0008 – 9 x 10cm

TI0009 – 9 x 15cm

TI0010 – 9 x 20cm

TI0011 – 9 x 30cm

TI0012 – 9 x 35cm

Marca GBTEX:

GBTI0001 – 4 x 5cm

GBTI0002 – 6 x 7cm

GBTI0003 – 6 x 9cm

GBTI0004 – 6 x 10cm

GBTI0005 – 10 x 12cm

GBTI0006 – 15 x 20cm

GBTI0007 – 10 x 25cm

GBTI0008 – 9 x 10cm

GBTI0009 – 9 x 15cm

GBTI0010 – 9 x 20cm

GBTI0011 – 9 x 30cm

GBTI0012 – 9 x 35cm

MODO DE USO

- 1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.**
- 2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.**
- 3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.**
- 4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.**
- 5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°**

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado com Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO



REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD. INDUSTRIA CHINESA

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- N°