



CURATIVO FILME TRANSPARENTE TIPO I

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Fita destacável, adesivo, filme de PU, almofada absorvente, filme – PET, adesivo à base de solvente e papel de liberação.

FINALIDADE DE USO

Curativos de filme transparente são utilizados para aplicar sobre a pele em incisões cirúrgicas e cateteres arteriovenosos permanentes.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

MODELOS COMERCIAIS

ZD/BGEcare:

TDR1015 - 10 x 15cm

TDR0507 - 5 x 7cm

TDR1010 - 10 x 10cm

TDR1025 - 10 x 25cm

TDR0405 - 4 x 5cm



TDR7510 - 7,5 x 10cm

TDR1020 - 10 x 20cm

TDR1030 - 10 x 30cm

TDR2030 - 20 x 30cm

GBTEX:

GBTDR1015 - 10 x 15cm

GBTDR0507 - 5 x 7cm

GBTDR1010 - 10 x 10cm

GBTDR1025 - 10 x 25cm

GBTDR0405 - 4 x 5cm

GBTDR7510 - 7,5 x 10cm

GBTDR1020 - 10 x 20cm

GBTDR1030 - 10 x 30cm

GBTDR2030 - 20 x 30cm

MODO DE USO

1. Limpar e esterilizar a área da ferida ou local de aplicação.
2. Retirar o papel da embalagem e retire o produto.
3. Remover o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixar o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remover o papel de liberação do outro lado.
4. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.
5. Remover suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

ARMAZENAMENTO



Armazenar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.

TRANSPORTE

Transportar em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado por Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.



Fabricante: Zhende Medical Co.,LTD. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710010**