

Manual - Curativo adesivo de não tecido.

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

Especificações Técnicas

Código - tamanho • 1 - 6 × 7 cm • 2 - 6 × 10 cm • 3 - 6 × 12 cm • 4 - 8 × 10 cm • 5 - 8 × 15 cm • 6 - 9 × 10 cm • 7 - 10 × 15 cm • 8 - 10 × 20 cm • 9 - 10 × 25 cm • 10 - 10 × 30 cm • 11 - 10 × 35 cm • 12 - 15 × 10 cm • 13 - 15 × 20 cm • 14 - 15 × 25 cm • 16 - 15 × 30 cm • 17 - 15 × 35 cm

- Embalagem primária: envelope individual estéril composto por papel grau cirúrgico e filme plástico laminado, que garante a integridade e a esterilidade do curativo até o momento do uso.

- Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo, geralmente, 50 envelopes individuais. A caixa externa é rotulada com as informações do produto (nome, tamanho, lote, validade, modo de armazenamento, entre outras). Peso da almofada absorvente: Pode ser de 150±30 g/m², 200±50 g/m² ou 250±50 g/m².


Deslocamento da almofada absorvente: Disponível com ou sem almofada absorvente.

A almofada absorvente está localizada no centro da aplicação de tecido não tecido, e a diferença de posicionamento pode ser personalizada. A superfície do produto é livre de danos, sujeira e detritos, sendo lisa e sem rugas. Itens e Critérios:

- Força de adesão: ≥ 1 N/cm
- Permanência da adesividade: ≥ 5 minutos
- Tamanho do produto: variação permitida de $\pm 0,5$ cm
- Tamanho da almofada: variação permitida de $\pm 0,2$ cm

Descrição

O produto protege feridas e incisões cirúrgicas ao aderir à pele com uma camada de adesivo médico, enquanto um absorvente central cobre o local da lesão para absorver



exsudatos. A estrutura em não tecido permite troca gasosa (alta permeabilidade ao vapor de água), ajudando na cicatrização, e o curativo é esterilizado com óxido de etileno para garantir segurança microbiológica.

Finalidade de uso

Os curativos adesivos não tecidos são usados para aplicar sobre incisões cirúrgicas e cateteres arteriovenosos permanentes.

Como Usar

- Higienizar e secar a pele ao redor da ferida.
 - Abrir a embalagem e retirar o curativo.
 - Posicionar a parte central adesiva sobre a ferida.
 - Remover o papel protetor e pressionar suavemente as bordas para fixação completa.
-

Armazenamento

Conservar em local seco, bem ventilado, limpo e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

Transporte

Evitar umidade, choques mecânicos e exposição prolongada ao calor durante o transporte.

Precauções de Segurança:

- Este produto é estéril e de uso único.
- Não reutilize. A reutilização pode resultar em infecção ou perda de desempenho do produto.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta, pois isso compromete a esterilidade.
- Utilize imediatamente após a abertura da embalagem.

Outros cuidados:

- Use com cuidado em pacientes com pele sensível ou histórico de reações alérgicas a adesivos médicos.
- Evite o uso contínuo prolongado no mesmo local sem supervisão clínica, pois pode causar irritação.
- Armazene em local seco, ventilado, longe da luz solar direta, calor excessivo e produtos químicos.
- Descarte o produto após o uso de acordo com os regulamentos locais de resíduos hospitalares.
- O produto não deve ser reesterilizado.

Fabricante: Zhende Medical Co., Ltd.

Endereço: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
 - Rua Joaquim Mendes 1726 -Jardim Carlos Gomes Pirassununga - SP – Brasil, CEP: 13633-037
- SAC: sac@mvw.com.br
- Site: www.mvwonline.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira CRQ IV – 04366291

Registro ANVISA: Processo: 25351.086043/2025-81; Nº 82696710008