



## **GEL DE SILICONE PARA CICATRIZES - ALEXER**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

O produto é composto por silicone médico, utilizado como substância ativa e componente principal da formulação, presente na concentração de 100% da fase funcional do gel, acondicionado em tubo alumínio-plástico.

---

### **FINALIDADE DE USO**

Auxílio na prevenção e tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloides em pele íntegra, após fechamento completo da ferida.

Não indicado para feridas abertas nem para queimaduras de 2º grau profundas ou de 3º grau, que cicatrizam por segunda intenção.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

#### **GEL DE SILICONE PARA CICATRIZES - ALEXER**

Tamanhos disponíveis:

- 3g/Tubo,
- 5g/Tubo,
- 7g/Tubo,
- 10g/Tubo,
- 15g/Tubo,
- 20g/Tubo,
- 25g/Tubo,
- 30g/Tubo,



- 40g/Tubo,
- 50g/Tubo,
- 60g/Tubo,
- 120g/Tubo

Gel de silicone incolor, transparente, inodoro, com consistência viscosa homogênea, livre de partículas visíveis, destinado à aplicação tópica sobre a pele, não estéril, destinado exclusivamente ao uso externo, não indicado para aplicação em feridas abertas ou áreas com inflamação ativa, minimizando riscos microbiológicos associados.

**Composição embalagem:**

**Primária(tubo):** alumínio-plástico,

**Secundária:** caixa cartonada

**Terciária:** caixa de papelão

---

## **MODO DE USO**

Este produto deve ser utilizado após o fechamento da ferida ou após a cicatrização.

**Antes do uso:**

1. Limpe a área da cicatriz;
2. Aplique uma quantidade adequada do gel de silicone para cicatrizes sobre a cicatriz e massageie suavemente; utilize de duas a quatro vezes ao dia ou conforme orientação médica.

É recomendável o uso logo após queimaduras, traumas ou cirurgias.

---

## **ARMAZENAMENTO**

Recomenda-se armazenar em um ambiente fresco, seco, ventilado e livre de gases corrosivos, afastado de fontes de calor, fogo e materiais combustíveis.

---



## **TRANSPORTE**

Recomenda-se transportar em um ambiente fresco, seco, ventilado e livre de gases corrosivos, afastado de fontes de calor, fogo e materiais combustíveis.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado 1 unidade por caixa; 25 unidades por caixa intermediária; 20 caixas intermediárias por caixa master.

---

## **VALIDADE**

3 anos.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Manter afastado da luz solar

Este produto é de uso exclusivamente externo, não é comestível.

Em caso de reação alérgica (erupção, coceira ou qualquer desconforto) durante o uso, interrompa a aplicação ou procure atendimento médico imediatamente.

Caso haja tratamento de ferimentos próximo à área de uso, utilize o produto sob orientação médica. O paciente deve retornar ao hospital para acompanhamento.

Pode ser limpo e removido com detergente neutro ou limpador de pele comum.

Mantenha a tampa do tubo bem fechada quando não estiver em uso e armazenar em temperatura ambiente, fora do alcance de crianças.

Este produto é inflamável — manter afastado de fontes de calor, faíscas, chamas abertas ou superfícies quentes. Não fumar durante o uso do produto.

Crianças devem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.

**PRODUTO DESCARTÁVEL**

**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**REPROCESSAMENTO PROIBIDO**



**Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.**

---

**Fabricante: SLK Medical Material (Tianchang) Co., Ltd. INDUSTRIA CHINESA**

**Endereço: Nº 33, Zhenglong Road, Parque Industrial de Qinlan Town, Cidade de Tianchang, Província de Anhui, 239300, China**

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- **Nº 82696710040**