



MÁSCARA CPAP

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

As máscaras são constituídas pela combinação de PEAD (polietileno de alta densidade), poliéster, silicone, PC (policarbonato) e PVC (policloreto de vinila).

FINALIDADE DE USO

As máscaras CPAP são comumente utilizadas em pacientes com dificuldade de respiração espontânea ou com síndrome da apneia obstrutiva do sono grave. Consiste no envio de fluxo de ar com pressão positiva contínua para as vias aéreas por meio do uso de uma máscara enquanto o paciente dorme. O princípio é aumentar a pressão nas vias aéreas para mantê-las pérvias.

Os diferentes modelos são indicados para diferentes pessoas, de acordo com a prescrição médica, por exemplo, apneia obstrutiva do sono.

As máscaras CPAP são adequadas para sistemas de ventiladores com válvulas de exaustão ativa. Fornecem um dispositivo de interface para conexão ao CPAP e BIPAP para pacientes adultos. Podem ser posicionadas no rosto do paciente, proporcionando vedação boca-nariz ou apenas nariz. A máscara pode ser fixada à cabeça do paciente com componentes de fixação.



MODELOS COMERCIAIS

MÁSCARA CPAP

- Máscara CPAP de Silicone,

Tamanhos: G, M, P

Material da embalagem: saco plástico

- Máscara CPAP de PVC,

Tamanhos: P, M, G

Material da embalagem: saco de PE (polietileno)

- Máscara Nasal,

Tamanhos: P, M, G

Material da embalagem: saco plástico

- Almofada Nasal,

Tamanhos: P, M, G

Material da embalagem: caixa de papel-cartão

MODO DE USO

- 1. Retire a máscara CPAP da embalagem.**
- 2. Prenda o arnês (tira de cabeça) ao anel ou aos ganchos da máscara.**
- 3. Segure a base da máscara com uma mão e, com a outra, estenda o arnês apenas o suficiente para colocá-lo confortavelmente sobre a cabeça.**
- 4. Posicione levemente a máscara no rosto e ajuste o arnês sobre a cabeça.**
- 5. Ajuste suavemente as tiras para que a máscara fique confortável e bem vedada ao rosto.**
- 6. Conecte a mangueira do aparelho de CPAP, operando na pressão prescrita, à máscara.**



7. Se necessário, conecte a fonte de oxigênio ou o dispositivo de medição de pressão à porta lateral no conector em “cotovelo” da máscara.

ARMAZENAMENTO

Armazenar ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

Transportar ao abrigo de luz, calor e variações climáticas.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade por embalagem.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Operação

1. Remova a embalagem plástica da máscara CPAP.
2. Prenda a tira superior ao anel/gancho da máscara.
3. Segure a base da máscara com uma mão e, com a outra, expanda o arnês (headgear) apenas o suficiente para colocá-lo confortavelmente sobre a cabeça.
4. Posicione levemente a máscara no rosto e ajuste o arnês sobre a cabeça.
5. Ajuste suavemente as tiras horizontais superiores para que a máscara fique confortável e firmemente vedada ao rosto.
6. Ajuste suavemente as tiras superiores (tipo coroa) conforme necessário.
7. Conecte a mangueira do aparelho de CPAP, operando na pressão prescrita, à máscara.
8. Se necessário, conecte a fonte de oxigênio ou o dispositivo de medição de pressão à porta lateral no conector em “cotovelo” da máscara.

Limpeza

Antes de cada uso:



- Inspeção a máscara quanto a sinais de deterioração. Não utilize se parecer envelhecida ou danificada.

Após cada uso:

1. Desmonte a máscara e o arnês.
2. Lave a máscara e o arnês em água morna com sabão e enxágue em água corrente limpa.
3. Mantenha-os secos e ao abrigo da luz solar direta.

ESTERILIZAÇÃO

Não se aplica.

VALIDADE

3 ANOS.

CONTRAINDICAÇÕES

Não é recomendado o uso de máscara CPAP por pacientes inconscientes, não colaborativos ou extremamente ansiosos; com trauma ou queimaduras envolvendo a face; com náuseas intensas e vômitos; ou quando houver necessidade imediata de intubação.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Para garantir a segurança e o conforto contínuos da sua máscara CPAP:

- NÃO lave a máscara na lava-louças.
- NÃO limpe a máscara com álcool, cloro ou água sanitária.

1. Esta máscara não é adequada para ventilação de suporte à vida.



2. Esta máscara foi projetada para uso com sistemas CPAP ou Bi-level (BiPAP) conforme recomendado por seu profissional de saúde ou fisioterapeuta respiratório.

3. Não utilize esta máscara a menos que o sistema CPAP ou Bi-level esteja ligado e funcionando corretamente.

4. Não obstrua nem tente vedar a porta de exalação.

5. Se oxigênio suplementar for utilizado com o dispositivo, o fluxo de oxigênio deve ser desligado quando o dispositivo não estiver em operação.

6. Observação: Quando o dispositivo está desligado e o fluxo de oxigênio permanece ligado, pode ocorrer acúmulo de oxigênio no interior do equipamento, o que aumenta o risco de incêndio. O oxigênio favorece a combustão. Não use oxigênio ao fumar ou na presença de chama aberta.

7. Em um fluxo fixo de oxigênio suplementar, a concentração de oxigênio inspirado pode variar conforme a pressão, as configurações, o padrão respiratório do paciente, o tipo de máscara e a taxa de vazamento. Este alerta se aplica à maioria dos sistemas CPAP e Bi-level.

8. Em pressões baixas de CPAP ou BiPAP, o fluxo pela porta de exalação pode ser insuficiente para remover todo o gás exalado do circuito. Pode ocorrer reinalação parcial.

9. O médico do paciente deve ser contatado se ocorrerem, durante o uso da máscara ou após sua remoção, quaisquer dos seguintes sintomas: desconforto torácico incomum, falta de ar, distensão abdominal, arroto, dor de cabeça intensa, ressecamento dos olhos, dor ocular, infecções oculares ou visão turva.

(Consulte um médico se os sintomas persistirem.)

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.



Fabricante: NINGBO HANYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: No. 8 Yugong Road, Ertang Industrial Zone, Zonghan Street, Cixi City, China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- N° 82696719004