



ROLO DE CURATIVO DE POLIURETANO

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Os rolos de curativo do tipo película transparente são constituídos por uma camada de reforço, uma camada de suporte, uma camada adesiva e uma camada de descolagem. As camadas de reforço são materiais de reforço coloridos, como a película de PP. A camada de suporte é feita de material polimérico com libertação, como a película de libertação PET. A camada adesiva é constituída por uma película de PU ou TPU revestida com um adesivo sensível à pressão. A camada de descolagem é feita de um material de libertação, tal como papel de libertação.

FINALIDADE DE USO

Os rolos de curativo de poliuretano são adequados para a fixação e cuidados pós-operatórios de feridas, fixação de pensos, agulhas, cateteres etc.

O rolo de curativo de poliuretano funciona como um dispositivo de fixação, composto por uma película de PU/TPU revestida com adesivo sensível à pressão, associado a camadas de suporte e de libertação que permitem sua aplicação adequada. Seu mecanismo de ação baseia-se na aderência mecânica direta à pele: após o corte no comprimento necessário, o material é aplicado sobre a área desejada e suavemente pressionado para garantir fixação estável. Dessa forma, possibilita a imobilização de curativos, pensos, cateteres e outros dispositivos médicos, promovendo proteção, manutenção da posição e segurança durante o



período de uso, sem exercer ação farmacológica, imunológica ou metabólica sobre o organismo.

MODELOS COMERCIAIS

A2PR0001 - 5cmx10m

A2PR0002 - 10cmx10m

A2PR0003 - 15cmx10m

A2PR0012 - 5cm x 5m

A2PR0013 - 15cm x 5m

A2PR0014 - 20cm x 5m

A2PR0015 - 20cmx10m

COR: TRANSPARENTE

MODO DE USO

- 1. Abra a embalagem exterior e retire a fita adesiva.**
- 2. Corte a fita com o comprimento pretendido, fixe-a à pele e alise a fita à volta.**

ARMAZENAMENTO

Os produtos devem ser armazenados num local sem luz solar direta, ventilado e seco, e a uma temperatura adequada, e os produtos acabados não devem entrar em contato com gases corrosivos, substâncias tóxicas e perigosas, solventes orgânicos, radiação ionizante ou raios ultravioleta.

TRANSPORTE

Os produtos devem ser transportados num local sem luz solar direta, ventilado e seco, e a uma temperatura adequada, e os produtos acabados não devem entrar em contato com gases corrosivos, substâncias tóxicas e perigosas, solventes orgânicos, radiação ionizante ou raios ultravioleta.



CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 rolo por caixa.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilização por Óxido de Etileno.

VALIDADE

5 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A reutilização pode resultar em infecção ou perda de desempenho do produto.

Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta, pois isso compromete a esterilidade.

Utilize imediatamente após a abertura da embalagem.

Não utilizar fora do prazo de validade

Use com cuidado em pacientes com pele sensível ou histórico de reações alérgicas a adesivos médicos.

Evite o uso contínuo prolongado no mesmo local sem supervisão clínica, pois pode causar irritação.

Armazene em local seco, ventilado, longe da luz solar direta, calor excessivo e produtos químicos.

O produto não deve ser reesterilizado.

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Zhende Medical Co.,LTD. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA



- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710028**