



SCANBODY

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Todos os modelos possuem a mesma composição, obtendo nela:

- AL6061-T6 → Liga de alumínio 6061-T6
- SUS316L → Aço inoxidável 316L
- TC4ELI → Liga de titânio ti-6Al-4V ELI
- Silicone rubber → Borracha de silicone

FINALIDADE DE USO

O Scanbody foi projetado para fixação no implante. É uma peça destinada a obter informações exatas da posição do implante, a fim de transferi-las corretamente para o modelo 3D. O Scanbody é fornecido não esterilizado. Deve ser devidamente limpo e esterilizado pelos usuários antes do uso, de acordo com o guia de esterilização.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: HAFS-IFT

Dimensões disponíveis (mm): $15,6 \pm 0,05 \times 7 \pm 0,05 \times 11,1 \pm 0,05$;

Modelo: CS-A Series

Dimensões disponíveis (mm): $6 \pm 0,2 \times 5,2 \pm 0,2 \times 7,5 \pm 0,2$;



Modelo: CS-B Series

Dimensões disponíveis (mm): $4,8\pm0,1 \times 7,5\pm0,1$;

Modelo: HACS-IPG

Dimensões disponíveis (mm): $15,2\pm0,2 \times 6\pm0,2 \times 13\pm0,5$;

$20,2\pm0,2 \times 6\pm0,2 \times 13\pm0,5$;

$25,2\pm0,2 \times 6\pm0,2 \times 13\pm0,5$;

MODO DE USO

O Scanbody será reconhecido e escaneado por um Scanner Intraoral.

1. **Instalação:** Insira o parafuso no canal do parafuso do scanflag e gire-o para posicioná-lo.
2. **Remoção:** Empurre o parafuso pela parte inferior com o extrator de parafusos e gire-o para removê-lo.

ARMAZENAMENTO

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Umidade relativa: $30\%\pm3\%\text{UR} \sim 90\%\pm3\%\text{UR}$

Mantenha este dispositivo em local limpo e seco.

TRANSPORTE

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Umidade relativa: $30\%\pm3\%\text{UR} \sim 90\%\pm3\%\text{UR}$

Ao transportar, manuseie com cuidado. Não deixe cair nem pressione a embalagem.

ACESSÓRIOS

o Bolsa de armazenamento

o Scanbody

o Extrator de parafuso



- o Caixa de esterilização
- o Modelo de prática de implante
- o Guia rápido do Scanbody
- o Guia de esterilização
- o Certificado

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade por caixa.

ESTERILIZAÇÃO

Necessária a esterilização antes do uso, com os seguintes métodos:

1. Esterilização por deslocamento de gravidade: temperatura: 121°C; tempo de esterilização: 30 minutos; tempo de secagem: 30 min.
2. Esterilização por remoção dinâmica de ar: temperatura: 134°C; tempo de esterilização: 4 minutos; tempo de secagem: 30 minutos

VALIDADE

3 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Este produto só deve ser usado por dentistas ou técnicos de prótese dentária treinados.
2. O profissional assume a responsabilidade de usar este produto de acordo com as instruções. Manuseie o scanbody e as ferramentas auxiliares com cuidado, para evitar que o paciente os engula ou inale. Prenda as ferramentas auxiliares, quando necessário. Se o scanbody ou as ferramentas auxiliares forem engolidas ou inaladas acidentalmente, procure tratamento médico imediatamente.
3. Não desmonte nem modifique o Scanbody.



4. O parafuso deve ser apertado com a chave correspondente (torque de aperto recomendado: 10 N cm; Torque de aperto máximo: 15 N cm).
5. Não gire o Scanbody durante o escaneamento depois de ter sido instalado no implante.
6. O parafuso pode ser retirado e reinstalado para uso. Certifique-se de que ele corresponde à especificação do modelo do scanflag.
7. Um Scanbody esterilizado só pode ser usado para uma pessoa.
8. O Scanbody deve ser esterilizado. Como um item de consumo, substitua o Scanbody imediatamente após 300 vezes de autoclave.
9. Após a secagem, aguarde até que o Scanbody esfrie até a temperatura ambiente antes de retirá-lo para evitar queimaduras.
10. Antes da esterilização, coloque luvas cirúrgicas limpas.
11. Há titânio e alumínio no produto. Evite usar solução de limpeza sensível a este material.
12. Agentes oxidantes e agentes alcalinos fortes, como peróxido de hidrogênio e hidróxido de potássio, não podem ser usados para limpar o scanbody.
13. Não use água da torneira para limpar o scanbody, em vez disso, use água purificada.
14. Este produto não deve ser usado em pacientes alérgicos ou hipersensíveis a qualquer dos materiais incluídos neste produto.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shining 3D Tech Co., Ltd. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: No.1398 Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av. Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037



- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710037**