



## **SMARTCORD**

### **PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

- Fio de algodão 140 / 100 / 80 / 40.
- Agente corante preto / cinza / marrom / amarelo / roxo / roxo-claro / azul / azul-claro / verde / verde-claro.
- Comprimento: 305cm (120polegadas).

---

### **FINALIDADE DE USO**

O Smartcord é um cordão de retração tricotado, feito de 100% algodão, para retração gengival temporária. Ele é usado para auxiliar na moldagem de próteses fixas e também para deslocamento gengival antes de procedimentos de cimentação e/ou restauração.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

#### **Smartcord 04**

Descrição: O mais Fino

Espessura(mm): 0,50mm

Cor: Preto / Azul

#### **Smartcord 03**

Descrição: Ultrafino



**Espessura(mm): 0,70mm**

**Cor: Preto / Cinza**

**Smartcord 02**

**Descrição: Extrafino**

**Espessura(mm): 0,82mm**

**Cor: Marrom / Amarelo**

**Smartcord 0**

**Descrição: Fino**

**Espessura(mm): 0,99mm**

**Cor: Roxo / Roxo Claro**

**Smartcord 1**

**Descrição: Médio**

**Espessura(mm): 1,20mm**

**Cor: Azul / Azul Claro**

**Smartcord 2**

**Descrição: Grosso**

**Espessura(mm): 1,35mm**

**Cor: Verde / Verde Claro**

---

## **MODO DE USO**

- 1. Selecione um cordão com o diâmetro apropriado.**
- 2. Corte o cordão no comprimento necessário utilizando o EasyCut e o SmartRuler.**
- 3. Se necessário, o cordão pode ser impregnado com uma solução hemostática.**
- 4. Insira o cordão no sulco utilizando um empacotador de cordão de retração.**
- 5. Deixe o cordão por cerca de 5 minutos no sulco.**



6. Remova o cordão pouco antes de fazer a impressão. Umedeça ligeiramente o cordão para facilitar sua remoção e reduzir a hemorragia gengival. Pressionar o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remover os materiais descartáveis.

---

## **ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco e escuro, entre 1 e 30°C.

---

## **TRANSPORTE**

Transportar em ambiente seco e proteger da luz solar.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Não esterilizado.

---

## **VALIDADE**

Indeterminado.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Verifique as condições do tecido gengival (por exemplo, profundidade ou espessura).

Uso profissional exclusivo.

Para evitar um possível deslocamento permanente da gengiva, o cordão não deve permanecer por mais de 20 minutos no sulco.

Após concluir o procedimento, certifique-se de remover o cordão do sulco.

A embalagem deve ser fechada imediatamente após o uso.

Manusear com mãos limpas e secas



**PRODUTO DE USO ÚNICO**

**REPROCESSAMENTO PROIBIDO**

**Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.**

---

**Fabricante: EASTDENT CO., LTD. INDÚSTRIA COREANA**

Endereço: 601-1, 64, GUGAL-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI,  
GYEONGGI-DO – CORÉIA DO SUL

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- **Nº 82696710027**