



Manual – CURATIVO FILME ISLAND COMPOSTO

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

Especificações Técnicas

Aparência:

Os produtos devem estar limpos e livres de contaminação, rugas ou danos. As especificações devem estar corretas. O revestimento deve ser completo. O corte deve estar na posição correta. As bordas devem estar alinhadas e com corte limpo.

Dimensão:

A forma e o tamanho podem ser personalizados de acordo com os requisitos aplicáveis. O escopo aplicável é comprimento de 3 a 50 cm e largura de 0,5 a 30 cm.

Desempenho técnico do produto:

•Força de Descolamento (Peel Strength):

Superior a 1,0 N/cm, conforme norma ASTM D3330-04 (2018). O curativo cumpre esse requisito.

•Aderência ao Cisalhamento (Shear Adhesion):

Inferior a 2,5 mm, de acordo com a norma ASTM D 3654M:06 (2019). O curativo está em conformidade.

•Taxa de Transmissão de Vapor de Umidade (Moisture Vapour Transmission Rate):

Superior a 500 g/(m²·24h), conforme norma EN13726-2:2002. O curativo atende a essa exigência.

Esterilização feita com Óxido de etileno.

Descrição

Curativo composto por adesivo, filme PU, papel antiaderente, almofada e fita.

A composição química da embalagem primária é: papel e filme de PE/PET.

A embalagem externa é feita de papelão ondulado.

A embalagem secundária é composta por papel cartão branco de 350 g/m².



•A embalagem primária é formada por papel couchê quadriculado de 68 g/m² e filme transparente laminado PE/PET de 55 g/m².

Cada unidade é embalada em 1 peça por sachê, com múltiplos sachês por caixa e várias caixas por cartonagem externa.

Finalidade de uso

O Curativo Island (Island Dressing) é destinado à absorção de exsudatos de feridas, proteção da ferida e fixação de agulhas clínicas e cateteres.

O curativo funciona como uma barreira estéril que protege a ferida ou ponto de inserção, fixa-se firmemente à pele por meio de uma borda adesiva e possui uma almofada central que absorve exsudatos, promovendo a cicatrização e prevenindo infecções.

Como Usar

Limpe e esterilize a área da ferida ou local de aplicação.

Retira o papel da embalagem e retire o produto.

Remova o papel de liberação da parte de trás de um dos lados, fixe o curativo sobre a ferida ou sobre o ponto de fixação da agulha, e em seguida remova o papel de liberação do outro lado.

Pressione o curativo para frente e para trás até que esteja plano e aderido à pele. Remova os materiais descartáveis.

Remova suavemente o curativo pela borda, no sentido do crescimento dos pelos (caso haja), formando um ângulo de 180°

Armazenamento

Deve ser armazenado em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um armazém ventilado e seco.



Transporte

Deve ser transportado em temperatura adequada, sem gases corrosivos e em um local ventilado e seco.

Precauções de Segurança:

Verifique a embalagem antes do uso.

Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.

Caso ocorra infecção na área de aplicação, remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Se ocorrerem reações como eritema, coceira etc., remova o curativo e busque cuidados médicos adequados.

Manusear com mãos limpas e secas.

Não reutilizar nem reesterilizar.

Produto descartável e de uso único

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Shanghai ISO Medical Products Co.,LTD.

Endereço: 999 Liu Chen Rd, Pudong New Area 201202 Shanghai, P. R. China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03



- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil CEP:13633-037
- SAC: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira CRQ IV – 04366291

Registro ANVISA: Processo: 25351.048205/2025-83; Nº 82859610004