



AGULHA DE ACUPUNTURA DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A WISSEN CONSULTORIA LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Corpo da Agulha: Fio de aço inoxidável 06Cr19Ni10

Cabo da Agulha: aço inoxidável 06Cr19Ni10

FINALIDADE DE USO

Perfuração da pele para utilização em tratamentos de acupuntura, alívio da dor e liberação terapêutica. Instrumento comprido, delgado e biselado na extremidade, utilizado para estimular os nervos periféricos a fim de produzir analgesia cirúrgica, aliviar a dor e produzir outros efeitos terapêuticos. É amplamente utilizado em terapias complementares. Trata-se de um dispositivo de uso único.

MODELOS COMERCIAIS

- AGULHA COM CABO TIPO ANEL
- AGULHA COM CABO SIMPLES
- AGULHA COM CABO DE TUBO METÁLICO

A estrutura da agulha de acupuntura é formada pela ponta, corpo, raiz, cabo e extremidade posterior da agulha

ESPECIFICAÇÕES:



- Diâmetro do corpo da agulha varia entre: 0,10 mm a 0,80 mm
- Comprimento do corpo da agulha varia entre: 5 mm a 200 mm

EMBALAGEM:

Primária: papel dialisável + lâmina de PVC - 5 unidades por lâmina

Caixa interna: Papelão branco - 20 lâminas por caixa

Embalagem externa: Papelão ondulado - 100 caixas por caixa de transporte

MODO DE USO

1. As agulhas de acupuntura devem ser utilizadas exclusivamente por acupunturistas qualificados e profissionais.
2. Selecionar a agulha com especificação adequada, de acordo com o local de inserção e a prescrição para o paciente.
3. As agulhas de acupuntura estéreis descartáveis podem ser utilizadas após a abertura da embalagem, retirando-se a lâmina plástica e rasgando o papel dialisável.

(Caso haja tubo guia: retirar a lâmina plástica, rasgar o papel dialisável, segurar o tubo de acupuntura com uma mão e o cabo da agulha com a outra, remover a peça de posicionamento e inserir a agulha nos pontos de acupuntura.)

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em local seco, bem ventilado, isento de gases corrosivos e afastado de fogo e materiais inflamáveis.

TRANSPORTE

Este produto deve ser armazenado em ambiente com umidade relativa não superior a 80%, temperatura inferior a 40 °C, sem gases corrosivos e com boa ventilação.

CONTEÚDO



O produto é comercializado em embalagem contendo 5 unidades por lâmina e 20 lâminas por caixa.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

As agulhas não devem ser utilizadas em moxabustão quando o cabo for de plástico, pois não suporta o calor gerado pela queima da moxa. Pessoas com alergia ao material do corpo da agulha devem utilizar com cautela ou seguir a orientação de um médico/acupunturista.

ESTERILIZAÇÃO

Óxido de etileno.

VALIDADE

3 ANOS.

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. A agulha de acupuntura é um produto descartável.
2. As agulhas de acupuntura são esterilizadas por Óxido de Etileno (EO).
3. As agulhas de acupuntura não podem ser reutilizadas, a fim de evitar infecção cruzada.
4. As agulhas de acupuntura não devem ser utilizadas em caso de oxidação/ferrugem.
5. O prazo de validade é de três anos; produtos vencidos não devem ser utilizados.
6. Este produto deve ser armazenado em ambiente com umidade relativa não superior a 80%, temperatura inferior a 40 °C, sem gases corrosivos e com boa ventilação.



7. A estimulação elétrica excessiva pode causar corrosão das agulhas.
8. As agulhas não devem ser utilizadas em moxabustão quando o cabo for de plástico, pois não suporta o calor gerado pela queima da moxa. Pessoas com alergia ao material do corpo da agulha devem utilizar com cautela ou seguir a orientação de um médico/acupunturista.
9. Não reutilizar
10. Agulhas com embalagem danificada não devem ser utilizadas.
11. Não utilizar se a embalagem estiver danificada

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: Wujiang City Shen Ling Medical Device Co., Ltd. INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: Edifício FS-02, nº 807, West Ganquan Road, Jiangling Street, Distrito de Wujiang, Suzhou, CEP 215200, Província de Jiangsu, República Popular da China.

Importado e distribuído por: WISSEN CONSULTORIA LTDA

- CNPJ: 11.014.241/0001-06
- RUA PEREIRA BUENO, n.º 864 - Pirassununga - SP - Brasil – CEP:13630-030
- Fale conosco: sac@wissenconsultoria.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº 82176169013