



CURATIVO NÃO TECIDO PARA FERIDAS - ALEXER

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

O curativo não tecido é composto por fita não tecida, almofada absorvente e papel de liberação. A fita não tecida é composta por não tecido revestido com adesivo médico sensível à pressão.

FINALIDADE DE USO

Este produto é utilizado em cirurgias, na superfície de feridas traumáticas em geral, na aplicação de cateteres arteriovenosos permanentes e também pode ser usado para proteção de feridas do cordão umbilical.

MODELOS COMERCIAIS

CURATIVO NÃO TECIDO PARA FERIDAS - ALEXER

Tamanhos disponíveis:

2 X 3CM,

2,5 X 4CM,

3 X 3,5CM,

3 X 4CM,

2,5 X 4CM,

2,5 X 5CM,

3 X 5CM,

2,5 X 3,5CM,

**3 X 3CM,
2 X 2,3CM,
2,5 X 6,5CM,
3,5 X 4,5CM
4 X 6CM,
4 X 4CM,
4 X 5CM,
4,5 X 6CM,
4 X 6,5CM,
4 X 7CM,
3,7 X 11CM,
4 X 10CM,
4 X 9CM,
4,5 X 20CM,
5 X 5CM,
5 x 25CM,
5 X 30CM,
4,5 X 30CM,
4 X 11CM,
5 X 11CM,
5 X 6CM,
5 X 7CM,
5 X 8CM,
5,5 X 7,5CM,
5 X 9CM,
5 X 10CM,
5 X 15CM,
5,5 X 16CM,
5 X 20CM,
3 X 6CM,**



**6 X 6CM,
7,5 X 7,5CM,
9 X 9CM,
9 X 14CM,
9 X 19CM,
9 X 24CM,
9 X 29CM,
9 X 34CM,
9 X 39CM,
14 X 14CM,
14 X 18CM,
14 X 23CM,
14 X 28CM,
14 X 33CM,
21 X 21CM,
21 X 31CM,
30 X 30CM,
30 X 40CM,
34 X 48CM,**

Cores disponíveis: Branco

Embalagem: 1 unidade por saco, 25 unidades por caixa, 20 caixas por caixa master.

Composição embalagem: Caixa de papelão para varejo

MODO DE USO

Retire o curativo da embalagem estéril e retire primeiro a menor porção do papel de liberação.

Alinhe a almofada absorvente com a área da ferida e aplique o curativo na pele.

Retire a maior porção do papel de liberação restante para que o curativo adira completamente à pele.



Alise o curativo suavemente e retire a película protetora superior, se aplicável. Para remover o curativo, levante um canto e estique suavemente, paralelamente à pele, soltando alternadamente cada canto até que seja completamente removido. Substitua o curativo prontamente se ocorrer vazamento, diminuição da adesão ou se o curativo se danificar.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local seco, bem ventilado, livre de gases corrosivos, afastado de fogo e materiais inflamáveis.

TRANSPORTE

Durante o transporte, manusear com cuidado. Evitar pressão excessiva, exposição direta à luz solar, chuva e neve.

CONTEÚDO

O produto é comercializado com 1 unidade por saco, 25 unidades por caixa, 20 caixas por caixa master.

VALIDADE

3 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a integridade da embalagem antes de usar e confirme o rótulo do produto, data de fabricação e data de validade.

Este produto é de uso único e não pode ser reutilizado.

Para feridas graves ou queimaduras, use sob orientação médica. Se ocorrer vermelhidão, inchaço ou desconforto, suspenda o uso e procure orientação médica.

Como ocorre com todos os produtos adesivos, deve-se ter cautela ao aplicar ou remover o curativo, especialmente em pele sensível ou frágil.



PRODUTO DESCARTÁVEL
PRODUTO DE USO ÚNICO
REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: SLK Medical Material (Tianchang) Co., Ltd. INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Nº 33, Zhenglong Road, Parque Industrial de Qinlan Town, Cidade de Tianchang, Província de Anhui, 239300, China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710042**