



CURATIVO TRANSPARENTE PARA FERIDAS - ALEXER

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

O curativo transparente é composto por fita de filme de poliuretano, almofada absorvente e papel de liberação. A fita de filme de poliuretano é composta por filme de poliuretano revestido com adesivo médico sensível à pressão (material acrílico).

FINALIDADE DE USO

Indicado para utilização após cirurgias, na superfície de feridas traumáticas em geral, na aplicação de cateteres arteriovenosos permanentes e também pode ser usado para proteção de feridas do cordão umbilical.

MODELOS COMERCIAIS

CURATIVO TRANSPARENTE PARA FERIDAS COM ALMOFADA

Tamanhos disponíveis:

2 X 3CM,

2,5 X 4CM,

3 X 3,5CM,

3 X 4CM,

2,5 X 4CM,

2,5 X 5CM,

3 X 5CM,



2,5 X 3,5CM,

3 X 3CM,

2 X 2,3CM,

2,5 X 6,5CM,

3,5 X 4,5CM

4 X 6CM,

4 X 4CM,

4 X 5CM,

4,5 X 6CM,

4 X 6,5CM,

4 X 7CM,

3,7 X 11CM,

4 X 10CM,

4 X 9CM,

4,5 X 20CM,

5 X 5CM,

5 x 25CM,

5 X 30CM,

4,5 X 30CM,

4 X 11CM,

5 X 11CM,

5 X 6CM,

5 X 7CM,

5 X 8CM,

5,5 X 7,5CM,

5 X 9CM,

5 X 10CM,

5 X 15CM,

5,5 X 16CM,

5 X 20CM,



**3 X 6CM,
6 X 6CM,
7,5 X 7,5CM,
9 X 9CM,
9 X 14CM,
9 X 19CM,
9 X 24CM,
9 X 29CM,
9 X 34CM,
9 X 39CM,
14 X 14CM,
14 X 18CM,
14 X 23CM,
14 X 28CM,
14 X 33CM,
21 X 21CM,
21 X 31CM,
30 X 30CM,
30 X 40CM,
34 X 48CM,**

Cores disponíveis: Branco

Embalagem: 1 unidade por saco plástico, 25 unidades por caixa de papelão, 20 caixas por caixa master.

CURATIVO TRANSPARENTE PARA FERIDAS

Tamanhos disponíveis:

**4,4 X 4,4CM,
5 X 6CM,
5 X 8CM,
6,5 X 6,5CM,**



6 X 9CM,
6 X 8,5CM,
7 X 9CM,
7,5 X 10CM,
8 X 10CM,
8,5 X 11,5CM,
9 X 12CM,
9 X 25CM
10 X 10,5CM,
10 X 20CM,
10 X 30CM,
11 X 14CM,
15 X 25CM,
15 X 40CM,
5 X 5CM,
5,4 X 6,4CM,
5 X 4CM,
6 X 7CM,
6 X 10CM,
7 x 7CM,
7 X 10CM,
8 X 8CM,
8 X 12CM,
9 X 9CM,
9 X 15CM,
9 X 30CM,
10 X 12CM,
10 X 25CM,
10 X 35CM,
15 X 15CM,



**15 X 30CM,
15 X 45CM,
20 X 30CM,
30 X 30CM,
40 X 50CM,
5 X 5,7CM,
5 X 7,5CM,
6 X 6CM,
6 X 8CM,
6,5 X 10CM,
7 X 8CM,
7,5 X 7,5CM,
8 X 9CM,
8,5 X 10,5CM,
9 X 10CM,
9 X 20CM,
10 X 10CM,
10 X 15CM,
10 X 11,5CM,
10 X 14CM,
15 X 20CM,
15 X 35CM,
20 X 20CM,
20 X 35CM,
30 X 40CM,
45 X 60CM,**

Cores disponíveis: Transparente

Embalagem: 1 unidade por saco plástico, 50 unidades por caixa de papelão, 20 caixas por caixa master.

MODO DE USO

Retire o curativo da embalagem estéril e remova primeiro a parte menor do papel de liberação. Alinhe a almofada absorvente com a área da ferida e aplique o curativo sobre a pele.

Remova a parte restante (maior) do papel de liberação para que o curativo fique completamente aderido à pele.

Alise suavemente o curativo e remova o filme protetor superior, se aplicável.

Para remover o curativo, levante uma das extremidades e puxe delicadamente, esticando paralelamente à pele e soltando alternadamente cada canto até a remoção completa.

Substitua o curativo prontamente se houver vazamento, diminuição da adesão ou dano ao produto.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em local seco, bem ventilado, isento de gases corrosivos e afastado de fogo e materiais inflamáveis.

TRANSPORTE

Durante o transporte, manusear com cuidado. Evitar pressão excessiva, exposição direta à luz solar, chuva e neve.

CONTEÚDO

O produto é comercializado com 1 unidade por saco plástico, 50 unidades por caixa de papelão, 20 caixas por caixa master.

VALIDADE

3 anos.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verificar a integridade da embalagem antes do uso e confirmar o rótulo do produto, data de fabricação e prazo de validade.

Este produto é de uso único e não pode ser reutilizado.

Para feridas graves ou queimaduras, utilizar sob orientação médica. Se ocorrer vermelhidão, inchaço ou desconforto, interromper o uso e procurar orientação médica.

Como em todos os produtos adesivos, deve-se ter cautela ao aplicar ou remover o curativo, especialmente em pele sensível ou frágil.

PRODUTO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: SLK Medical Material (Tianchang) Co., Ltd. INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Nº 33, Zhenglong Road, Parque Industrial de Qinlan Town, Cidade de Tianchang, Província de Anhui, 239300, China

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- Nº 82696710043