



FITA DE SILICONE - ALEXER

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

A fita é composta por fita de PU, tecido não tecido e gel de silicone, com ou sem papel protetor.

FINALIDADE DE USO

É utilizado para adesão e fixação de curativos sobre a superfície de feridas ou para fixação de outros dispositivos médicos em áreas específicas do corpo humano. Também pode ser aplicado sobre a pele íntegra para o tratamento e cuidado de cicatrizes, sejam elas hipertróficas (novas ou antigas), neoplásicas ou resultantes de feridas recentemente cicatrizadas.

MODELOS COMERCIAIS

FITA DE SILICONE SUAVE

Tamanhos disponíveis:

2CM X 1,5M,

2CM X 3M,

2,5CM X 1,5M,

2,5CM X 3M,

2,5CM X 5M,

4CM X 1,5M,

4CM X 3M,

4CM X 3,3M,



4CM X 3,8M,

4,5CM X 3M

Cores disponíveis: Cor de pele, transparente, rosa, azul

Quantidade embalagem: 1 rolo por caixa, 200 caixas por caixa master.

Composição embalagem:

Primária: caixa cartonada,

Secundária: caixa de papelão

- FITAS DE SILICONE PARA CICATRIZES

Tamanhos disponíveis:

3CM X 12CM,

3,5CM X 7,5CM,

3,5CM X 15CM,

3CM X 20CM,

4CM X 7,5CM,

4CM X 15CM,

5CM X 7,5CM,

6CM X 12CM,

4CM X 30CM,

10CM X 18CM,

40CM X 50CM

Cores disponíveis: Cor de pele, transparente

Quantidade embalagem: 1 unidade por saco, 4 unidades por caixa, 50 caixas por caixa master.

Composição embalagem:

Primária: plástico,

Secundária: caixa cartonada

Terciária: caixa de papelão



MODO DE USO

Selecionar o produto com especificações adequadas para a área de aplicação.

Remover o papel protetor e aplicar suavemente o adesivo da extremidade inicial até a final, alisando com os dedos para garantir que não haja tensão entre a fita adesiva e a pele.

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se armazenar em local fresco, seco, ventilado e livre de gases corrosivos, afastado de fontes de calor e materiais combustíveis.

TRANSPORTE

Recomenda-se armazenar em local fresco, seco, ventilado e livre de gases corrosivos, afastado de fontes de calor e materiais combustíveis.

CONTEÚDO

Fita de silicone suave: 1 rolo por caixa; 200 caixas por caixa master.

Fita de silicone para cicatrizes: 1 unidade por saco; 4 unidades por caixa; 50 caixas por caixa master.

VALIDADE

3 anos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Verifique a embalagem antes do uso.

Utilizar dentro do prazo de validade indicado.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Manter afastado da luz solar

Manter em local seco

PRODUTO DESCARTÁVEL



PRODUTO DE USO ÚNICO

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.

Fabricante: SLK Medical Material (Tianchang) Co., Ltd. INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Nº 33, Zhenglong Road, Parque Industrial de Qinlan Town, Cidade de Tianchang, Província de Anhui, 239300, China.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes – Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710039**