



## **LEITO HOSPITALAR MANUAL**

### **PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

O produto é composto por estrutura de suporte, assento, encosto, apoio para pernas (em alguns modelos), sistema de ajuste de altura, ajuste de encosto, apoio de cabeça (em alguns modelos) e pés com ponteira antiderrapante. Possui sistema de regulagem manual para inclinação do encosto e das pernas, além de ajuste de altura (manual, conforme o modelo). O dispositivo pode ser dobrável em alguns modelos, facilitando o armazenamento e transporte. O material principal da estrutura é tubo de aço com tratamento anticorrosivo ou tubo de aço de alta resistência com pintura epóxi. O assento e o encosto são confeccionados em espuma, proporcionando conforto ao paciente. As laterais são em ABS, conferindo maior segurança e durabilidade ao equipamento.

- Estrutura principal em tubo de aço de alta resistência com pintura epóxi
- Estofamento em espuma
- Sistema de regulagem manual de encosto e pernas
- Sistema de ajuste de altura (manual)
- Apoios de cabeça e pernas (em alguns modelos)
- Laterais em ABS



- Pés com ponteiros emborrachadas antiderrapantes
- Sistema dobrável (em modelos específicos)

---

## **FINALIDADE DE USO**

Indicado para utilização em leitos hospitalares, clínicas, instituições de longa permanência e atendimento domiciliar, visando proporcionar conforto, segurança e suporte adequado ao paciente durante o período de internação, procedimentos clínicos, terapias ou reabilitação. O equipamento dispõe de ajustes de posição, permitindo diferentes níveis de inclinação do encosto e das pernas, além de oferecer componentes como grades laterais, rodízios com freio e cabeceira/peseira removíveis, contribuindo para a assistência, cuidados e mobilidade do paciente em ambiente hospitalar ou similar.

---

## **MODELOS COMERCIAIS**

**Modelo: C11**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 460/680 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C11-B**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2150 x 980 x 460/680 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 490/680 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 460/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 490/680 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-3**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 490/680 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-4**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 460/720mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-5**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2150 x 1060 x 480/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-6**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2130 x 1000 x 460/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-7**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2120 x 980 x 460/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-8**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 980 x 490/680 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-9**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2150 x 980 x 460/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-10**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2150 x 980 x 460/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C02-11**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2150 x 980 x 480/720 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C12**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2130 x 1060 x 480 mm**  
**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C12-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C12-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2180 x 1060 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C12-3**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2100 x 1010 x 450 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C03-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2130 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C03-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C03-3**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C04-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2130 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C04-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C04-3**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C05**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 980 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C06**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 980 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C07**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: C08**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2080 x 980 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK31**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 1980 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK32**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2060 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK11-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK10-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK16**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK15-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2030 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK14-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK14-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK23-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK26-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK25-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK24-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2030 x 960 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK28-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK28-2**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK01**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK02**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK03**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK03-1**

**Cor: Branco**



**Dimensões (C x L x A): 2030 x 900 x 500 mm**

**Modelo: ZK18**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 1880 x 860 x 500 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: ZK19**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 1900 x 910 x 700 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A01-1**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 520 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A06**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2080 x 960 x 520 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A01**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2120 x 960 x 520 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A03**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2120 x 960 x 560 mm**



**Modelo: A03-S**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2120 x 960 x 560 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A01-3**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2120 x 960 x 520 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

**Modelo: A07**

**Cor: Branco**

**Dimensões (C x L x A): 2120 x 1060 x 600 mm**

**Capacidade de carga: 260kg**

---

## **MECANISMO DE AÇÃO**

Os produtos possuem estrutura ajustável com regulagem de altura, inclinação do encosto e das pernas, permitindo a adaptação da posição do paciente conforme o procedimento realizado. A estrutura é reforçada em aço com pintura epóxi, com estofamento em espuma e laterais em ABS, garantindo conforto, segurança e estabilidade durante o uso.

---

## **ARMAZENAMENTO**

O equipamento deve-se armazenar em local seco, ventilado, protegido da luz solar direta e de intempéries. A temperatura do ambiente manter entre -5°C e +55°C, com umidade relativa do ar inferior a 85% e ausência de gases corrosivos. Recomenda-



se manter o produto embalado quando não estiver em uso, evitando contato com água, poeira ou agentes que possam danificar a estrutura.

---

## **TRANSPORTE**

O equipamento deve-se armazenar em local seco, ventilado, protegido da luz solar direta e de intempéries. A temperatura do ambiente deve ser mantida entre  $-5^{\circ}\text{C}$  e  $+55^{\circ}\text{C}$ , com umidade relativa do ar inferior a 85% e ausência de gases corrosivos. Recomenda-se manter o produto embalado quando não estiver em uso, evitando contato com água, poeira ou agentes que possam danificar a estrutura.

---

## **CONTEÚDO**

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

Não é necessária.

---

## **REQUISITOS DE MANUTENÇÃO**

A manutenção deve ser realizada periodicamente a cada seis meses, incluindo a verificação de parafusos, travas, manivelas e integridade da estrutura. Recomenda-se limpeza regular com pano úmido e detergente neutro, evitando produtos corrosivos.

Após dois anos de uso, verificar sinais de desgaste ou alcalinização das peças. A manutenção deve ser realizada por profissional habilitado ou equipe de manutenção do hospital, garantindo o funcionamento seguro do equipamento.

---

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

1. O produto deve ser utilizado apenas por profissionais capacitados, seguindo as instruções de uso fornecidas pelo fabricante;
2. Verificar sempre se as travas de segurança, regulagens e apoios estão devidamente fixados antes da utilização;



3. Não exceder o limite de peso máximo suportado pelo equipamento;
4. Não utilizar o produto em pisos irregulares, inclinados ou escorregadios, a fim de evitar acidentes;
5. Evitar o contato do estofamento em espuma com objetos perfurantes, cortantes ou produtos químicos
6. Não permitir que crianças ou pessoas não autorizadas utilizem ou manipulem o equipamento sem supervisão adequada.
7. Em caso de danos estruturais, partes soltas ou estofamento rasgado, suspender imediatamente o uso e acionar o fabricante ou assistência técnica.
8. O uso inadequado ou em desacordo com as recomendações pode comprometer a segurança do usuário e a durabilidade do produto.
9. **PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**

---

## **VALIDADE**

**5 ANOS.**

---

## **DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO**

**Comprimento (mm): 1.950 mm a 2.200 mm**

**Largura (mm): 900 mm a 1.100 mm**

**Altura (mm): 460 mm a 720 mm**

---

## **Fabricante: Hengshui Zhukang Medical Instrument Co.,LTD. – INDÚSTRIA CHINESA**

Endereço: South District of High-Tech Industrial Development Zone, Jizhou District, Hengshui City, Hebei Province, China

## **Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03



- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- **Nº 82696710011**