



## **ROLO DE CURATIVO NÃO TECIDO**

### **PRODUTO DE USO PROFISSIONAL**

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

---

### **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

---

### **COMPOSIÇÃO**

O rolo de curativo de tipo não tecido é constituído por uma camada de descolagem e uma camada adesiva. A camada de descolagem é feita de papel autocolante; a camada adesiva é constituída por tecido não tecido hidro entrançado revestido com adesivo sensível à pressão.

---

### **FINALIDADE DE USO**

Os rolos de curativo são adequados para a fixação e cuidados pós-operatórios de feridas, fixação de pensos, agulhas, cateteres etc.

---

### **MODELOS COMERCIAIS**

**ZD:**

**A2NR0001 5cm x 10m**

**A2NR0002 10cm x 5m**

**A2NR0003 10cm x 10m**

**A2NR0004 15cm x 10m**

**A2NR0005 20cm x 10m**

**A2NR0006 30cm x 10m**

**A2NR0013 2,5cm x 5m**

**A2NR0014 5cm x 5m**



**A2NR0015 10cm x 5m**

**A2NR0016 20cm x 5m**

**A2NR0017 30cm x 5m**

**A2NR0018 10cm x2m**

**A2NR0019 48cm x 3m**

**A2NR0020 25cm x 10m**

**COR: BRANCO**

---

## **MODO DE USO**

- 1. Abra a embalagem exterior e retire a fita adesiva.**
- 2. Corte a fita com o comprimento pretendido, fixe-a à pele e alise a fita à volta.**

---

## **ARMAZENAMENTO**

**Os produtos devem ser armazenados num local sem luz solar direta, ventilado e seco, e a uma temperatura adequada, e os produtos acabados não devem entrar em contato com gases corrosivos, substâncias tóxicas e perigosas, solventes orgânicos, radiação ionizante ou raios ultravioleta.**

---

## **TRANSPORTE**

**Os produtos devem ser transportados num local sem luz solar direta, ventilado e seco, e a uma temperatura adequada, e os produtos acabados não devem entrar em contato com gases corrosivos, substâncias tóxicas e perigosas, solventes orgânicos, radiação ionizante ou raios ultravioleta.**

---

## **CONTEÚDO**

**O produto é comercializado em embalagem contendo 1 rolo por caixa.**

---

## **ESTERILIZAÇÃO**

**Esterilização por Óxido de Etileno.**

---

**VALIDADE**

**5 anos.**

---

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- 1. Lave e seque a superfície da pasta da pele.**
- 2. Deve-se evitar a exposição à luz solar e ao calor.**
- 3. Não utilizar produtos fora de prazo.**
- 4. Verifique a embalagem antes do uso. Não utilizar se estiver danificada, úmida ou vencida.**
- 5. Se houver infecção na área de aplicação, remova o curativo e procure cuidados médicos adequados.**
- 6. Se ocorrerem irritações como eritema ou coceira, remova o curativo e busque orientação médica.**
- 7. Substitua o curativo se houver grande quantidade de exsudato.**
- 8. A reutilização pode causar contaminação cruzada.**
- 9. O produto não deve ser reesterilizado.**

**PRODUTO DE USO ÚNICO****REPROCESSAMENTO PROIBIDO**

**Após o uso, o produto deve ser descartado conforme as regulamentações locais.**

---

**Fabricante: Zhende Medical Co.,LTD. INDÚSTRIA CHINESA**

Endereço: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, CHINA

**Importado e distribuído por: MVW LTDA**

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP  
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: [sac@mvwtrading.com.br](mailto:sac@mvwtrading.com.br)
- Site: [www.mvwtrading.com.br](http://www.mvwtrading.com.br)



- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

**REGISTRO ANVISA:**

- N° 82696710033