



SUORTE PARA SORO

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Alumínio

FINALIDADE DE USO

É uma linha de suportes para soro. A série de suportes para soro é indicada para cuidados gerais, sendo útil no dia a dia do paciente para a administração de soluções intravenosas.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: YM-H01

Altura (min-máx): 1220 – 2030 mm

Carga max.: 18KG

Modelo: YM-H04

Altura (min-máx): 1200 – 2160 mm

Carga max.: 18KG

Modelo: YM-H03

Altura (min-máx): 1200 – 2080 mm

Carga max.: 18KG



Modelo: YM-H05

Altura (min-máx): 1220 – 2080 mm

Carga max.: 18KG

Modelo: YM-H06

Altura (min-máx): 1200 – 2080 mm

Carga max.: 18KG

MECANISMO DE AÇÃO

O suporte para soro funciona como uma estrutura vertical com ganchos na parte superior, permitindo a suspensão de bolsas de soro ou medicamentos intravenosos, utilizando a gravidade para garantir o gotejamento controlado do fluido diretamente na corrente sanguínea do paciente.

ARMAZENAMENTO

- **Ambiente seco e ventilado:** Guarde o suporte em local sem umidade para evitar oxidação nas partes metálicas (como parafusos, rodízios ou encaixes) mesmo sendo de alumínio.
- **Protegido da luz solar direta:** A exposição prolongada ao sol pode ressecar ponteiros de borracha ou plásticos do ajuste.
- **Superfície plana:** Apoie o suporte sobre uma base nivelada para evitar quedas e deformações, principalmente se ele for do tipo com rodinhas.
- **Dobrado ou retraído (se ajustável):** Deixe o tubo na menor altura possível para facilitar o armazenamento e evitar esforço desnecessário na haste.
- **Limpo e seco:** Após o uso, limpe com pano úmido e seque bem para remover resíduos que possam afetar a durabilidade do material.

TRANSPORTE



- Retrátil ou desmontado, se possível: Transporte com a haste recolhida ou desmontada para reduzir o risco de impacto e facilitar o manuseio.
- Proteção de pontas e ganchos: Envolver os ganchos com material protetor (ex: espuma ou plástico bolha) para evitar que enrosquem ou danifiquem outros itens.
- Fixação durante o transporte: Em veículos, prenda o suporte para que ele não tombe, role ou bata em superfícies duras.
- Evitar empilhamento ou peso sobre ele: Nunca coloque objetos pesados sobre o suporte, mesmo que ele pareça resistente.
- Evite contato com líquidos e agentes químicos: Embora seja de alumínio, o contato com substâncias corrosivas pode danificar partes móveis ou adesivos de marcação.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto. Cada unidade é composta por encosto, assento para banho e apoio de braço.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Fixar o gancho IV de 4 pontas (C):

Enrosque o gancho de 4 pontas (C) na parte superior do tubo do suporte para soro (B), apertando firmemente com a mão.

2. Montar a base:

Insira o tubo do suporte (B) na base (A) e vire o conjunto de cabeça para baixo. Posicione a mola junto à abertura da base, coloque a arruela grande sobre a mola, depois encaixe a arruela de pressão no parafuso Allen. Passe o parafuso pelas arruelas e pela mola, rosqueando-o no tubo da base, e aperte firmemente.

3. Ajuste de altura:

Ajuste o tubo para a altura desejada e aperte o anel de fixação (colar) com firmeza, manualmente.



REQUISITOS DE INFRA-ESTRUTURA

Evitar superfícies irregulares

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

- 1. Método de limpeza: use um pano úmido para limpar.**
 - 2. Inspeção periodicamente a linha de suportes para soro para verificar danos ou componentes soltos.**
-

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- 1. NÃO utilizar este produto sem antes ler e compreender as instruções contidas neste manual. Se não conseguir entender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com um profissional de saúde, fornecedor ou técnico antes do uso — caso contrário, podem ocorrer lesões corporais graves ou danos ao produto.**
- 2. NÃO exceder a capacidade máxima de peso. Suporta até 2 bombas de infusão com peso total de até 6,3 kg (14 lbs) e dois frascos de fluido de 3 litros, oferecendo versatilidade.**
- 3. Todas as rodas devem estar em contato com o chão em TODOS OS MOMENTOS.**
- 4. NÃO utilizar o suporte para soro andando de costas, descendo rampas ou subindo escadas, meios-fios ou obstáculos. Há risco grave de queda ou lesão.**



5. Tenha cuidado ao movimentar o suporte com o paciente. Evitar superfícies molhadas, escorregadias, fios, cabos, tubos ou superfícies irregulares que possam causar tombamento.
6. Atenção ao usar múltiplas bombas de infusão. Posicionar elas de forma a contrabalançar o peso entre si.
7. NÃO prender o suporte para soro a outros objetos.
8. NÃO utilizar em áreas com ressonância magnética (MRI).
9. NÃO utilizar o suporte para soro como apoio ou auxílio para caminhar. Não tente apoiar seu peso nele ou usá-lo como auxílio para se levantar.
10. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

INDETERMINADO

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm):

Largura (mm):

Altura (mm): 1200 a 2160 mm

Fabricante: Com-Bridge International Co., LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: N°5, FUTIAN SIXTH ROAD GANGKOU TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG CN – GUANGDONG - ZHONGSHAN/CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037



- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710024**