

Manual - Bandagem Elástica Autoadesiva com Látex

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

Especificações Técnicas

Informações técnicas relevantes:

- Tolerância de largura: $\pm 6\%$
- Tolerância de comprimento: $\pm 8\%$
- Resistência ao descolamento (peeling strength): $\geq 0,6 \text{ N} / 2,5 \text{ cm}$
- Índice de elasticidade (elastic ratio): $1:2,0 \pm 0,5$ •Aparência: O produto deve ser limpo e livre de contaminação.

Nota: Sob a condição de que o princípio de funcionamento, a composição estrutural, as matérias-primas, os indicadores de desempenho e o escopo de aplicação do produto permaneçam inalterados, o tamanho especial pode ser personalizado de acordo com o contrato do cliente.

Descrição

A bandagem adere a si mesma devido à presença de látex natural na superfície, permitindo fixação sem uso de presilhas. Sua composição de não tecido e spandex garante elasticidade (relação $1:2,0 \pm 0,5$), aplicando compressão controlada sobre a área lesionada.

Essa compressão:

- Reduz inchaço e dor,
 - Limita movimentos excessivos,
 - Oferece suporte muscular ou articular. É um dispositivo de ação mecânica local, sem interferência farmacológica.
-

Finalidade de uso

Usado para curativo de feridas cirúrgicas e ortopédicas, fixação de membros, entorse de membros, curativo de inchaço nas articulações e dor.

Como Usar

- Corte o comprimento necessário da bandagem.
 - Envolver a área desejada sem aplicar tensão excessiva.
 - Pressione levemente com a mão para garantir adesão.
 - Não aplicar diretamente sobre feridas abertas ou pele lesionada.
 - Remover após 24–72 horas ou conforme orientação médica.
-

Armazenamento

Conservar em local seco, bem ventilado, limpo e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

Transporte

Evitar umidade, choques mecânicos e exposição prolongada ao calor durante o transporte.

Precauções de Segurança:

- Uso externo apenas.
- Não aplicar sobre feridas abertas ou pele lesionada.
- Evitar compressão excessiva, que pode causar restrição de circulação sanguínea.
- Produto de uso único – não reutilizar.
- Após uso, descartar conforme normas locais de resíduos de produtos médicos não perigosos.

Outros cuidados:

- Uso externo apenas.

- Uso externo apenas.
- Não aplicar sobre feridas abertas ou pele lesionada.
- Evitar compressão excessiva, que pode causar restrição de circulação sanguínea.
- Produto de uso único – não reutilizar.
- Após uso, descartar conforme normas locais de resíduos de produtos médicos não perigosos.

Fabricante: Anhui Medsport Medical Products Co., Ltd.

Endereço: Luojiu Blvd. West, Jinxiu Road North, Economic and Technological Development Zone, Huainan, Anhui, CHINA 232007.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
 - Rua Joaquim Mendes 1726 -Jardim Carlos Gomes Pirassununga - SP – Brasil, CEP: 13633-037
- SAC: sac@mvw.com.br
- Site: www.mvwonline.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira CRQ IV – 04366291

Registro ANVISA: Processo: 25351.085140/2025-57; N° 82696710004